

# ティオン オフィス／ホーム プラチナ

歯科用ホワイトニング



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



# 医療ホワイトニングとは

オフィス ホーム



歯科医院で



歯科医師・  
歯科衛生士\*1が

\*1 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと  
医療ホワイトニング行為を実施



医療機器製品\*2  
を用いて

\*2 過酸化水素/過酸化尿素/光照射器

歯の内部まで白くするホワイトニングです。



医療ホワイトニングについての詳細はコチラ



## ティオン オフィス

低刺激で高いホワイトニング効果

過酸化水素濃度 35%  
過酸化尿素濃度 30%  
混合 過酸化水素濃度 約23%



豊田中央研究所が開発した  
可視光応答型光触媒。



\*効果には個人差があります。

## ティオン ホーム プラチナ

有効成分が効率よく歯面に浸透

ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。





\*効果には個人差があります。

### V-CAT®のはたらき


光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

#### 臨床試験の結果

- 治験の概要 72名の着色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。
- 安全性 漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象として歯肉の自覚が11症例、軽度の副作用(唇が乾燥してヒリヒリした)が1症例認められた。
    - 副作用なし: 71症例
    - 歯肉の自覚: 11症例
    - 軽度の副作用: 1症例(乾燥により唇がヒリヒリした)
  - 有効性 漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェードガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が悪くなった症例はなかった。
    - 3シェード以上改善: 57症例
    - 1~3シェード改善: 15症例

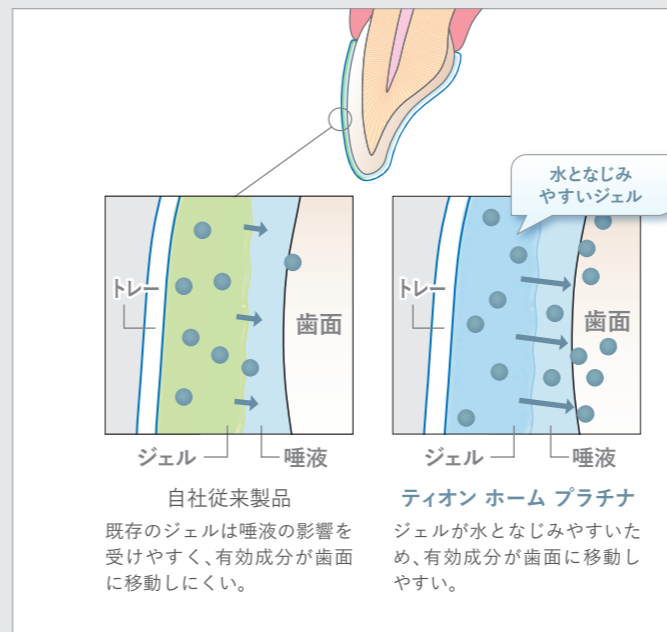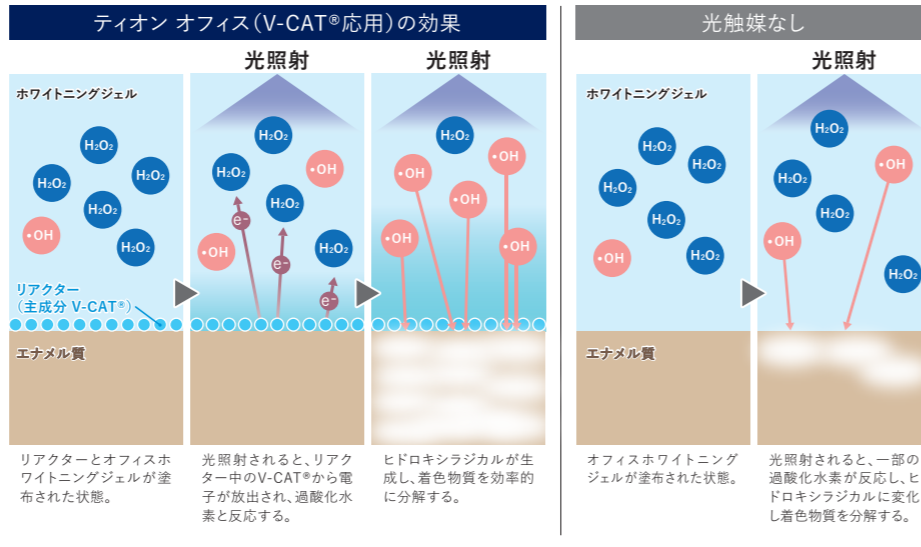

### 有効成分放出量比較試験

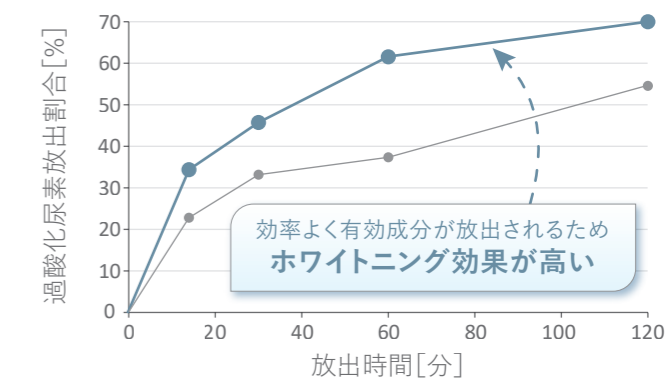


効率よく有効成分が放出されるため  
ホワイトニング効果が高い

ジーシー研究所試験結果  
合成ハイドロキシアパタイトブロックへの有効成分の放出量を測定

### 安全な光波長域で反応

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®(可視光応答型光触媒)は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

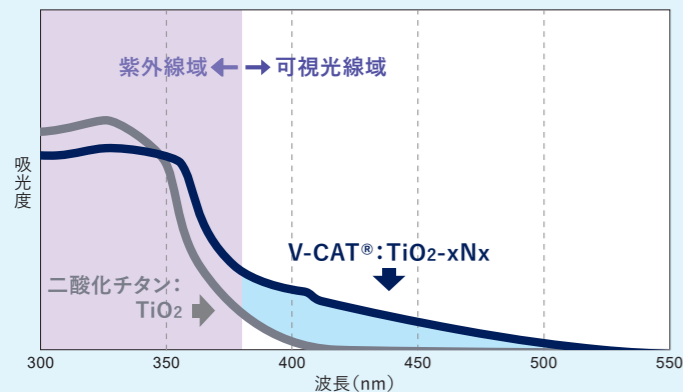


### 安全に使えるシステム

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、デイスパーザブルファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。



### 溶けにくく、垂れにくい、よく伸びるジェル性状

ジェルが唾液に溶けにくい、歯面に密着して広がって留まり、マウストレー装着時に歯面にムラなく有効成分が作用します。

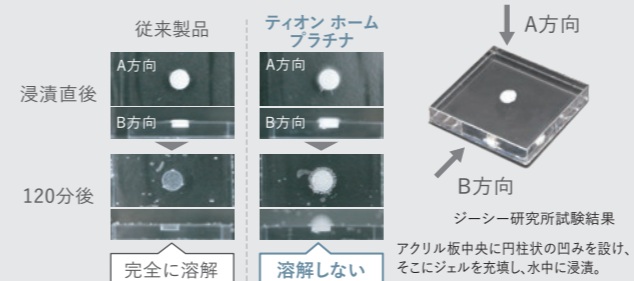


温度・湿度の高い口腔内でもジェルが垂れにくく、マウストレーから流れ出しにくい。

37°C・湿度100%条件下で2時間放置  
※着色したジェルを注入したトレーを模型に装着

### 確認しやすい白色ジェル

ジェルが白色のため、マウストレー内のジェルの広がりを確認できます。ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目視で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。

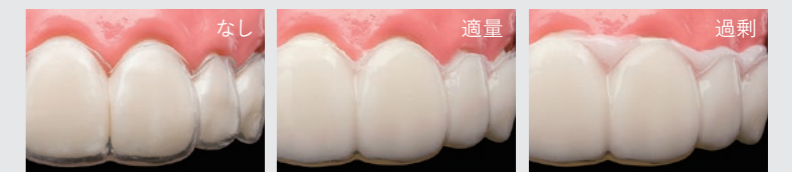

しなやかなで歯面にフィットするマウストレー



スチレン・イソブレンブロック共重合体のトレーシートにより、細部まで精度よく再現できます。装着感がソフトで、透明性も高いため、違和感なく使用できます。



歯科用オフィスホワイトニング  
**ティオン オフィス**

包装●1函：オフィスホワイトニング材 シリンジA(1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB(1.0g) 1本、リアクター(2.0g) 1本、歯肉保護レジン(1.5g) 1本、ティスポーザブルティッシュ 1個、ティスポーザブルブラシ 2本、ティスポーザブルファイバー付きチップ 2個

【単品包装】  
歯肉保護レジン  
包装●1函：1.5g1本

歯科用漂白材 ティオン オフィス  
高度管理医療機器 22200BZX00785000

要冷蔵 医薬用外劇物

関連製品



リップジェル  
包装●1函：1個 8g



リトラクター  
サイズ●2種：S、M  
包装●1函：5個  
歯科用開閉器 リトラクター  
一般医療機器 13B1X00155000199



フェイシャルシート  
包装●1函：100枚

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用照射器)

ティオンライト

包装●本体1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ)コスモブルー/ティオンライト用 2個、六角レンチ(大)(小) 各1個、電源コード 1本

【単品包装】  
保護メガネ(オーバークラスタイプ)コスモブルー/ティオンライト用  
包装●1個

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用照射器)  
ティオンライト  
一般医療機器 特定保守管理医療機器  
13B1X00155000312



プリリカ ビアコン

包装●パッケージ：本体1台、コントローラ1台、お知らせ受信機1台、プリリカ用開閉器S/SS各1個、保護メガネ1個、収納袋1個、院内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート化粧品リップ110枚入

歯面漂白用加熱装置 プリリカ ビアコン  
一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008  
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
製造販売元 株式会社東京技研横浜工場 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開閉器 口角鉤 ダブルワイター  
一般医療機器 11B1X1000650D205  
発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
製造販売元 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28



歯科用ホームホワイトニング  
**ティオン ホーム プラチナ**

包装●スターキット 1函：ホームホワイトニング材(2.5mL) 4本、トレーシート 2枚、トレーケース 1個、シールドガイド 1枚、ペーパーバッグ 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材 ティオン ホーム プラチナ  
高度管理医療機器 22900BZX00205000



2シリンジ  
包装●1袋：ホームホワイトニング材(2.5mL)2本



リフィル(10本)  
包装●1函：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×10



リフィル(20本)  
包装●1函：ホームホワイトニング材(2.5mL)1本入×20

要冷蔵

関連製品



ティオン ホーム プラチナ  
トレーシート  
包装●1函：10枚



ティオン ホーム プラチナ  
トレーケース  
包装●1函：10個



真空加熱成形器

プロフォーム

包装●一式  
歯科技工用成型器 プロフォーム  
一般医療機器 13B1X00155000106



超速硬石こう(模型用)

シェイク!ミックス ストーン  
色調●2色=ピンク、イエロー 包装●シンプルパック 1函：3kg(1.5kg×2)  
歯科用硬質石こう シェイク!ミックス ストーン  
一般医療機器 13B1X00155000290



薬用歯みがき類 医薬部外品

ルシェロ歯みがきペースト  
ホワイトプレミアムケア

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

香味●グリーンシトラス  
内容量●100g  
包装●1函：1本  
包装・希望患者価格●1函：1本=¥2,200(税込)

※6歳未満の子供の手の届かないところに保管し、使用させない。  
※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に黄色く見える場合がございますが、品質に問題はございません。

製造販売元 日本ゼット株式会社  
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

歯科医院用



歯ブラシ

ジーシー ルシェロ 歯ブラシ

B-10/B-20 ピセラ/W-10  
毛の硬さ●B-10、B-20=M(ふつ)、S(やわらかめ)  
W-10=やわらかめ

包装●  
B-10 1函：20本  
B-20 1函：20本  
W-10 1函：6本(各色3本)  
包装・希望患者価格●  
B-10 1本=¥390(税込)  
B-20 1本=¥340(税込)  
W-10 1本=¥450(税込)

ミネラル含有ペースト  
MIペースト

内容量●40g  
包装●  
イントロダクトリセット1函：3本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)  
アソートセット1函：10本(各フレーバー2本)  
各フレーバー1函：1本  
包装・希望患者価格●1函：1本=¥1,780(税込)



歯面清掃用カップ

ジーシー PTCカップII

包装●1函：20個  
歯磨きカップ ジーシー PTCカップII  
一般医療機器 13B1X00155000291

※掲載情報は2024年4月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町7番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store からダウンロード  
Google Play からダウンロード  
どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

