

オクルーザルスプリント用常温重合レジン

ファセットレジン

FACET RESIN

設備機器不要。ブラキシズムの評価が確実、容易に行えます。

ファセットレジンは、ブラキシズムにより形成されたファセットの観察を容易に行うために開発されたオクルーザルスプリント用常温重合レジンです。特別な機器を用いることなく、オクルーザルスプリントが作製可能。優れた操作性と十分な強度、ファセット形成に最適な摩耗性によりファセットの観察が簡単、確実に行えます。



●完成したオクルーザルスプリント。



●マーカ^{*}を均一に塗布したオクルーザルスプリント

評価

1. 調整後咬合面にマーカ^{*}を塗布し、2週間使用形成されたファセットを評価します。
2. ファセットをレジン床用のシリコンポイントで平らにし、さらに2週間使用。この評価を計3回以上繰り返します。

※2週間ごとのファセットは形や深さがほぼ一定になります。




ジーシー ファセットレジン

包装●1函セット：粉末100g1本、液100g(104mL)1本、液瓶/スル1個、粉末計量器1個、液計量器1個、混和器1個、プラスチックバチュラ1本

*【別売】ジーシー ファセットレジンマーカ

包装●13g(10.5mL)1本

Bruxismの強さの評価方法

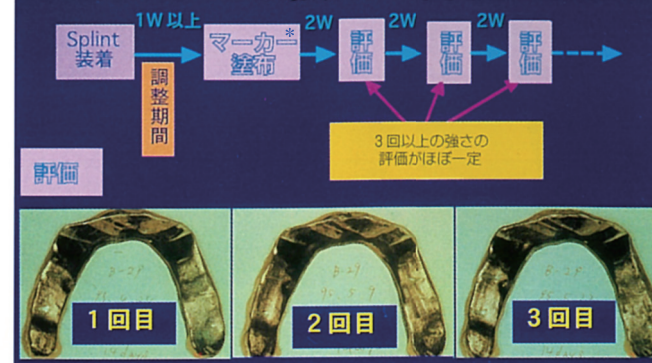

一般医療機器 ジーシー ファセットレジン 23B2X00038000035 / ジーシー ファセットレジンマーカ 23B2X00038000036 ※掲載の情報は2019年12月現在のものです。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地