

EOM FC Connect

フットコントローラー機能拡張モジュール

複数のUSB接続機器の操作を
ユニットのフットコントローラーに集約



フットコントローラーでUSB接続機器を操作

USB接続機器の操作をフットコントローラーで行うことで手元の施術に集中でき、快適な診療が行えます。



例1 口腔内カメラ (MyRay カム C-U2)とコネク

- 指によるシャッター操作をフットコントローラーで行うことで手ブレによる撮影の失敗を低減
- MyRay カム C-U2に付属するソフトウェアでは動画保存ができませんが、PCのWindowsの動画保存機能を用いることで保存が可能



(イメージ)

例2 歯科診療コミュニケーションツール (ピクモアール)とコネク

- マイクロスコープ用画像管理システム(ピクモアール)の撮影操作をフットコントローラーで行うことで治療の手を止めることなく撮影が可能



(イメージ)

※全てのUSB接続機器の操作が可能となるわけではありません。操作可能となる機器については弊社までお問い合わせください。

複数のUSB接続機器の操作を1つに集約

設定ソフト「FC コネクトマネージャー」で最大10件のプリセットが用途に応じて設定でき、効率的な操作が可能です。



- プリセット番号1~5(短押し・長押しの2種送信キーで設定)



- プリセット番号6~10(短押し・長押し・2度押しの3種送信キーで設定)



動作の流れ

フットコントローラーの信号をFC コネクトマネージャーがキーボード入力信号に変換。プリセットの設定に応じたUSB接続機器を操作できます。



※画像はイメージです。

フットコントローラー機能拡張モジュール

EOM FC Connect イオム アクア/イオム ナゴミ オプション

イオム FCコネク(工場オプション)

包装●一式

イオム FCコネク 追加キット(オプション)

包装●追加キット一式

仕様●

OS	Windows10 Pro/11 Pro(各OS 32Bit/64Bit 版)
CPU	Intel Core i3以上
メモリ	4GB以上 推奨
HDD	ハードディスク容量 20GB以上
ディスプレイ	解像度:1280×1024ピクセル 以上 推奨
PCインターフェース	USB 2.0/3.0
その他	.NET Framework 4.8以上

EOM シリーズ

EOM AQUA
イオム アクア
専用サイト

イオム ナゴミ
専用サイト

歯科用ユニット イオム アクア
管理医療機器 特定保守管理医療機器 231AKBZX00012000
歯科用ユニット イオム ナゴミ
管理医療機器 特定保守管理医療機器 304AKBZX00059000
歯科用口腔内カメラ MyRay カム C-U2
一般医療機器 13B1X00155000309

※掲載情報と価格は、2024年3月現在のものです。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
 ※ソフトウェア画面写真はハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
 ※Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。
 ※本パンフレットに掲載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎ **0120-416480**
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
 営業所
 ●北 海 道(011)729-2130 ●名 古 屋(052)757-5722
 ●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

