



● 直接法 テクニカルチャート

ジーシー ファイバーポスト


ユニフィルコア使用のケース [直接法] ※必ず使用説明書をよく読んで操作を行ってください。

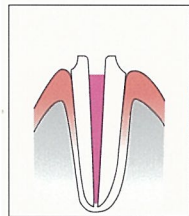


1. 根管充填

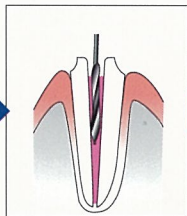


2. 不要な根管充填材除去

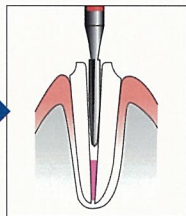


3. ポスト孔形成
▼ファイバーポストドリル

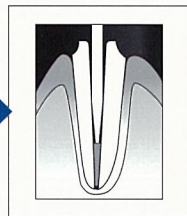


4. ポストの試適
サイズ決定

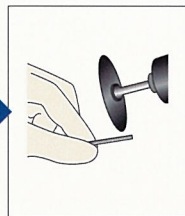


5. 長さの調整
▼防塵マスク・めがね
グローブ
▼ダイヤモンドディスク
▲試適後アルコール洗浄

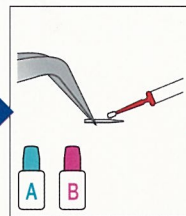


6. シラン処理
▼セラミックプライマー
※A液・B液採取→
5秒混和→塗布→
乾燥

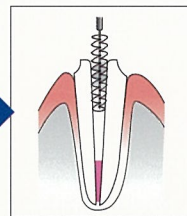


7. 水洗・乾燥
▲必要に応じてペーパーポイントで乾燥

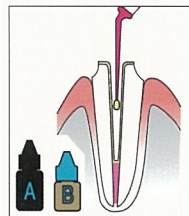


8. 歯面処理 (1)
▼ユニフィルコアセル
フェッチングボンド
※A液・B液採取→
5秒混和→塗布→
30秒放置

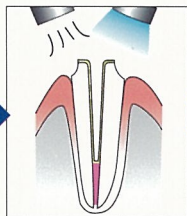


9. 歯面処理 (2)
▼コービー
(ハロゲンランプ)
※中圧エア→
10秒乾燥→
10秒光照射

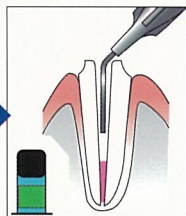


10. レジン填入
▼ユニフィルコア
※採取→10秒練和→
填入

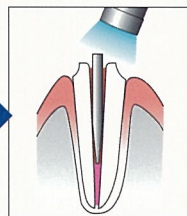


11. ポスト植立
▼コービー
(ハロゲンランプ)
※5~10秒光照射

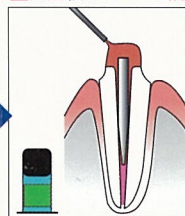

12. レジン築盛
▼ユニフィルコア
※採取→10秒練和→
築盛

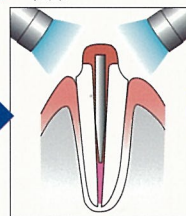

13. 光照射
▼コービー
(ハロゲンランプ)
※各面10秒光照射

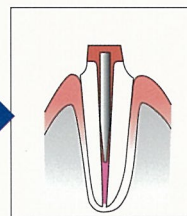

14. 支台歯形成
※口腔内保持5分後
支台歯形成