

フィットシール

仮封用常温重合型軟質レジン



スムーズな填入、一塊で撤去。



仮封用常温重合型軟質レジン

フィットシール

色調●1色 = アイボリー

包装●

粉末：50g 1 函 1 本、250g 1 函 1 本

液：30g 1 函 (15g×2 本)、250g 1 函

歯科用高分子系仮封材料 ジーシー フィットシール

管理医療機器 20800BZZ00213000

インレー窩洞にピッタリのレジン系仮封材 フィットシール

しっかり仮封&残さず外せる

- 窩壁密着性に優れているため、脱落の心配がなく仮封終了後は、一塊で簡単に取り外せます。
- 適度な軟性が持続するため咬合関係にも影響を与えません。

スムーズな填入操作

- 適度な流動性があるため、窩壁に馴染ませやすくなっています。
- 筆離れがよいので、填入操作がスムーズに行えます。
- 口腔内で速やかに硬化（約3分）するため、仮封処置が短時間で済みます。
- 余剰分の除去が容易です。

使用ステップ



窩洞形成後、水洗・乾燥を充分に行います。



採取したフィットシールを、窩洞に填入します。



填入後、咬合形態を整え、余剰分を除去します。



仮封後、1週間経過。



仮封終了後、エクスプローラー等を差し込み、前後左右に少し動かせば容易に取り外せます。

ご注意

- エンド処置後の仮封や1ヶ月以上に渡るような長期間の仮封などには使用しないでください。
- コーシノール系やレジン成分を含む材料（光重合型ガラスイオンマーセメントなど）の上に使用する場合は、綿球を介在またはワセリンを塗布してからフィットシールを填入してください。

関連製品



ディスポーザブル採取皿

包装●1 函:50 枚



ディスポーザブル採取皿 (No.2)

包装●1 函:50 枚

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年3月現在のものです。
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:13.7以上、Android:9.0以上です。