

フジルーティング® EX Plus

歯科接着用レジンセメント

保険適用

歯科用合着・接着材料Ⅱ
標準型

10点

タックキュア

[光照射3秒] 余剰セメントを一塊のまま除去

メタル補綴装置に最適



Since 1921
100 years of Quality in Dental



セメンテーションに時間を費やしていませんか？

練和 **10秒**しっかり
練り込むタックキュア
光照射 **3秒**各面
光照射
3秒

余剰セメント除去

ポロッ

口腔内装着後 **2分45秒** で最終硬化

患者さんの回転率UP、ユニット清掃時間の確保

診療スタイルに合わせて
余剰セメントの除去方法を選択できます。

臨床動画で確認



タックキュア光照射

各面3秒の光照射で
余剰セメントを **ポロッ** と除去

化学重合




装着後1分～1分30秒で
余剰セメントを **ポロッ** と除去余剰セメントを
先に除去して空いた時間
を活用!!余剰セメント
硬化までの空いた時間
を活用!!

高い接着力と曲げ強度

引張接着強度 (牛歯、歯面未処理、1日後)

三点曲げ強度

被膜厚さ

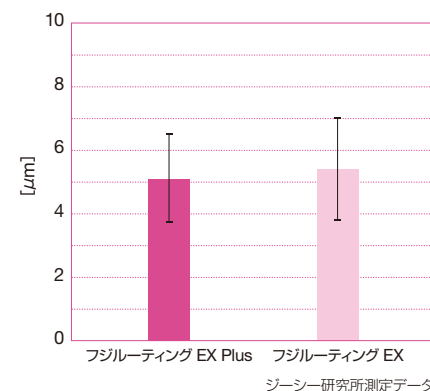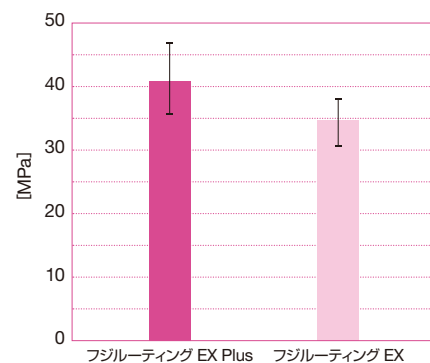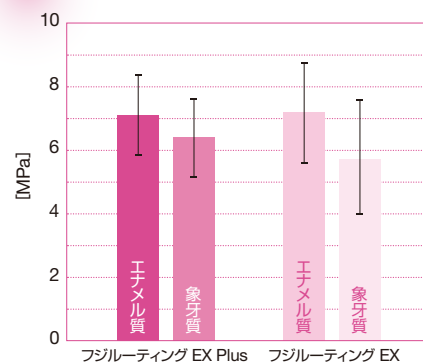

ジーシー研究所測定データ

スムーズなセメンテーションで診療を効率良くスピーディに




余剰セメント除去までのチェアタイムを大幅に短縮

フジルーティング EX Plusは、
口腔内装着後 **2分45秒** で最終硬化空いた時間を
有効活用!!

フジルーティング EX Plus

ジーセム ONE neo
ジーセム ONE EM

セメント塗布 ▶ 口腔内装着

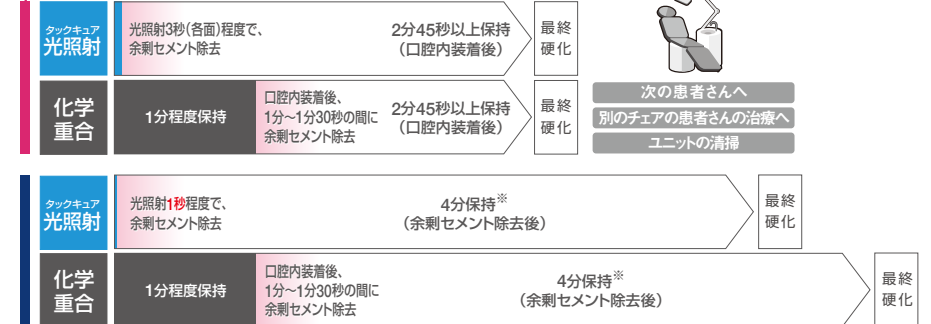

セメント塗布 ▶ 口腔内装着


※光透過性の高い補綴装置の場合は、光重合での最終硬化が可能です。

タックキュア (光照射が有効な症例)

口腔内環境に応じて対応

症例1 唾液の影響を受けやすい下顎臼歯部
口を開け続けることが困難な小児・高齢者の方

補綴装置の形態に応じて対応

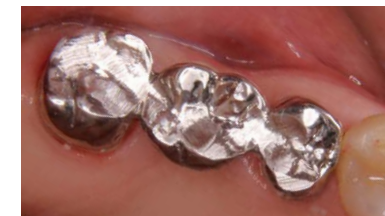症例2 ブリッジ
ボンテックの下や鼓形空隙の余剰セメントの除去がしやすいです。症例3 連続した補綴装置
余剰セメントの半硬化タイミングをコントロールし除去をしやすくします。

ジルコニアの装着にも!



良好な余剰セメント除去性!



シャープな初期硬化!

●対ジルコニア接着強度(1日後)

引張接着強度 **22MPa**

ジーシー研究所測定データ



歯科接着用レジンセメント ジーシー フジルーティング® EX Plus

色調●1色=ライトイエロー

包装●1函：カートリッジ13.3g(7.2mL)2本、練和紙(No.22)1冊

歯科接着用レジンセメント

ジーシー フジルーティング EX Plus

管理医療機器 305AKBZX00044000

歯科用セメント適応症例

		メタル		ジルコニア		ハイブリッドレジン			セラミック(ニケイ酸リチウム系・長石系)			CAD/CAMレジンプロック		PEEK※1
		インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	ベニア	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	ベニア	インレー/ アンレー	クラウン	クラウン
歯科接着用レジンセメント ジーシー フジルーティング EX Plus		○	○	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE neo ジーシー ジーセム ONE EM		○	○	○	○	○	○	○※2	○	○	○	○	○	○

歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE 管理医療機器 228AKBZX00104000

歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ONE EM 管理医療機器 301AKBZX00021000

※1 セラスマートコートクリアをプライマーとして使用します。詳しくは電子添文をご確認ください。

※2 単冠に限る。

関連製品



ジーシー フジルーティング コンディショナー

包装●1函：7g(6.5mL)

歯面処理材
ジーシー フジルーティング コンディショナー
管理医療機器 223AKBZX00076000



ジーシー CDディスペンサーⅢ

包装●1函：1個


歯科用充填・修復材補助器具
ジーシー CDディスペンサーⅢ
一般医療機器 09B2X00010G00063
製造販売元 株式会社シオダ



ジーシー CDディスペンサーⅢ エコストッパー

包装●1函：1個

歯科用充填・修復材補助器具
ジーシー CDディスペンサーⅢ
一般医療機器 09B2X00010G00063
製造販売元 株式会社シオダ

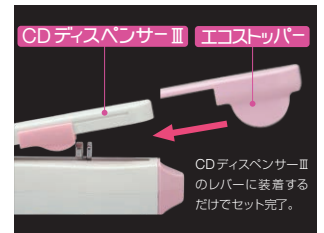

エコストッパー使用で
1クリック(インレー)
2クリック(クラウン)



プラスチックヘラ No.1

色調●2色=青、白

包装●1本(No.1)



プラスチックヘラ No.4

色調●1色=ピンク

包装●1本(No.4)



※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2026年9月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store からダウンロード
Google Play でお求めください
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

