

前処理ナシで高い接着力! 接着性ルーティングセメントがカプセルに。



カプセルだから

簡単!

手練和が不要

速い!

直接填入できる

確実!

練和や填入時の
気泡混入が少ない

さらに接着処置ごとにアルミ個別包装を開封するため
常に新鮮で衛生的です。



- メタルはもちろんのこと、ハイブリッドタイプの硬質レジンやセラミックスによる審美的な補綴修復物にも前処理不要で幅広くご使用いただけます。
- 接着性モノマー4-METとリン酸エステルモノマーを配合することにより安定した高い接着力を発揮します。
- 余剰セメント除去のタイミングを光照射でコントロール可能!

写真のようにカプセルのプランジャーを下にして押し込むと、カプセル内で液が粉末中に浸出します。

次にカプセルをカプセルミキサーGM-IIにセットし、セメントモードで10秒間練和します。

カプセルをミキサーから取り出し、カプセルアプライヤーIIにセットします。

補綴物に填入



ジーセム カプセル

歯科接着用レジンセメント

色調 ● 3色=A2、A03、トランスルーセント

包装 ● カプセル(粉末0.36g/液0.14g(0.13mL)) 50個

ジーシー ジーセムカプセル

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 221ABZX00098000

