

IMPLANTOLOGY
ORAL SURGERY
motor systems by Bien-Air

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

PURE SIMPLICITY

シンプルさを突き詰めると、この形になりました

SWISS  MADE



ジーシー インプラントモーター BA
シロプロ 3rdジェネレーション

IMPLANTOLOGY
motor system

特長① カンタン操作

ダイヤルを回して選択



押して決定



特長② らくらくメンテナンス

ダイヤルは取外し可能で、
滅菌もOK



ガラスパネルで
お手入れらくらく



骨質やインプラントシステムに合わせて最大5ステップまでカスタマイズ可能



初期設定

Step ^{※1}	回転数 ^{※2}	トルク値 ^{※2}	ブースト値 ^{※3}	正逆回転	注水量 ^{※4}
①	2,000 rpm	25.0 N·cm (画面上に表示されない)		正	●●● (90ml)
②	600 rpm	55.0 N·cm (画面上に表示されない)		正	●●● (90ml)
③	20 rpm	45.0 N·cm	10.0 N·cm	正	off
④	20 rpm	55.0 N·cm		逆	off
⑤	20 rpm	45.0 N·cm	10.0 N·cm	正	off

※1：ステップ①②は回転数、③④⑤ではトルク値の変更が可能。

※2：CA20：1使用時の設定可能範囲は以下のとおり。(トルク値は回転数によって使用できる値が制限されます)

【回転数】5～2,000 rpm 【トルク値】10.0～70.0 N·cm

※3：正回転から逆回転に切り替えたとき、設定したトルク値を基準に自動的に「5N·cm」または「10N·cm」大きくする機能。

※4：6段階(0～150ml)の範囲で設定が可能。

大型カラーディスプレイ

回転数・トルク値・回転方向・注水量を簡潔に見やすく表示します。

キャリブレーション不要

高精度の電子制御システムにより煩雑なキャリブレーションは不要です。

インプラント用マイクロモーター

ジーシー インプラントモーター BA



包装

コントロールユニット、ダイヤルノブ、マイクロモーター、モーター用ケーブル、ハンドピース、ブラケット、イリゲーションシステム(10個)、フットペダル、フットペダルガード、イリゲーションチューブ(10本)、イリゲーションスタンド、チューブ取付けクリップ、電源ケーブル、プロテクションフィルム(2枚)

仕様

コントロールユニット

寸法(幅×奥行×高さ)/質量	242×244×102mm/2.8kg
ステップ	3ステップ(最大5ステップ)
注水量	0～150ml/min(6段階)

マイクロモーター/ケーブル

寸法/質量	φ23.2×83.8mm/110g
回転速度域	100～40,000rpm
ライト(ハンドピースとの組合せ)	12Klux以上

ハンドピース(CA20:1L KMマイクロシリーズ)

ギア比	20:1
回転速度域	5～2,000rpm(モーター使用時)
寸法/質量	85mm/79g
最大トルク	70N·cm
ヘッドの高さ	13.5mm

関連製品

イリゲーションチューブ(10本入)
メンテナンス用スプレートリオパック
アクアケア注水チューブ洗浄スプレー500ml(1本)
スプレーネット洗浄スプレー500ml(1本)
ルブリフルイト潤滑スプレー500ml(1本)

シロプロ 3rd Generation
電動式骨手術器械
管理医療機器(クラスⅡ)
231AKBZX00017000

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

※掲載情報は2023年9月現在のものです。

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **ビエン・エア・アジア株式会社**

東京都文京区本郷3-2-14

東京都豊島区池袋 2-40-12 西池袋第一生命ビルディング10F

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286