


ギガウスを上手にお使いいただくために ～MRI 診断時の注意事項について～

磁力を使った維持装置である、磁性アタッチメントのギガウスシリーズは、通常義歯に磁石構造体、口腔内に磁気に反応するキーパーを使うことから、MRI 診断の時に影響があります。



<義歯への影響>

磁石構造体を装着したままMRI診断を受けた場合、MRI診断機から発生する強い磁場の影響を受けて、見た目は変わりませんが吸引力が低下しますので、磁石構造体を埋め込んだ義歯を取り外して受診するように、患者への十分な説明を行ってください。

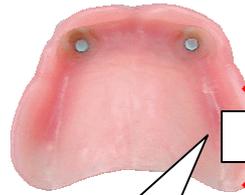

義歯は部屋の中に入れてください。



<口腔内のキーパーのMRI 画像への影響>

キーパー部近傍(5cm未満)のMRI診断は困難になります。このキーパー部近傍の診断が必要な場合、MRI診断を行う医師よりキーパーの撤去を要求されることがありますので、患者への十分な説明を行ってください。

(頭部以外のMRI診断の場合の影響はありませんが、その場合でも義歯を外して診断するように説明してください。)



キーパーなし

キーパーあり

※製品に付属の磁性アタッチメントカードをご利用ください。

●患者さんへ 磁性アタッチメントカード

MRI検査の場合は義歯を外して検査を受けてください。装着したまま検査を受けると吸引力の低下およびMRI撮影の画像に歪みが生じます。検査の際には担当医にこのカードを示してください。

なお、ご使用している義歯の吸引力等に不具合がございましたら、裏面記載の歯科医院にご連絡ください。海外でMRI撮影をする場合は、裏面の英文を提示してください。

●担当医殿

このカードの持参者 殿は下記の歯牙に磁性材料が適用されています。MRI撮影後、診断に支障のある場合には、必ず当歯科医院へご連絡ください。(MRI画像への影響は、磁性材料から5cm以上離れた部位の読影が不可能であったとの報告はありません。)

適用部位：
(○印) 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8

●歯科医院殿、歯科技工所殿
本カードに必要事項を記入の上、患者さんへお渡しください。

MAGNETIC ATTACHMENT CARD

To whom it may concern :

This person named Mr./Ms. wears a specific denture installed by magnetic attachment. It may cause disturbances during medical Magnetic Resonance Imaging examinations.

Dentist:

年 月 日

歯科医師名

歯科医院名

歯科医院住所

TEL FAX