

ヒステクト™の使い方

1歯ずつ塗り込む場合


綿棒が
おすすめ



① 唾液を拭き取る

ヒステクト™を塗る歯の唾液を可能な限り拭き取る。

塗る歯を
覆うくらい

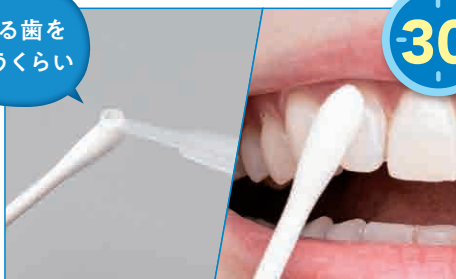

② 歯に塗り込む

綿棒や歯ブラシ等にヒステクト™を適量のせ、歯に塗り込む。



③ お口の中を洗い流す

水ですすぐ。

使用後は
常温保管

マウストレーを使用する場合

米粒
1～2つ分



① ヒステクト™の注入

1歯あたり米粒1～2つ分を目安に、マウストレーにヒステクト™を注入する。

※
10分



② マウストレーの装着

ヒステクト™がマウストレーからはみ出した場合は拭き取る。

※装着時間：標準10分・最長60分



③ お口の中とマウストレーを洗い流す

お口の中に溜まったヒステクト™と唾液を吐きだし、水ですすぐ。マウストレーは、やさしいブラシで清掃する。

使用後は
常温保管