

ジーシーインレーワックス 〈ソフト〉〈ミディアム〉〈ハード〉

歯科インレー 鑄造用ワックス



ワックスアップ。
硬さとカラーのベストラインナップ。



3種類の硬さにそれぞれ3色。 理想のワックスを選べます。

ジーシーインレーワックスが、使用方法・症例・部位・季節などに応じて最適のワックスが選べる新しいラインナップを確立しました。硬さは〈ソフト〉〈ミディアム〉〈ハード〉の3種類、カラーはそれぞれに3色の合計9種類。同じ色調で異なる硬さのワックスを混ぜることによって中間の硬さのワックスを作ることでもあります。さらに操作性や物性にも優れ、快適で満足のいくワックスアップを実現します。



包装●
1缶=40g
1函=棒状60本(ソフト、ミディアムのみ)
色調

	色 調			
	グレー	レッド	バイオレット	グリーン
ソフト	●	●	●	—
ミディアム	●	●	—	●
ハード	●	●	—	●

歯科用キャストワックス 一般医療機器
ジーシー インレー ワックス ソフト 27B2X00008000028
ジーシー インレー ワックス ミディアム 27B2X00008000027
ジーシー インレー ワックス ハード 27B2X00008000026

ソフト

可塑性に優れ、軟化状態が持続する、ため盛り上げ法だけでなく圧接法にも使いやすい〈ソフト〉。適度な付着性によって模型材と密着するため、凝固収縮によるマージン部の浮き上がりも防げます。

ミディアム

〈ソフト〉と〈ハード〉の中間の硬さを持ち、最も幅広いニーズに適応する〈ミディアム〉。凝固収縮による変形が極めて少なく、適合性の良い高精度の修復物を作製できます

ハード

模型に盛り上げてからカーピングに移れるまでの時間が速く、作業効率に優れる〈ハード〉。ベタつきが少なく削りカスがインストルメントや作業模型に付着しません。

■使用方法・物理的性質

	使用方法		凝固点 (℃)	加圧短縮率 (%)			熱膨張率 (%) (25-37℃)
	盛り上げ法	圧接法		30℃	40℃	45℃	
ソフト	●	●	57.0	0.5	75.4	87.1	0.45
ミディアム	●	●	57.2	0.1	23.7	82.0	0.38
ハード	●	●	60.6	0.1	1.1	56.9	0.40



裂溝のディテールが見やすいグレー色

〈ソフト〉〈ミディアム〉〈ハード〉に共通する優れた操作性

- グレー色は特に咬合面の裂溝のディテールなどが見やすくなっています。
- 適度な流動性があり、盛り上げが容易に行えます。
- カーピングしやすく、薄く形成してもチップングしにくい柔軟性も備えています。
- 模型材に着色しにくくなっています。
- 缶は浅くコンパクトで使いやすい設計です。

※グレー色は遮光性の成分が加えられていますので、同じ硬さの製品でも他の色調と操作感が異なります。

※同じ名称の色調でも違う硬さの製品では多少色調が異なります。

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2019年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元 **大成歯科工業株式会社**
大阪府交野市星田北4-38-7

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支 店
●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東 北(022)207-3370 ●九 州(092)441-1286