

ラボマグ®

歯科技工用マイクロ스코ープ

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

揺れにくい、ブレにくい、疲れにくい

確かな光学技術を集約した、歯科技工のためのアーム式マイクロ스코ープ



歯科技工用マイクロ스코ープ

ラボマグ®

LABOMAG

- 石こう模型のトリミング ■ ワックスアップ作業
- 補綴物の調整、研磨 など精密な技工作業をサポート!!

歯科技工用マイクロ스코ープ

ラボマグ®

包装●一式=鏡体、対物レンズ(ターレット変倍式 1×、2×)、接眼レンズ 10× (2個)、焦点装置、クランプ
固定式クレーンスタンド、LEDリング照明装置、付属品(防塵ガラス付LEDアダプタ1個、目当てゴム
2個、ビニールカバー1枚、ヘッドサポート1個、調整用スパナ1本、シャコ万力2個)


■仕様

対物レンズ	ターレット変倍式 1×、2×			
接眼レンズ	10×(視野径Φ23mm)標準装備			
総合倍率	10×、20×			
鏡体	双眼部45°傾斜鏡筒 瞳孔間距離調整(54mm〜75mm) 左眼視度調整(±5度)			
スタンド	クランプ固定式クレーンスタンド シャコ万力(最大開口幅:77mm、奥行:46mm)			
外形寸法 照明装置を除く	本体 (奥行)	最大850mm 最小550mm	×(高さ)525mm[固定面より] ×(幅)145mm	
重量 照明装置を除く	11.3kg			
照明装置	LED発光部		LED電源部	
	鏡筒取付部	Φ60mm	入力電源	AC100V〜220V 50/60Hz
	推奨W.D.	70〜150mm	消費電力	30VA
	重量	155g	重量	860g
	外観寸法	外Φ90mm/内Φ60mm	外観寸法	奥行160mm×高さ80mm×幅60mm コード及び突起部含まず

■別売品

- 接眼レンズ 5× 包装●接眼レンズ 5× (2個入)
- 接眼レンズ 10× 包装●接眼レンズ 10× (2個入)
- 接眼レンズ 15× 包装●接眼レンズ 15× (2個入)


■スタンド設置寸法

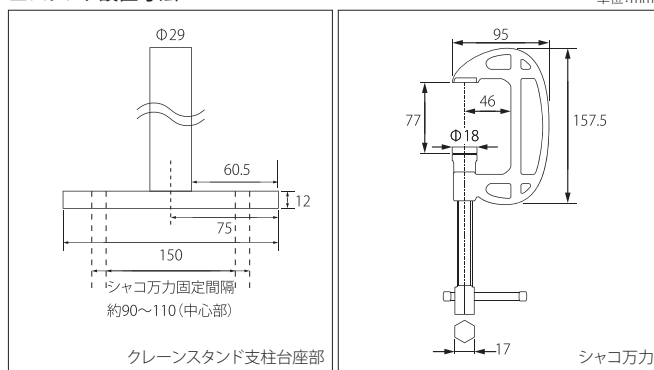

シンプルな調整で、ポジショニングが自由自在。

鏡体を作業しやすい角度に調整できる

最適な位置で作業を行えるように鏡体を垂直0°から26°まで傾けることができます。

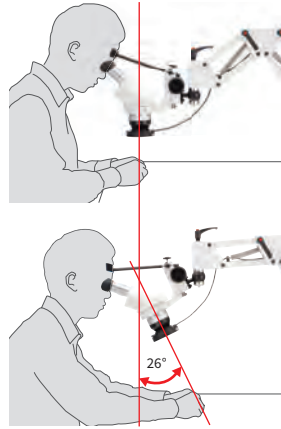

焦点合わせの微調整が簡単

「焦点合わせハンドル」を回すだけの簡単な操作で、鏡体位置を上下50mmの範囲で微調整することができます。



日々の技工作業をより精密に、快適に。

作業時／確認時に簡単に使い分けができる2種類の倍率

レンズには、収差の少ない日本製レンズを採用した10×の接眼レンズと、1×／2×の切り替えができる対物レンズを標準装備。倍率の変更は対物レンズを左右に回すだけで、作業時は10倍（視野径φ23mm）、細部確認時には20倍（視野径φ11.5mm）といった使い分けもすばやく行えます。

※別売にて5×、15×の接眼レンズもご用意しています。

作業時に最適！

確認時に最適！



×1

×10

×20

※拡大画像はイメージです




明るいLED照明で快適な作業

明るく影のつきにくいLEDリング照明を標準装備し効率的に作業が行えます。省電力で発熱も少なく、作業が快適です。ライトの明るさは自由に調整することができます。

※LEDリング照明装置は、ラボマギー式に含まれています。

ライトなし 10×

ライトあり 10×

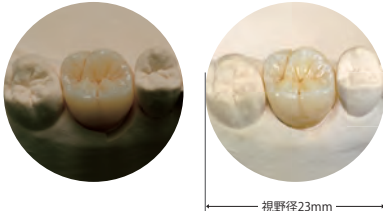

視野径23mm



LED用電源

ポジションの再現性を高めるヘッドサポート

ヘッドサポートにより、ポイントの交換など一度外したポジションの再現性を高め、長時間にわたる作業で繰り返し使用する時でもストレスなく作業が行えます。また、眼鏡を着用している方は、眼鏡をかけた状態でポジションを設定すると接眼レンズに眼鏡が当たることなく作業が行えます。



ヘッドサポート

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連泊町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722

●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョン(おiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。)

