



リチウムシリケートガラスセラミックス用切削・研磨キット

## マイジנגーラスターキット LiSiツイスト

ハイブリッドレジン用切削・研磨キット

## マイジングーラスターキット HRツイスト

強度の高いリチウムシリケートガラスセラミックスの切削・研磨を簡単に効率的に行えます。それぞれツイストタイプのポリッシャーをセットし、ラボ用には、耐久性にすぐれたシンタータイプのダイヤモンドバーをセットしました。

### LiSiツイスト チェアサイド用(7本入)

包装●1函=

マイジングーダイヤモンドバーDM805F(FG)014、DM862F(FG)010、DM830F(FG)021、マイジングーポリッシャーFPDP002(RA/CA)040、FP9771M(RA/CA)140、FPDP005(RA/CA)040、FP9771C(RA/CA)140



注文コード 89395

切 削 ファイン

仕上げ  
ツヤ出し



単品包装

	マイジングーダイヤモンドバー			マイジングーポリッシャー			
用 途	切削(ファイン)			仕上げ		ツヤ出し	
形態番号	DM805F	DM862F	DM830F	FPDP002	FP9771M	FPDP005	FP9771C
シャンク種類	FG			RA/CA		RA/CA	
ISO サイズ	014	010	021	040	140	040	140
最大許容回転数/分	300,000		280,000	20,000		20,000	
包 装	1パック=5本			1パック=2本			
注文コード	81992	81993	81994	82183	82191	82185	82192

### LiSiツイスト ラボ用(6本入)

包装●1函=

マイジングーダイヤモンドバーDMS805(HP)018、マイジングーアブレーションポイントAM9735G(HP)050、マイジングーポリッシャーFPDP003(HP)110、FP9771M(HP)170、FPDP006(HP)110、FP9771C(HP)170



注文コード 89396

切 削 ミディアム

粗切削  
仕上げ  
ツヤ出し



単品包装

用 途	マイジングーダイヤモンドバー	マイジングーアブレーションポイント	マイジングーポリッシャー			
	切削(ミディアム)	粗切削	仕上げ		ツヤ出し	
形態番号	DMS805	AM9735G	FPDP003	FP9771M	FPDP006	FP9771C
シャンク種類	HP	HP	HP		HP	
ISO サイズ	018	050	110	170	110	170
最大許容回転数/分	50,000	25,000	20,000	15,000	20,000	15,000
包 装	1パック=1本	1パック=2本	1パック=2本			
注文コード	81995	89399	82188	82193	82190	82194

セラスマート、グラディアなどハイブリッドレジンの切削・研磨を簡単に効率的に行えます。それぞれツイストタイプのポリッシャーをセットし、ラボ用には、耐久性にすぐれたシンタータイプのダイヤモンドバーをセットしました。

### HRツイスト チェアサイド用(7本入)

包装●1函=

マイジングーダイヤモンドバーDM805F(FG)014、DM862F(FG)010、DM830F(FG)021、マイジングーポリッシャーFP9762M(RA/CA)040、FP9769M(RA/CA)100、FP9762F(RA/CA)040、FP9769F(RA/CA)100



注文コード 89397

切 削 ファイン

仕上げ  
ツヤ出し



単品包装

	マイジングーダイヤモンドバー			マイジングーポリッシャー			
用 途	切削(ファイン)			仕上げ		ツヤ出し	
形態番号	DM805F	DM862F	DM830F	FP9762M	FP9769M	FP9762F	FP9769F
シャンク種類	FG			RA/CA		RA/CA	
ISO サイズ	014	010	021	040	100	040	100
最大許容回転数/分	300,000		280,000	20,000		20,000	
包 装	1パック=5本			1パック=2本			
注文コード	81992	81993	81994	82195	82197	82196	82198

### HRツイスト ラボ用(5本入)

包装●1函=

マイジングーダイヤモンドバーDMS805(HP)018、マイジングーアブレーションポイントAM9735G(HP)050、マイジングーポリッシャーFP9769M(HP)170、FP9769F(HP)170、FP9787(HP)145



注文コード 89398

切 削 ミディアム

粗切削  
仕上げ  
ツヤ出し



単品包装

用 途	マイジングーダイヤモンドバー	マイジングーアブレーションポイント	マイジングーポリッシャー			
	切削(ミディアム)	粗切削	仕上げ		ツヤ出し	
形態番号	DMS805	AM9735G	FP9769M	FP9769F	FP9787	
シャンク種類	HP	HP	HP		HP	
ISO サイズ	018	050	170	170	145	
最大許容回転数/分	50,000	25,000	15,000	15,000	20,000	
包 装	1パック=1本	1パック=2本	1パック=2本		1パック=1本	
注文コード	81995	89399	82199	82200	82201	

# マイジンガーラスターキット

## LiSiツイスト / HRツイスト

■LiSi(リチウムシリケートガラスセラミックス)の切削・研磨用

■ハイブリッドレジン(セラスマート、グラディアなど)の切削・研磨用


マイジンガー ラスターキットにLiSi用、HR (ハイブリッドレジン)用の切削・研磨キットは、  
特殊なツイストタイプのポリッシャーが特長となっています。

LiSi用はジルコニア、HR用はCR (コンポジットレジン) の研磨にも適しています。

仕上げ用とツヤ出し用を用意、2ステップで効率の良い研磨が可能。

### 細部の研磨が可能なツイストタイプ

先端がブラシ形状で弾力があり密着するため、ソフトタッチ  
で研磨困難な咬合面裂溝、隣接部、前歯舌側面など細部の  
研磨ができます。

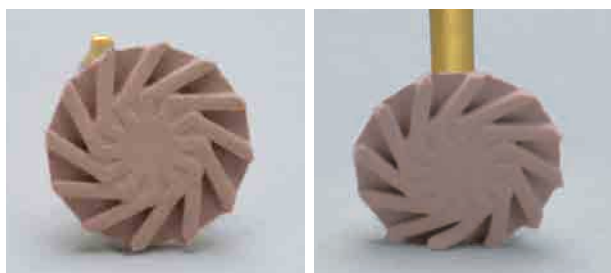

#### ●使用例

##### 仕上げ研磨

【FP9769M(RA/CA)使用】



咬合面

舌側面

##### ツヤ出し研磨

【FP9769F(RA/CA)使用】




隣接部

隅角部

### 効率良くスピーディーな研磨が可能

2ステップにより効率良くスピーディーな研磨が行えます。

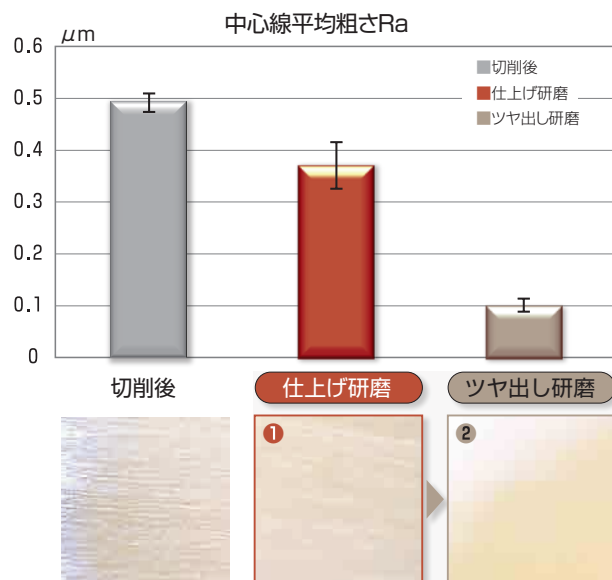

「セラスマート」を用い、以下の研磨ステップで行っています。  
DM862F(FG)010で切削後、

- ①FP9769M(RA/CA)100で → **仕上げ研磨**
- ②FP9769F(RA/CA)100で → **ツヤ出し研磨**

ツヤ出し研磨後の咬合面



歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット 一般医療機器 13B1X00155000279  
歯科用ダイヤモンドバー マイジンガーダイヤモンドバー 一般医療機器 13B1X00155000273  
歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーポリッシャー 一般医療機器 13B1X00155000277  
歯科技工用アプレシブ研削器具 マイジンガーアプレシブポイント 一般医療機器 13B1X00155000278

※写真は原寸ではありません。※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年6月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store  
Google Play  
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

