



# ジーシーマルチクリーナー

ポイントやバーはもちろん、  
エンド器材やインスツルメントにも。  
歯質溶解性にすぐれた清掃液です。



これまでにない  
すぐれた特長が  
より簡単・確実な清掃を  
可能にしました。



## ジーシーマルチクリーナー MULTICLEANER


器具に付着した歯質や石こうを、すぐれた溶解作用で取り除きます。浸漬しておくだけで目づまりが解消。錆の発生する心配もありません。

用途 ■ 切削器具・研磨器具・エンド器材・インスツルメント・  
その他小器具類の清掃

包装 ■ 1 函 = 液 500g1 本


### ■歯質溶解性に優れ、高い清掃効果を発揮します。

器具に付着した歯質に対する優れた溶解作用により、高い清掃効果を発揮。浸漬しておくだけで目づまりが解消されます

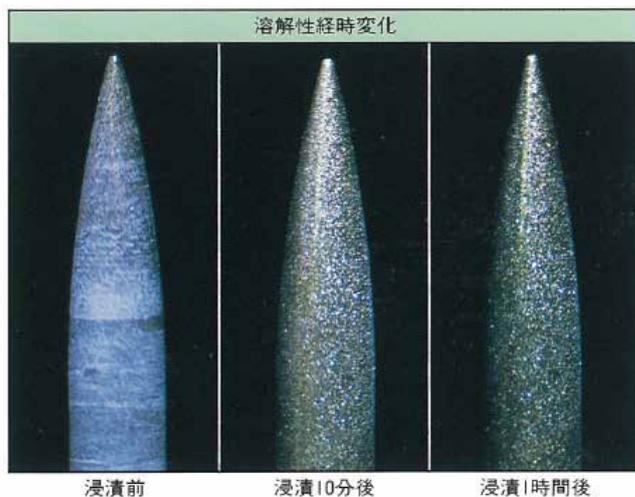

### ■錆の発生がありません。

従来の清掃液にありがちだった被清掃物の錆の発生が全くありません。このため、浸漬清掃の場合も錆の心配がなく、十分に行うことができます。

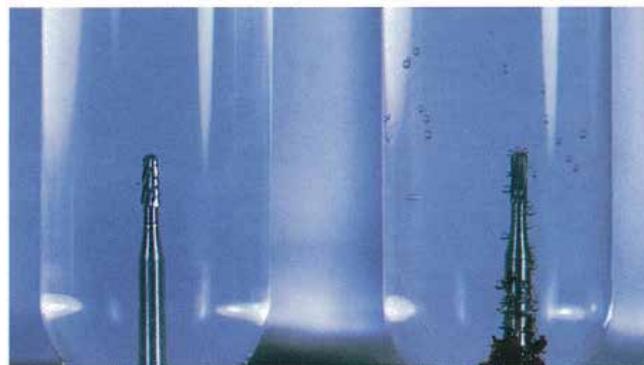

### ■刺激を抑えてあり、使用感も快適です。

清掃液特有の臭いがほとんどなく、刺激を与えませんので快適に使用できます。

#### ▶ 清掃所要時間

- 浸漬放置の場合
  - ダイヤモンドバー = 1時間以上
  - その他治療器具 = 15分以上
- 超音波洗浄の場合 — 5分

ご使用に際しては、必ず製品の添付  
文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ  
東京都板橋区蓮沼町76-1 愛知県春日井市鳥居松町2-285

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333

営業所

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286