

高精度な補綴修復物の製作を支える超硬石こう



# ジーシー ニューフジロック シリーズ

模型用超硬石こう

スタンダードタイプ、急速硬化タイプ、インプラント&CAD/CAM用の3種類から用途に合わせてベストな選択が行なえます。

高い強度と低膨張率など  
超硬石こうのスタンダードタイプ

線硬化膨張率 0.08%

## ニューフジロック

色調●ゴールデンブラウン、アラバスタアイボリー

包装●

シンプルパック1函:3kg  
1缶:18kg(ゴールデンブラウンのみ)

ジーシー ニューフジロック  
一般医療機器 13B1X0015500008



わずか15分\*で模型が取り出せる  
急速硬化タイプ

\*シリコン印象材の場合

線硬化膨張率 0.08%

## ニューフジロック ファストセット

色調●ゴールデンブラウン

包装●

シンプルパック1函:3kg

ジーシー ニューフジロック ファストセット  
一般医療機器 13B1X0015500009



長く愛用されている「ゴールデンブラウン」色

歯牙の色調に近いため、セラミック  
ワークのイメージをより正確に把握  
できる「アラバスタアイボリー」色

インプラントやCAD/CAMなど、より精度を求める症例に!

線硬化膨張率 0.06%

## ニューフジロック IMP

2時間後の硬化膨張率は0.06%と低く、残留膨張も極限まで抑えていますので、インプラントやCAD/CAMのロング  
スパンの症例など精度を要求される症例に適しています。

色調●ゴールデンブラウン、アラバスタアイボリー

包装●

シンプルパック1函:3kg

ジーシー ニューフジロックIMP  
一般医療機器 13B1X00155000176



ニューカラー、ホワイト 新発売! 線硬化膨張率 0.08%

## ニューフジロック ホワイト

NEW

色調●ポーラーホワイト

包装●シンプルパック1函:3kg

ジーシー ニューフジロック ホワイト  
一般医療機器 13B1X00155000219



## ニューフジロック ホワイト ファストセット

色調●ポーラーホワイト

包装●シンプルパック1函:3kg

ジーシー ニューフジロック ホワイト ファストセット  
一般医療機器 13B1X00155000220

NEW



# 超硬石こう ニューフジロックシリーズの特長

## ニューフジロックならではの高い強度


低混水比 (W/P=20/100) にも関わらず、粉末と水の馴染みが良く、クリーミーな練和感で快適に作業が行なえます。また、50MPaを超える高い強度と低膨張率の超硬石こうです。

	混水比 (水/粉)	硬化時間 (分)	線硬化膨張 2時間後 (%)	圧縮強さ 1時間後 (MPa)
ニューフジロック ニューフジロック ファストセット	0.20	11 5	0.08	58
ニューフジロック ホワイト ニューフジロック ホワイト ファストセット	0.20	11 5	0.08	56
ニューフジロック IMP	0.20	11	0.06	54

試験方法: JIS T 6605「歯科石こう」タイプ3

## 適度なチキソロピー性の付与で バランスのとれた操作感。


振動を加えれば印象のすみずみまで行き渡る流動性と付形作業時のタレにくさを兼ね備えた適度なチキソロピー性を持っています。

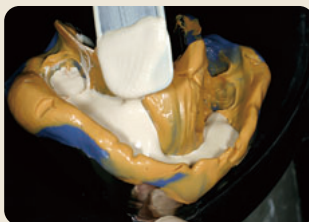

## 滑沢な模型面

適切な粒度調整によって、各印象材に対して極めて滑沢な模型面が得られます。特にシリコーン印象材との相性が良く、より精密な仕上がりの模型製作が行えます。


各印象材に対する面性状 (RA)

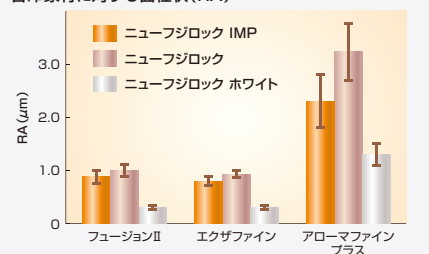

## ファストセットもラインナップ

「ニューフジロック」のすぐれた特性はそのままに硬化時間を短縮。操作余裕時間は約4分30秒を確保しながら、練和開始後わずか15分でシリコーン印象材からの撤去が可能です。

操作余裕時間と印象材撤去可能時間の比較

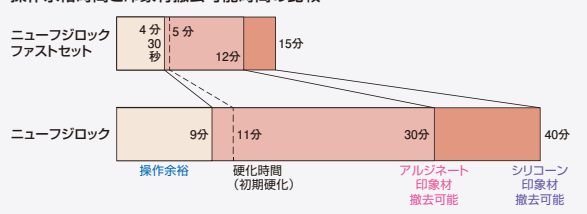

## 関連製品

## ニューフジロックとの調和を考えた ジーシー キュービックワックス インレーワックス



色調 ●アラバスタアイボリー、ゴールデンブラウン、グレー  
 サイズ ●30mm (幅) × 30mm (奥行) × 50mm (高さ)  
 凝固点 ●57.1℃  
 包装 ●1 函: 40g

一般医療機器 27B2X00008000031



ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
 ※掲載のジーシー研究所測定参考データは、2011年7月現在のものです。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシー  
 東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)  
 お客様窓口 ☎ 0120-416480  
 受付時間 9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
 ●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333  
 営業所  
 ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722  
 ●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286