

NEX エンドソニック

エンド用コードレス超音波洗浄器




Since 1921
100 years of Quality in Dental

やさしく、つよく
音のチカラが
洗浄力

GC's Endodontic System
nex[®]
NEW EXPECTATION

4万Hzの超音波で 根管内をパワフル洗浄

■ NEX エンドソニックによる
超音波洗浄の模式図

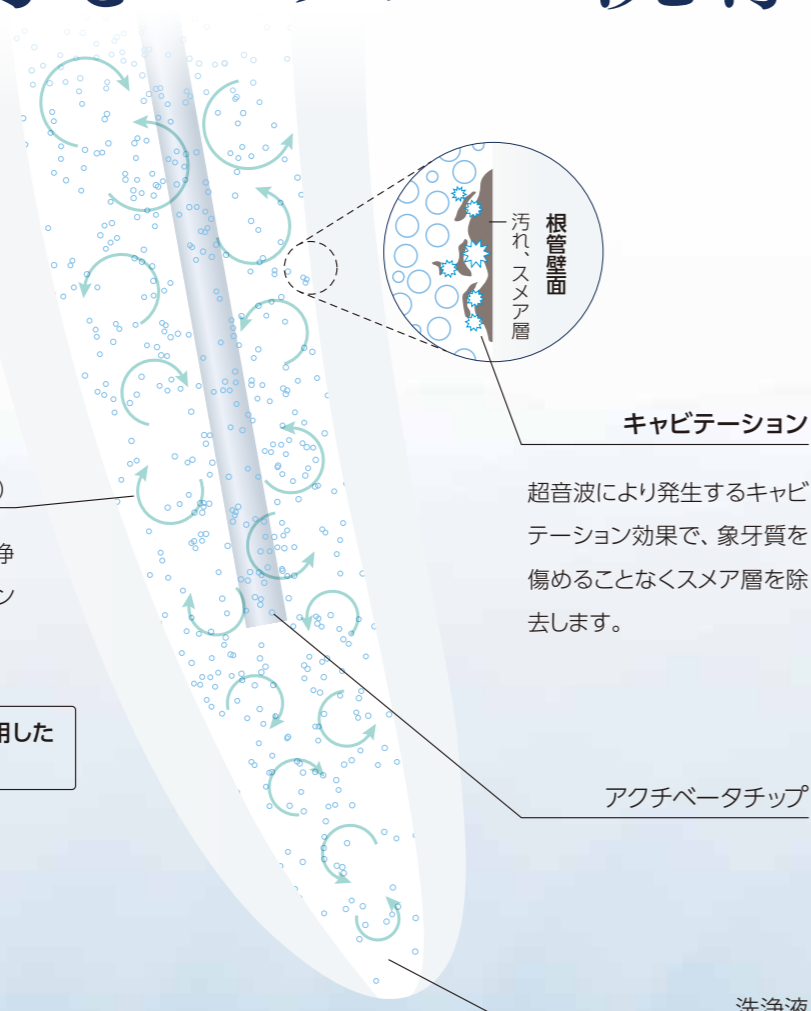


アコースティックストリーミング (音響流)

洗浄液中に超音波を放射することで、洗浄液が根管内で流れを作り、キャビテーションをすみずみまで伝搬させます。



NEX エンドソニックを使用した
実験動画はこちらから

■ 根管洗浄後の象牙質
SEM像 (×1000)

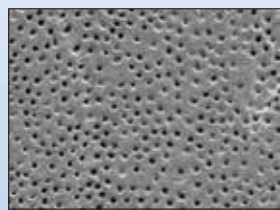

洗浄専用器なので 用途毎にチップや モードの変更不要

コードレスで **軽量** なので
取り回しラク&快適操作




軽量
76g

76g の軽量ボディ
タービンより軽い

■ アクチベータチップの曲げ箇所

目的の角度に合わせ付属レンチの向きを変えて、アクチベータチップの角度を調整。

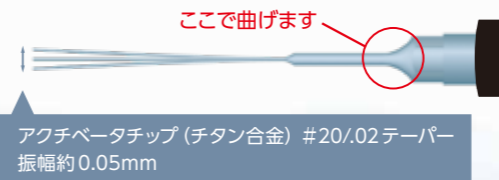


アクチベータチップ (チタン合金) #20/.02 テーパー
振幅約0.05mm

60°、70°に曲げる場合 レンチを **下向き** に装着して、照明用LEDの方向へ曲げる




90°に曲げる場合 レンチを **上向き** に装着して、照明用LEDの方向へ曲げる

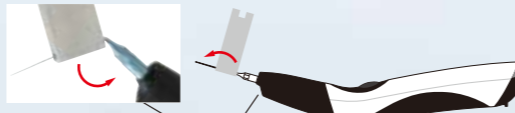

■ 部位に合わせた曲げ角度の目安



部位毎の最適な曲げ角度を選択するほか、角度範囲内であれば自由な角度設定も可能です。

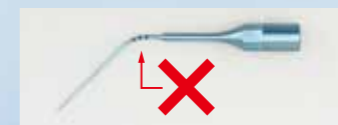

※必ず照明用LED側に曲げてください。
※チップの途中で曲げるとチップの先端まで振動が伝達されません。
※アクチベータチップの曲げは一回のみです。破折する可能性がありますので曲げ直しはしないこと。
※オートクレーブ滅菌 (132℃、0.22MPa、3分間) して使用します。

アコースティックストリーミング
キャビテーション

短時間で効果的な根管洗浄が行えます

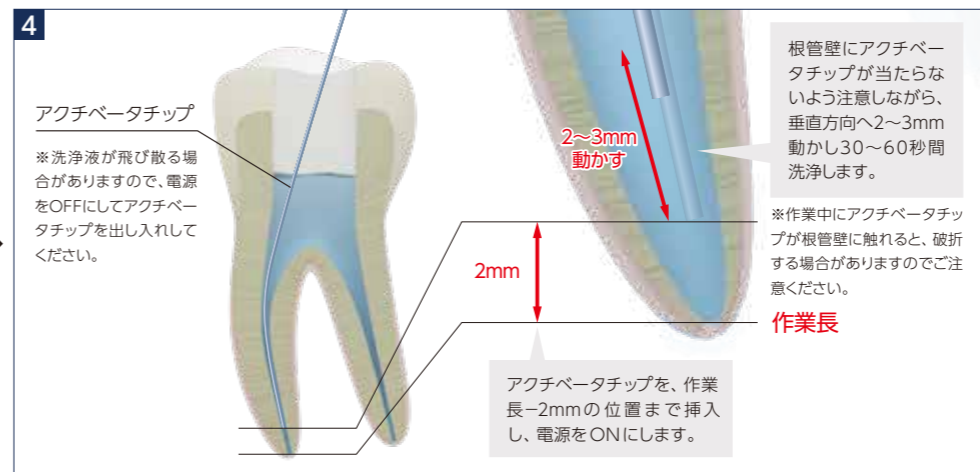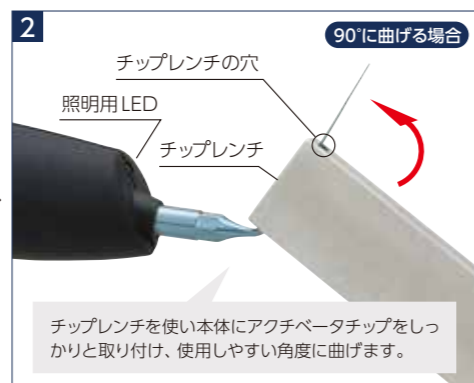

ポイント ここで曲げます。

拡大
形成



A相NiTiロータリーファイル NEX NiTiファイル

電動式歯科用ファイル
ジーシー NEX NiTiファイル
管理医療機器 225AABZX00077000
製造販売元
株式会社ジーシーデンタルプロダクツ



形状記憶M相NiTiロータリーファイル NEX NiTi FILE Ms

電動式歯科用ファイル
ジーシー NEX NiTiファイル
管理医療機器 225AABZX00077000
製造販売元
株式会社ジーシーデンタルプロダクツ



歯科用根管長測定器 ルートナビ

歯科用根管長測定器 ルートナビ
管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00015A01
製造販売元 株式会社ナカニシ



コードレス・エンド用モーター NEX エンドモーター

歯科用電動式ハンドピース
エンドメイト TC2 (NEX エンドモーター)
管理医療機器 特定保守管理医療機器
222ALBZX00018000
製造販売元 株式会社ナカニシ

洗浄



エンド用コードレス超音波洗浄器

NEX エンドソニック



セット内容●ハンドピース本体(スリーブ付) 1個、アクチベータチップ(ストレート・アングル) 各1個、保護カバー(100枚入) 1個、ハンドピーススリーブ(2本入) 1個、チップレンチ 1個、USBケーブル 1個、ACアダプタ 1個
寸法●26mm(W)×180mm(D)×28mm(H)
重量●76g
包装●1セット
歯科用根管洗浄器 NEX エンドソニック
管理医療機器 特定保守管理医療機器 230AKBZX00015000

充電式バッテリー
充電目安2.5時間、約1時間連続使用可能



単品包装●
アクチベータチップ (3本入) 1函
保護カバー (100枚入) 1函
ハンドピーススリーブ (2個入) 1函

充填



歯科根管材料電気加熱注入器

ゼネシス フィル

歯科根管材料電気加熱注入器 ゼネシス フィル
管理医療機器 225AKBZI00152000
製造販売元 株式会社ジオメディ



電熱式根管プラグ

ゼネシス パック

電熱式根管プラグ ゼネシス パック
管理医療機器 特定保守管理医療機器
225AKBZI00153000
製造販売元 株式会社ジオメディ

歯科用根管充填固状材料(ペレットタイプ)

ガターパーチャ バー Plus

歯科用根管充填固状材料 ガターパーチャ バー Plus
管理医療機器 225AKBZI00151000
製造販売元 株式会社ジオメディ



ガターパーチャポイント(カラーコード)

ガターパーチャソフトポイント

歯科用根管充填ガッターパーチャポイント
ジーシー ガッターパーチャソフトポイント
管理医療機器 221AABZX00076000
製造販売元 大成歯科工業株式会社



歯科用根管プラグ

NEX G-コンデンサー

歯科用根管プラグ ゴーシー NEX G-コンデンサー
一般医療機器 09B2X00010G00068
製造販売元 株式会社シオダ

※掲載のジーシー測定のパラメータは、2024年3月現在のものです。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しましては、必ず製品の電子添付をお読みください。

発売元 **株式会社 ゴーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

製造販売元 **株式会社 ゴーシー**
東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286