

ジーシー パターンレジンXF

パターン用常温重合レジン




PATTERN
RESIN **XF** **Fine**
Fix
Fast



さらに使いやすく 進化した“パターンレジン XF”

XFine 操作性がさらに向上

優れた操作性と適合性でご評価いただいているジーシー パターンレジンがさらに進化。ポリマーをより微細化することで、築盛時には粘性があり、連結時には間に流しやすく、操作性のバランスを最適化いたしました。

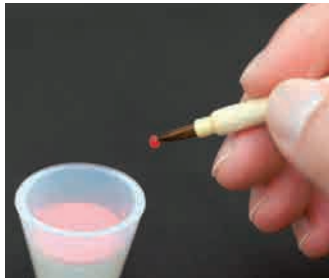



筆No.4を使用



筆No.10を使用(別売)

XFix 低重合収縮



進化したポリマー技術により、従来品を超える低重合収縮を実現。重合時の変形やズレが起こりにくく、より精密なパターンが作製できます。

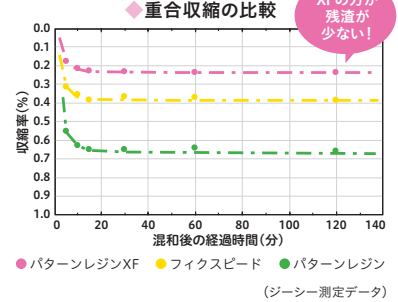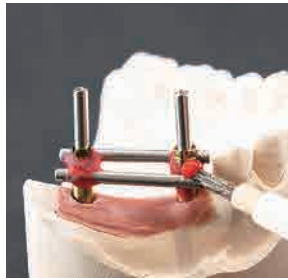

XFast ヒートショック対応 & 低焼却残渣

焼却時の熱膨張を大幅に抑えたことで鑄型へのダメージを与えることなくパターンの焼却が可能となり、単冠（約 0.3g 以下）の急速加熱（ヒートショック）での鑄造を可能にしました。

さらに、新規流動性改質剤により、ノンシリカを実現。鑄造後も美しい面性状が得られ、焼却残渣によるキャストエラーも防ぎ、スピーディーな作業を可能にしました。

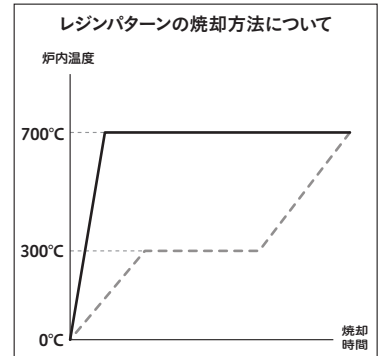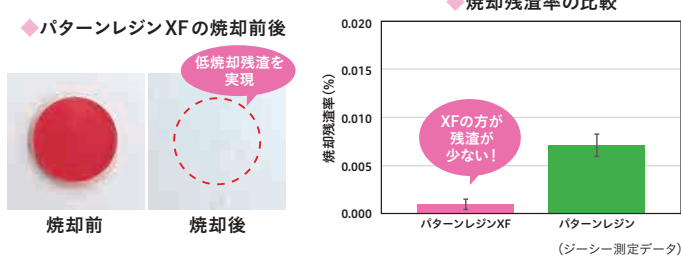

※ 大型のパターンの場合は300°Cで1時間係留後、炉内温度を上昇させてください。

■製品仕様



パターン用常温重合レジン

ジーシー パターンレジンXF

色調●1色=レッド
包装●1函セット=粉末100g1本、液100g1本、ラバーカップ2個、ポリスポイト (No.3) 1本、筆 (No.4) 1本

単品包装●
粉末100g1本
液100g (108mL) 1本、ポリスポイト (No.3)
歯科用パターンレジン ジーシー パターンレジンXF
一般医療機器 23B2X00038000049

■関連製品



※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 207-3370 ●九州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。