

簡単


(培養不要)

スピーディー

(判定時間 5分)

わかりやすい

(色変化表示)

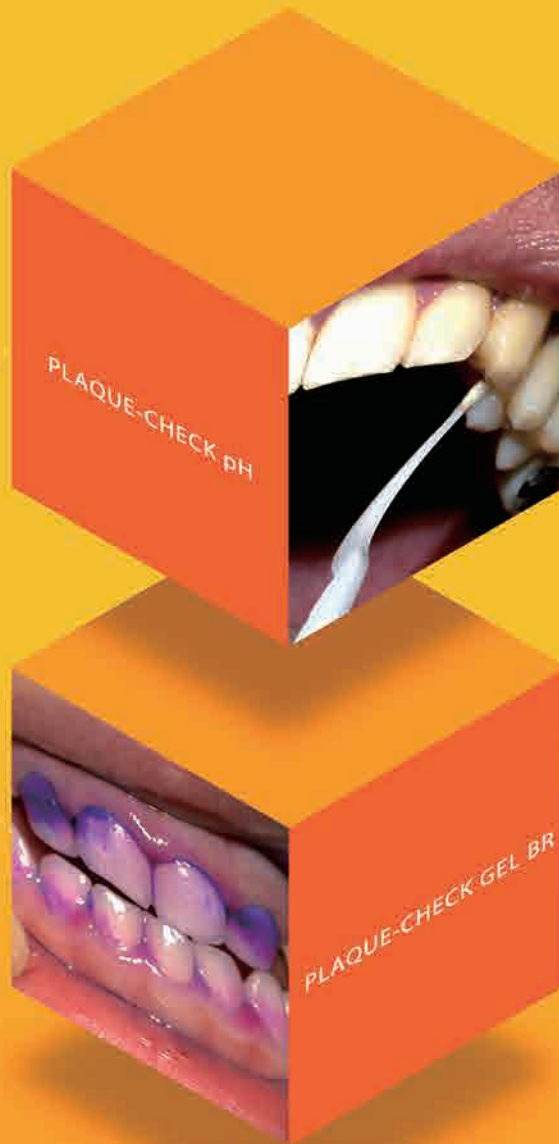


1

プラークの
酸産生能を判定

PLAQUE-CHECK pH

酸産生能を
わかりやすい色変化で判定

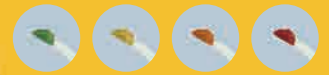

2

プラークの
付着部位の確認

PLAQUE-CHECK GEL BR

古いプラーク、
新しいプラークを
2色に染め分けられる

PLAQUE-CHECK pH

PLAQUE ACID PRODUCTION ABILITY TEST

色でわかるプラーク判定キット

簡単なステップによる即時判定(所要時間5分)。患者さんにもわかりやすい視覚的結果により、患者さんのモチベーションアップに最適な「プラーク判定キット」です。

包装●1函(20回分): プラークチェックプレート 20枚、プラークチェックスティック 40本、プラークチェックブラシ 20本、プラークチェック溶液(3mL) 1本、リーフレット 20枚、プラークチェックジェル BR(5g) 1本、使用説明書 1枚

※掲載の希望患者価格(税込)は、2024年3月現在のものです。



ジーシー プラークチェック pH

プラーク酸産生能検査キット



単品 歯垢染色ジェル PLAQUE-CHECK GEL BR プラークチェックジェル BR

単品もご用意しました。

古いプラークを青紫色、新しいプラークを赤色に2色に染色し確認できる歯垢染色ジェル「プラークチェックジェルBR」の単品包装をご用意しました。ホームケア用に最適な内容量5gと、医院用に内容量40gの2種類があります。

●ホームケア用【5g】

12本セット包装

包装●
1函: プラークチェックジェル BR(5g)
12本、使用説明書 12枚
<希望患者価格1本=¥400(税込)>









●歯科医院用【40g】

包装●
1函: プラークチェックジェル BR
(40g) 1本、使用説明書 1枚

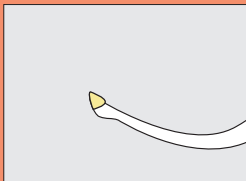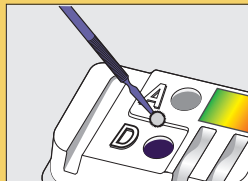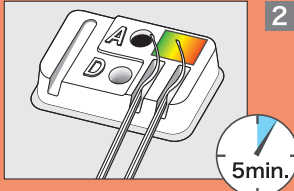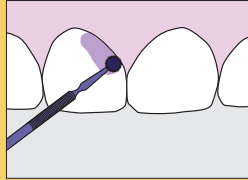

色変化でわかるプラークチェック

	PLAQUE-CHECK pH プラークの酸(歯を溶かす物質)をつくる強さをチェック	PLAQUE-CHECK GEL BR プラークがどこに残っているかをチェック				
判定の仕方	 <p>1 プラークを採取 プラークチェックスティックで歯面からプラークをとり、プラークチェック溶液につけます。</p>	 <p>1 ジェルの準備 「プラークチェックジェル BR」をプラークチェックプレートにとります。</p>				
	 <p>2 5分間放置 プラークチェック溶液に浸漬したスティックをプレートに置き、5分間放置します。</p>	 <p>2 歯面に塗布 プラークチェックブラシで歯面へ「プラークチェックジェル BR」を塗布。水で軽くすすいだ後、染め出された部位(プラーク付着部位)を確認します。</p>				
判定結果	 <p>弱い ← 酸産生能 → 強い</p> <p>点線で示したラインより赤い方は、気を付けましょう。プラークが酸を多く作り出しています。</p>	 <table border="1"> <tr> <td>青紫色</td> <td>古いプラーク</td> </tr> <tr> <td>赤色</td> <td>新しいプラーク</td> </tr> </table> <p>古いプラークが残っているところが青紫色に、新しいプラークがあるところが赤く染まります。</p>	青紫色	古いプラーク	赤色	新しいプラーク
青紫色	古いプラーク					
赤色	新しいプラーク					

お口の状態に合わせたプラークコントロール

 <p>Professional Care プロフェッショナルケア</p>	 <p>ブラッシング指導</p>	 <p>PTC(歯のクリーニング)</p>
 <p>Home Care ホームケア</p>	 <p>フッ化物配合製品の使用</p>	 <p>適切な歯みがき</p>
		 <p>洗口剤の使用</p>

自宅でも簡単にプラークチェック

古いプラーク、新しいプラークの付着部位を簡単チェック。



歯垢染色ジェル
プラークチェックジェル BR

【成分】精製水、グリセリン、エチルアルコール、無水クイ酸、カルボキシメチルセルロースナトリウム、キシリトール、赤色105号、青色1号、パレン



1 ジェルを塗布
歯ブラシへ「プラークチェックジェル BR」を付け、歯面全体にゆきわたるように口の中に広げます。

2 プラーク付着部位を確認
水を口に含み、軽くすすいだ後、鏡で染め出されたプラークを確認します。歯面上で青紫色に染まった部分は古いプラーク、赤く染まった部分は新しいプラークが残っているところです。

※染め出された染色ジェルは、通常のはみがき、洗口などで容易に落とすことができます。

※掲載製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※キリトリ

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286