

PLASTIC-TUBE II

ご使用に際しては、説明書の
注意事項をよく読んでください。

ジーシー プラスチックチューブⅡ

支台築造用マトリックスチューブ

ジーシー プラスチックチューブⅡは支台築造用コンポジットレジンなどを用いて支台築造を行う際に使用するマトリックスチューブです。

用途

・支台築造時のマトリックス

形状・サイズ

片側3°、両側6°のテーパーがついた円錐台形状で、4種類のサイズがあります。

ジーシー プラスチックチューブⅡ サイズ表

サイズNo.	下端内径	上端内径
1	6mm	4.5mm
2	7mm	5.5mm
3	8mm	6.5mm
4	10mm	8.5mm

※高さはすべて15mmです。

使用法

1. 支台築造用材料を用いて、その使用手順に従いポストの植立等を行います。
2. 歯牙の大きさに合った内径のチューブを選択し、試適を行います。
3. チューブ径の調整はチューブの下端をカットすることにより可能ですので、試適の際に前もって調整してください。また、高さを調整したい場合はご希望の高さでカットしてください。
4. 支台を築造したい部位にチューブをセットし、支台築造用材料を填入・圧接します。
5. 支台築造用材料の硬化確認後、チューブの除去を行います。
6. 通法に従い支台歯形成を行います。

注意事項

〔注 意〕

1. 本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
2. 本品を高温となる場所（ストーブの側など）に放置しないこと。
3. 本品は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
4. 本品は、使用説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

包装

単品包装のみ 1函 25個入り (No.1～No.4)



株式会社 ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号

☎ 0120-416480

120931PD