

PRATICA

ジーシープラティカ **【歯科用】**

ディスポーザブル口腔ケアスポンジ &
口腔用ジェル
オーラルアクアジェルPC



ジェルを多用する
訪問診療先でも
十分な大容量



**訪問診療や介護施設などで
高齢者の口腔ケアを
サポートします。**

PRATICA (プラティカ) とは？

PRATICA(プラティカ)は、Practice(英)【プラクティス】と同意のイタリア語で、実践・習慣などの意味があります。ジーシーでは、同ブランド名で「専門家による口腔ケアを必要とされている方々、また高齢者の方々の口腔ケアの実践・習慣化、口腔健康の維持・向上」を目指した製品を展開して参ります。

衛生的な
1本ずつの個別包装



口腔内の汚れを取り除く ディスポーザブル口腔ケアスポンジ

特長

- 汚れを効果的にかからめ取りやすいスポンジ形状
- 出血が分かりやすいスポンジ色調
- 強度があり、柔軟性のある軸
- 軸が長いので、口腔内のすみずみまで清掃可能
- 衛生的なディスポーザブル仕様



ジーシー プラティカ
ディスポーザブル
口腔ケアスポンジ

種類●2種=S、M
包装●1函:50本入
〈希望患者価格●50本入=各¥2,330(税込)〉

サイズは2種類。口腔の状況に合わせて選択できます。

S

口が開けにくい方・粘膜出血傾向のある方に

※ほぼ実寸大です



M

口がしっかり開けられる方



口腔用ジェル

オーラルアクアジェルPC

(PC=Professional Care)

乾いてこびり付いた口腔内の 汚れを除去しやすくする

たっぷり**120g!**

特長

- ジェルを多用する訪問診療先でも十分な大容量(120g)
- 口腔内のうるおい浄化を助ける
- pHはほぼ中性(pH7.1)のため、長時間の使用でもむし歯のリスクの心配がない




ジーシー プラティカ **化粧品**
オーラルアクアジェルPC

包装●1 函: 120g1本
製造販売元 株式会社ジーシー


口腔ケアスポンジ&オーラルアクアジェルPC使用法




1 スポンジ部に少量の水分を含ませて必ずしっかり絞る

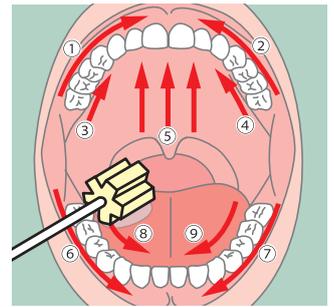

2 スポンジ部にオーラルアクアジェルを取り、口腔内全体に行き渡るように塗布し、数分間待つ

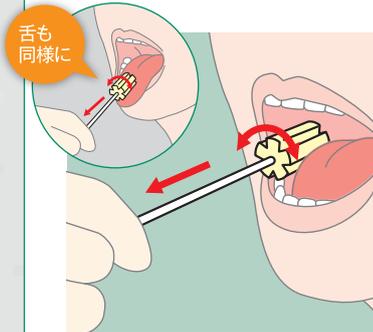

3 奥から手前にこすったり、回転したりして、汚れをからめ取るように口腔内を清掃する

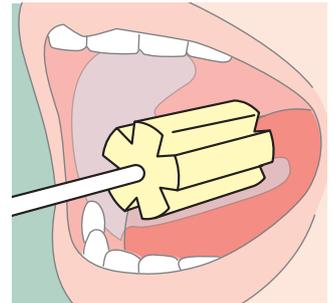

4 スポンジ部を洗い保湿のためもう一度オーラルアクアジェルを塗布する

※ご使用に際しましては、必ず口腔ケアスポンジの説明書もお読みください。

関連製品

ジーシー プラティカ ディスプレイザブル 口腔ケアブラシ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 函: 100本入



義歯洗浄には

義歯ブラシ ジーシー プラティカ デンチャーブラシ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 函: 12本入
〈希望患者価格●1本=¥170(税込)〉



入れ歯洗浄剤 ポリデント® フレッシュクレンズ

色調●1 色=ホワイト
包装●1 本: 125mL
〈希望患者価格●1本=¥1,160(税込)〉



※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載のジーシー研究所測定参考データは、2024年3月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎ **0120-416480**
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286