

流し込みレジン  
の適合精度に、  
強さをプラス、  
多用途に使える  
新・流し込み  
レジンです。

,'CC,'



Denture



Splint




Provisional  
restoration

注入型多目的レジン

## プロキャスト DSP

### ● 用途に合わせて厳選した豊かな色調

色調は歯肉色4色、透明色、歯冠色2色の全7色。デンチャー、スプリント、プロビジョナルレストレーションの症例に幅広く対応します。歯肉色には一般的な歯肉色の他、金属色を効果的に遮蔽するマスキングピンクも用意しました。

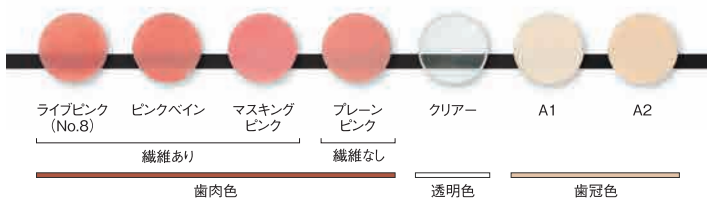

マスキングピンク未使用例



マスキングピンク使用例



流し込みレジンの特性を活かしながら、  
高い強度と耐久性で、もっと多目的に——。

注入型多目的レジンの

## ジーシー プロキャスト DSP

〈色調〉歯肉色4色=ライブピンク(No.8)、ピンクベイン、マスキングピンク、ブレンピンク /  
透明色=クリアー / 歯冠色2色=A1、A2  
〈包装〉スターターセット1函=粉末650g1本、液460g(500mL)1本、粉計量スプーン、液計量器、  
プラスチックパチュラ、液瓶ノズル、スポイト(No.1)、混和カップ(100mL) 各色  
〈単品包装〉粉末1本=650g 各色 / シンブルバック1函=1kg(500g×2袋) 各色  
液1本=460g(500mL)

ジーシー プロキャスト DSP  
義歯床用アクリル系レジン(歯科汎用アクリル系レジン)(歯科用長期的使用咬合スプリント向け材料)  
管理医療機器 220AABZ00307000



### ● 良好な操作性

流れが良く、充分な操作余裕時間がありますので、気泡の混入などのトラブルはほとんどありません。



### ● 高い適合精度

流し込みレジンならではの優れた適合精度が得られ、長年に安定しています。

### ● 幅広い注入器、重合器に対応


一般的な重合プログラム(55℃/2.0~2.5気圧/30分)で製作できますので、お手持ちの機器がそのままご利用いただけます。  
(各システムの取扱説明書に従い操作してください。)

### ● モノマー刺激を低減

残留モノマーは流し込みタイプのレジンで最少レベル。水中放置1日後には、加熱重合型レジン「アクリロン」と同等まで低減します。

### ● 高い物性


流し込みタイプのレジンでありながら、加熱重合型レジン「アクリロン」、常温重合レジン「ユニファストⅢ」と同等以上の物理的性質を確保。高い強度と耐久性を実現しました。

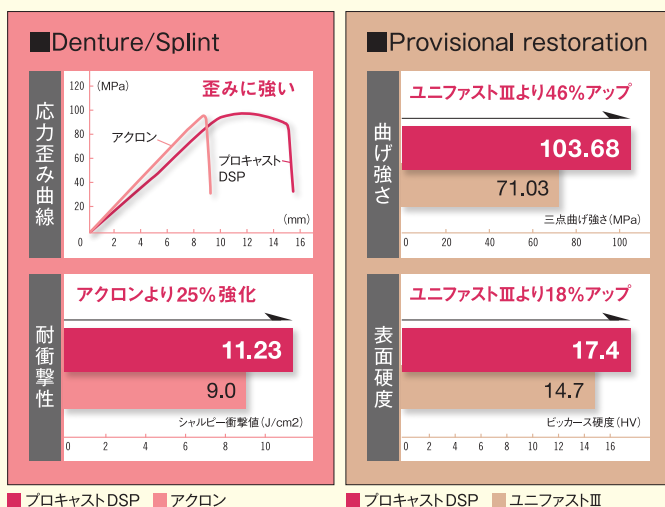

### ■ パーシャルデンチャーの製作



ろう義歯を製作

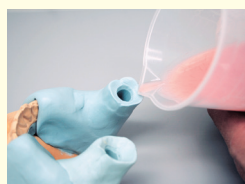

シリコンパテによるコア作製後、脱ろう、レジンの注入



パーマポットによる加圧・重合



重合完了後、スプルーを切断し、修正・研磨



完成

### 関連製品



加圧重合器  
ジーシー パーマポットUP-Ⅲ  
〈仕様〉外形寸法=240mm(直径)×220mm(高さ)  
×380mm(取手部含む最長部) ●内容積=4.5L  
●重量=3.3kg ●空気圧=0.245MPa  
〈包装〉本体1台  
一般医療機器 13B1X00155000026  
製造販売元 株式会社ジーシー



ジーシー レディーキャスティングワックス  
流し込みレジン用スプルーに適した2種類を追加新発売しました。

〈種類〉R80、R100  
〈凝固点〉60℃  
〈包装〉1函=4本  
一般医療機器 27B2X00008000020  
製造販売元 大成歯科工業株式会社

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2026年6月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store からダウンロード  
Google Play でお申し込み  
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

