

プロインパクト

耐衝撃性義歯床用レジン



割れない、壊れない義歯床用レジン

という理想を追求

高齢者歯科医療に貢献する

PRO IMPACT

Full Denture

Partial Denture

Metal Base Denture

Implant Over Denture

プロインパクト

超高齢社会を迎え義歯のニーズがますます高まる中、使用時の落下や乾燥による破損などのトラブルも増えております。


ジーシー プロインパクトは、超高齢社会における義歯の破損リスクを減らすことを目的として開発された優れた耐衝撃性を有する義歯床用レジンです。



1 “割れない”、“壊れない”を目指した 靱性と耐衝撃性の両立

- 落下、乾燥、技工操作で割れにくい。
- 衝撃に強い：落下やぶつけても割れにくい。
- 応力に強い：掘り出し作業でも破折しにくい。
- 靱性がある：強度の必要な部分や薄い部分でも使用できる。
- 乾燥に強い：乾燥した状態でも十分な耐衝撃性を有している。

■ 耐衝撃性を実現した特殊なラバー成分を配合したポリマー

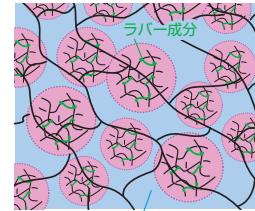


液成分がラバー成分と均一に絡み重合うことで、優れた耐衝撃性を有している。




通常の義歯床用レジンでは割れる試験(100gの鉄球を50cmの高さから落下)でも耐衝撃性のあるプロインパクトでは割れません。

破壊靱性試験 〈JIS T6501:2012に準じて試験を実施〉

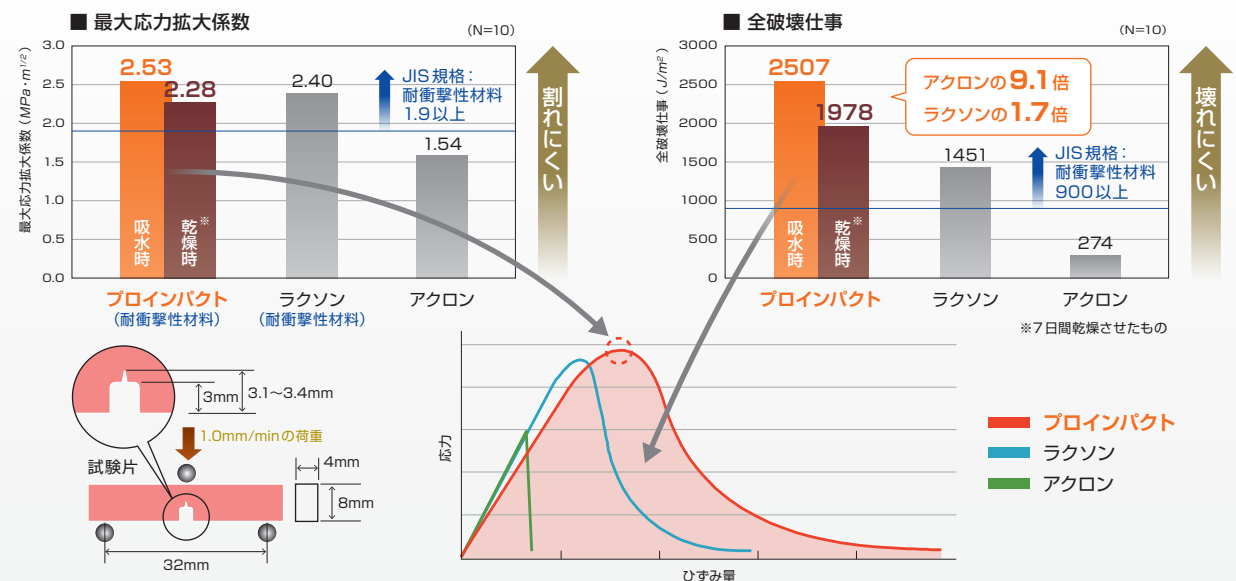

3 従来製品より使い易く 操作余裕時間 20%アップ

- 操作余裕時間を5分から6分に延長しました。

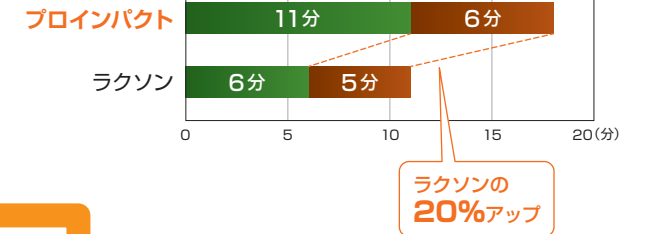

4 臨床の幅を広げる 金属色をカバーするオペーク性

No.8 ライブピンク 半透明のため、歯肉の色を透過して色が馴染みます。



ティッシュオペーク 不透明なため、歯肉の色や金属床の金属色を効果的に遮蔽できます。金属床、パーシャルデンチャー、インプラントオーバーデンチャーやキャラクタライズをする際に適しています。

※修復にはユニファストラボB No.8オペークの色調が適しています。



ティッシュオペーク色のキャラクタライズ例



キャラクタライズのスペースを確保するため歯肉部を一層削る




キャラクタライズ後

2 短時間で得られる 滑沢な研磨面


- 微細な特殊ポリマーを使用しているため、重合物にむらが無く容易に滑沢な研磨が行えます。

ムラの無い重合を実現

新開発の微細なポリマーにより重合物にムラがありません。

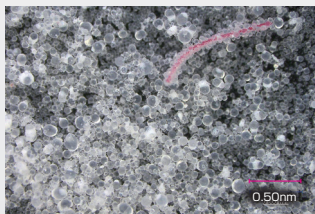

プロインパクトの粉末(繊維入り)

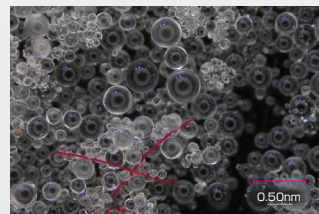

アクリルの粉末(繊維入り)

滑沢な研磨面を実現

微細なポリマーを使用しているため、研磨がスムーズ。仕上がりの美しさは抜群です。



プロインパクトの研磨面



研磨後の滑沢な義歯

耐衝撃性義歯床用レジン

ジーシー プロインパクト



色調●2色：No.8(ライブピンク)、ティッシュオペーク
包装●粉末：500g1本、液計量器1個、デンチャーパック(プロインパクト用)1個(10枚入り)

義歯床用アクリル系レジン ジーシー プロインパクト 管理医療機器 224AABZX00075000



色調●2色：No.8(ライブピンク)、ティッシュオペーク
包装●希望医院価格●粉末：1kg(500gパック×2)1函



包装●液：250mL(230g)1本、液計量器1個、スポイト1本
液：500mL(460g)1本、液計量器1個、スポイト1本

義歯納品用パック


デンチャーパック(プロインパクト用)



外形寸法●縦145mm×横110mm
包装●デンチャーパック(プロインパクト用)1個(30枚入り)



表裏の記入欄で納品時の管理ができます

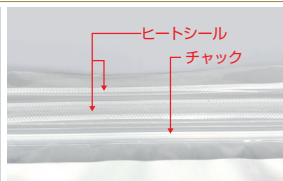

ヒートシールとチャックの2重シール

義歯の乾燥を防ぐデンチャーパック

厚みのあるポリエチレンフィルムにチャックとシーラーなどで封をする2重のヒートシールを採用。パックに水を入れて納品することができ、義歯の乾燥を防ぐことができます。また、パック表面には色調、裏面には歯科医院名、患者名、歯科技工所名を記入できます。



関連製品

硬質レジン歯

ジーシー リブデントグレース



色調●8色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B2、B3、C3
包装●前歯1函：中切歯～犬歯3揃1個(上下左右側別)
白歯1函：第一小臼歯～第二大臼歯4揃1個(上下左右側別)

歯管理医療機器 硬質レジン歯 21600BZZ00145000

硬質レジン歯

ジーシー サーパス (Gシリーズ)



色調●7色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B3、C3
包装●前歯6揃：1個、白歯8揃：1個
管理医療機器 硬質レジン歯 21400BZZ00073000

速硬性常温重合レジン

ジーシー ユニファストラボ



※流し込みに適した「タイプF」と築盛に適した「タイプB」があります。
※液はタイプF、タイプB共用です。
※プロインパクト ティッシュオペークはユニファストラボ No.8 オペークの色調が適しています。

色調●タイプF：歯冠色 3色=A1、A2、A3
タイプB(歯冠色)5色=A1、A2、A3、A3.5、インサイザル
タイプB(歯肉色)3色=No.3(ピンク)、No.8(ライブピンク)、No.8 オペーク
包装●粉末1本：100g、250g(インサイザルは100gのみ)
液1本：100g(液計量器、液瓶ノズル付)、250g(液計量器、液瓶ノズル付)、480g(液瓶ノズル付き)
ラボパック
色調●タイプF：2色=A2、A3/タイプB：3色=A2、A3、No.8(ライブピンク)
包装●1函：粉末250g×6本
管理医療機器 歯科汎用アクリル系レジン 225AABZX00215000

超速硬石こう(模型用)

シェイク！ミックス ストーン



色調●2色=ピンク、イエロー
包装●シンブルパック1函：3kg(1.5kg X 2)
専用シェイカー1個
一般医療機器 歯科用硬質石こう 13B1X00155000290

硬石こう(模型用)

ジーシー ニュープラストンⅡ HE



色調●ビーチ1色=ビーチ
包装●シンブルパック1函：3kg(1.5kg X 2)
一般医療機器 歯科用硬質石こう 13B1X00155000210

レジンの収縮を補う高膨張(0.40%)タイプ

超速硬性常温重合レジン

ジーシー ユニファストⅡ



包装●2-1セット1函(プラスチックケース入)：粉末35gA2、No.8(ライブピンク)各1本、液40g(42mL)1本、付属品付
管理医療機器 歯科汎用アクリル系レジン 218AABZX00018000

義歯補修用常温重合レジン

ジーシー レペアジン



包装●粉末1本：100g(筆(No.5)付)
液1本：100g(スポイト(No.3)付)
管理医療機器 義歯床補修用レジン 20300BZZ00570000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2026年6月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地 東京都板橋区連沼町7番6号1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

