

きちんと磨けていますか？

きれいに磨けているように  
見えても…



こんなに磨き残しが…



正しいブラッシング  
をしなければ

プラークは落とせません！

PROSPEC®



歯磨きを楽しく身につける！  
デジタル絵本



※掲載内容は2022年10月現在のものです。  
※印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。  
※無断転載、無断複製を禁じます。

発売元

株式会社 ジーシー お客様窓口 ☎0120-179418

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

歯の健康についての情報満載のホームページ <http://www.gcdental.jp/>

詳しくは当院の歯科医師・歯科衛生士にご相談ください。

GC



プロスペック®歯ブラシ


毛先磨きの  
ポイント



# きれいに磨くコツ


**Point 1** 毛先を狙ったところに  
垂直に当てる

歯ブラシの面を使い分ける

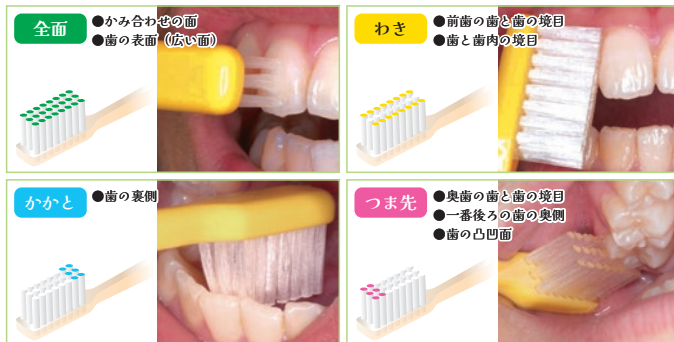

**Point 2** 毛先を効果的に動かす

軽い力で、歯1~2本分の幅で動かす

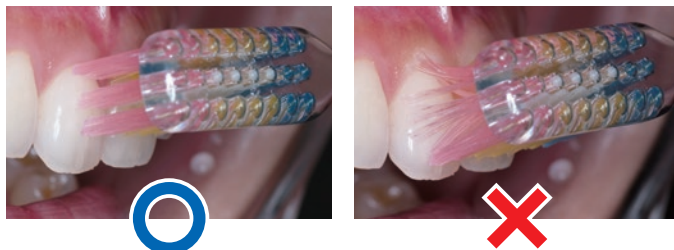


動画で確認




## ここに気をつけましょう!

上

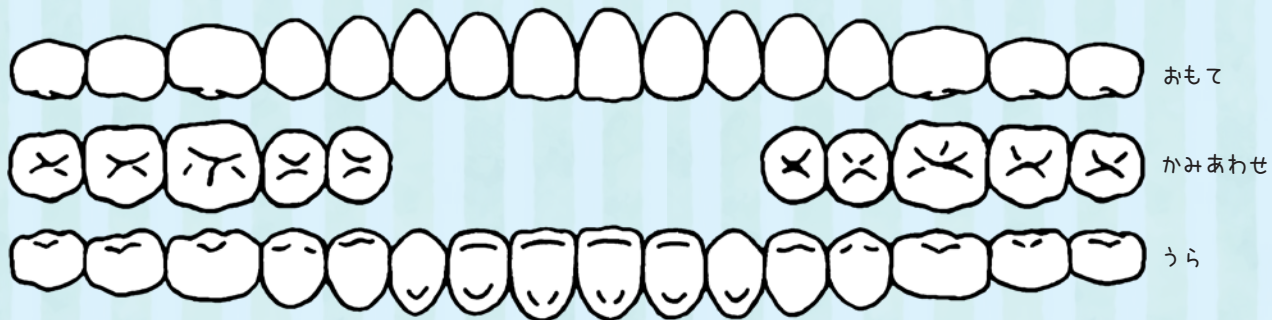

左

右

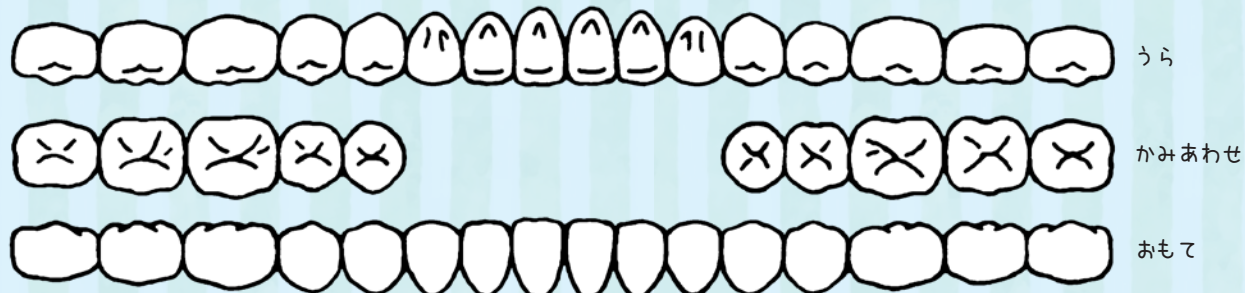

下

あなたにおすすめの歯ブラシは…

