



フッ素入り歯面研磨ペースト

ジーシー PTCペースト ルシェロ ホワイト

包装●1函：1本

歯面研磨剤 ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003

成分●炭酸カルシウム(Lime粒子)、ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム、濃グリセリン、パラベン、黄色4号、青色1号、香料(グリーンシトラス)、その他

内容量●80g

関連製品



歯面清掃用ブラシ
ジーシー PTCソフトブラシ

包装●
1函：ソフトブラシ 20個

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCソフトブラシ
一般医療機器 27B2X000268000046
製造販売元 プレミアムプラスジャパン株式会社



歯面清掃用ブラシ
ジーシー PTCブラシ

包装●
1函：ブラシNo.1 20個

歯科予防治療用ブラシ ジーシー PTCブラシ
一般医療機器 13B1X00155000103
製造販売元 株式会社ジーシー



歯面清掃用カップ
ジーシー PTCカップII

包装●
1函：カップII 20個

歯磨きカップ ジーシー PTCカップII
一般医療機器 13B1X00155000291
製造販売元 株式会社ジーシー



歯面清掃用コーン
ジーシー PTCコーン

包装●
1函：コーンNo.1 20個

歯科用ゴム製研磨材 ジーシー PTCコーン
一般医療機器 13B1X00155000104
製造販売元 株式会社ジーシー



歯面清掃用歯間ブラシ
ジーシー PTC歯間ブラシ

包装●
1函：ブラシサイズM 20本



歯面清掃器材用アタッチメント
ジーシー PTCマンドレル

包装●
1函：マンドレル 10本

歯科用マンドレル ジーシー PTCマンドレル
一般医療機器 13B1X00155000101
製造販売元 株式会社ジーシー

あなたのPTCを「ルシェロ フロス」が効果的にサポート!

マイクロファイバー(極細繊維)の応用により実現した高いプラーク除去能力。特にアンワックスタイプはPTCに最適。

デンタルフロス ルシェロフロス (医院用)
アンワックス/ミントワックス

内容量●200m ケース色●アンワックス1色=ホワイト/ミントワックス1色=ピンク
包装●1個

※30mの仕様もございます

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **日本ゼトック株式会社**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneも Androidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!
推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



PA107M2303



PTCペースト ルシェロ ホワイト



フッ素入り歯面研磨ペースト



歯面に優しく、ステイン除去



white
ruscello
PTC PASTE

「PTCペースト ルシェロ ホワイト」は ステインを浮かし優しく除去します

その秘密は、清掃剤「Lime粒子®」を高濃度に配合した弱アルカリ性のペースト。歯に沈着したステインを浮かし、「Lime粒子®」が効率よく優しくステインを除去します。




特長1 すぐれたステイン除去力 弱アルカリ性×Lime粒子®

ペーストを弱アルカリ性にするにより、ステインを浮かせやすくします。次に浮かしたステインを清掃剤「Lime粒子®」が効率よく除去してくれます。


擬似ステインを用いた除去力試験

pHの違いによる擬似ステイン除去の比較試験

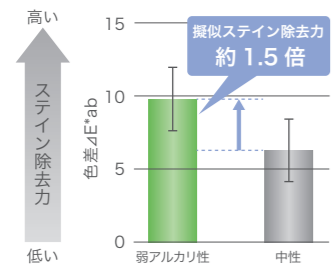

試験用にpH調整したPTCペーストは、弱アルカリ性の方が中性よりもステイン除去力が高いことがわかります。

自社既存製品との比較試験

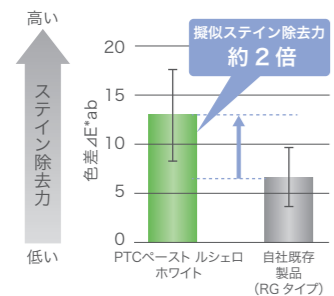

PTCペースト ルシェロ ホワイトは、自社既存製品と比較してステイン除去力が高いことがわかります。

<ジーシー研究所データ>

ステイン除去のメカニズム(イメージ図)



特長2 低侵襲

清掃剤「Lime粒子®」は、歯面に優しくPTCすることができます。

モース硬度からみたLime粒子®と歯質の硬さの目安



清掃剤顕微鏡画像



特長3 PTCに最適なペースト性状

柔らかいソフトペーストのため、ブラシやカップでの操作でも飛び散りにくく、狙った部位を効率よくクリーニングします。口中に広がるグリーンシトラスの香りで気持ちよく、口腔内が爽快になります。



プロフェッショナルケアで、歯を白く美しく

ケース1



患者さんは紅茶を愛飲しており、歯面に着色があります。



PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロ ホワイトで着色を除去します。



歯間部についた着色まで、しっかり除去できます。



ケース2



下顎前歯全体が飲食により着色があります。



PTC用ブラシとPTCペースト ルシェロ ホワイトで大まかに着色を除去します。



ブラシだけでは落としにくい部分の着色は、スケーラーを使い除去します。



着色と共にくすみも取れ、歯面全体の明度も上がり患者さんも美白を実感していただけました。

PTCペースト ルシェロ ホワイトの効果的な使用方法



プロケア×セルフケアで美白効果を持続

プロケアによる美白効果を持続するために、セルフケアには「ルシェロ ホワイト シリーズ」がおすすめです。

輝き続ける白い歯に

4つの力で歯を白く

- 弱アルカリ性 (汚れを落としやすくする)
- Lime粒子® (歯にやさしい)
- PEG400 (薬用成分)
- フッ素 (薬用成分)



ルシェロ歯みがきペースト ホワイト

【包装・価格】
●1歯:1本
希望患者価格●1歯:1本=¥1,980(税込)
【内容量】100g <薬用ハミガキ>
【医薬部外品】歯科医院用



ルシェロ歯ブラシ W-10

【包装・価格】
●1歯:6本(各色3本)
希望患者価格●1歯:1本=¥410(税込)
【色調】2色=パールホワイト、パールゴールド
【毛のかたさ】やわらかめ

【成分】[清掃剤]炭酸カルシウム(Lime粒子®)[溶剤]精製水[湿潤剤]濃グリセリン[薬用成分]ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素)
[甘味剤]キシリトール[粘度調整剤]カルボキシメチルセルロースナトリウム[香味剤]香料(ビュアミントタイプ)
[pH調整剤]リン酸水素二ナトリウム、水酸化ナトリウム[粘結剤]ヒドロキシエチルセルロース[増粘剤]無水ケイ酸[保存剤]パラベン

ruscello
ルシェロシリーズの
詳しい情報はこちら
<http://www.gcdental.co.jp/ruscello/>

