

クイックデンチャークリーナーを上手にお使いいただくために

ご使用前にご確認ください。

1. 廃棄するときはどうすればいいの？

大量に廃棄する場合廃液の 3/10 量(重量)の重炭酸ナトリウムか炭酸ナトリウムで中和してから廃棄します。

この際、炭酸ガスの発生で発泡することがありますので、徐々に投入します。

なお、100mL 程度の少量であれば、水道水(20倍程度)を流しながら廃棄しても問題ありません。

2. もし、目に入ったり、手に付いたりしたらどうすればいいの？

目に入った場合 : ただちに流水で 15 分以上洗眼し、速やかに医師の診断を受けます。

皮膚に付着した場合 : 大量の水で洗い流します。

目や手に接触させないことが重要です。以下の注意事項を遵守ください。

- ・取扱いの際はグローブ・保護めがねを装着し、目に入らないよう、皮膚に直接触れないようにしてください。
- ・本材は強い酸性を有するため、超音波洗浄器を併用する場合は必ず容器に蓋をしてください。

