

# 矯正装置の歯石・プラークを 確実に落とします！




リテーナーなどの矯正装置は、形態が複雑でデリケート。ブラシ洗浄などの清掃を行いにくいため、十分なプラークの除去ができません。リテーナークリーナーは、矯正装置を浸漬し、超音波洗浄器にわずか5～10分間かけるだけで歯石・プラークを簡単に溶解する洗浄材。先生方の清掃作業をスムーズにし、美しくなりたい患者さんの矯正装置を美しく保ちます。



## ■リテーナーに付着した歯石・プラークの洗浄に



## ■複雑なワイヤーの調整時の洗浄に

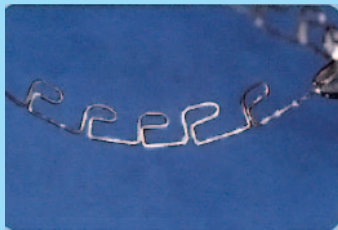

## ■バンド、ブラケットの一期治療後の洗浄に




床矯正装置洗浄材

歯科医院・  
技工所内  
専用

# リテーナークリーナー

### 使用方法

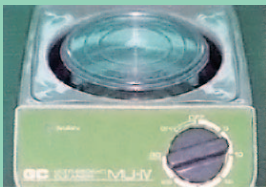

① ブラシを用いて矯正装置の表面を流水下で洗浄した後、液に浸漬し、必ず超音波洗浄器を併用して5～10分間洗浄します。なお容器は300mL程度のふた付きの容器をおすすめします。



② 液は強酸（約pH 1）ですので、患者さんに装着する前に充分に水洗します。

※ 強酸ですので、ご使用時には必ずグローブを装着してください。

※ ステンレス製の流し台や超音波洗浄器の洗浄槽に長時間液力漙すると、ステンレスカサ電食すること力濁ります。

※ 液温が低いと洗浄効果が低下しますので、室温に戻してから使用してください。

※ リテーナークリーナーは歯科医院・技工所内専用です。患者さんのデイリーケアには、一般市販のリテーナー洗浄剤をおすすめください。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

株式会社 ジーシー

東京都板橋区蓮沼町76-1 〒174-8585

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎ 0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286



# 歯石超溶解

プロが満足する義歯洗浄材



液体義歯洗浄材

歯科医院  
技工所内  
専用

## クイックデンチャークリーナー

特許取得済

### ■ 5～10分で歯石を強力に溶解します。

義歯を液に浸漬し、超音波洗浄器にわずか5～10分かけるだけで簡単に歯石を溶解。バーやポイントなどでは研磨できなかった歯間や歯頸部のような狭い部位に付着した歯石も確実に除去します。

### ■ 義歯に変色などの影響がありません。

ほとんどの義歯用材料（床用レジン、人工歯、合金など）及び磁性アタッチメントに対し変色・劣化などの影響を及ぼしませんので、安心してご使用になれます。

※ 一般市販の義歯安定剤（酢酸ビニル系）へのご使用は避けてください。



#### 使用方法



① プラークの溶解効果はありませんので、浸漬前に流水下でブラシを用いて十分にプラークや唾液を除去します。



② 液に浸漬し、必ず超音波洗浄器を併用して5～10分間洗浄します。なお容器は300mL程度のふた付きの容器をおすすめします。



③ 液は強酸（約pH 1）ですので、患者さんに装着する前に十分に水洗します。

- ※ 強酸ですので、ご使用時には必ずグローブを装着してください。
- ※ ステンレス製の流し台や超音波洗浄器の洗浄槽に長時間液が接すると、ステンレスが腐食することがあります。
- ※ 液温が低いと洗浄効果が低下しますので、室温に戻してから使用してください。
- ※ クイックデンチャー歯科医院・技工所内専用です。