

ロックリン

石こう溶解材



Since 1921
100 years of Quality in Dental



義歯に付着している石こうを
漬けておくだけで迅速に除去——
技工作業の効率化に役立ちます。



石こう溶解材

ジーシー ロックリン

包装●1本:1,000mL

〈ロックリーの主たる用途〉

- ・義歯に付着している石こうの除去
- ・鑄造体内面に付着している石こう系埋没材の除去
- ・印象用トレーに付着しているアルジネート印象材の除去
- ・印象用トレーに付着している模型用石こうの除去
- ・ダウエルピン等に付着している模型用石こうの除去

レジン床義歯からの石こう除去、鑄造体からの埋没材除去に威力を発揮する、発泡タイプの強力な石こう溶解材＝ロックリー。漬けておくだけで、わずかなすき間に入り込んだ石こうも残らず、溶かしてしまいますから、製作物を傷つける心配が無用。これまで、石こう除去に必要なだった手間と時間を、他の技工作業に有効に振り向けることができます。



溶解性能は抜群です。


ロックリーは、強力な溶解性により、ニュープラストーンII、アドバストーン、ニューフジロックなどの石こう、あるいはクリストバライト系埋没材、石こう系埋没材を漬けて置くだけで、どんどん溶かすため短時間で処理を完了できます。

効果が見える発泡タイプです。

ロックリーは、石こう溶かす際に泡を生じる発泡タイプですから石こうの溶ける状態が目視確認できます。新しい石こうを浸漬して、泡が出なくなったら液の交換時期と判断できます。

経済的です。

ロックリーは、処理能力が高いだけでなく、泡で効力を確認できるため、液を無駄に交換することもありますので、大変経済的です。

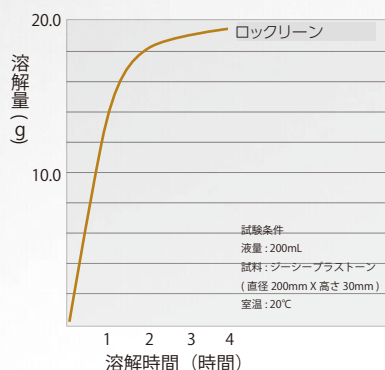

参考文献

須藤哲也：新規開発急速加熱型石こう系埋没材の臨床応用可能性『アイデアベスト』によるレジンパターンの急速加熱で技工が変わる！, 190-199 歯科技工 2011.2

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年5月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。