

GC

# RootNavi

歯科用根管長測定器 ルートナビ



GC's Endodontic System

nex<sup>®</sup>

"NEW EXPECTATION"

# 多様な歯牙形態や状況において 高精度の根尖孔検出を可能にしました。

ゼロ補正作業不要。電源を入れて、すぐに使用可能



ドライでもウェットでも、正確に根尖孔をオート検出

- ・2つの異なる周波数発振により、根管内がドライでもウェットでも正確に根尖孔を検出。


3段階のアラート音と3色反射型LCDパネル採用で  
ファイルの位置が一目でわかる

- ・ファイル先端位置を的確に知らせる3段階のアラート音。
- ・反射を抑え自然な視線で確認できる見やすい3色反射型LCDパネルを採用。

設置場所を選ばないスタイリッシュ・コンパクトボディ

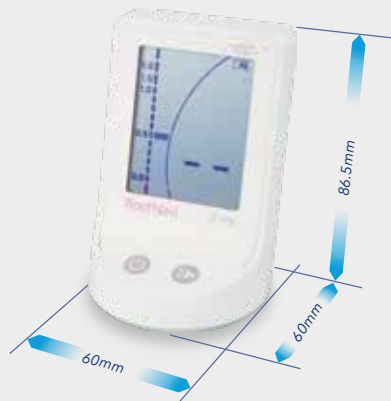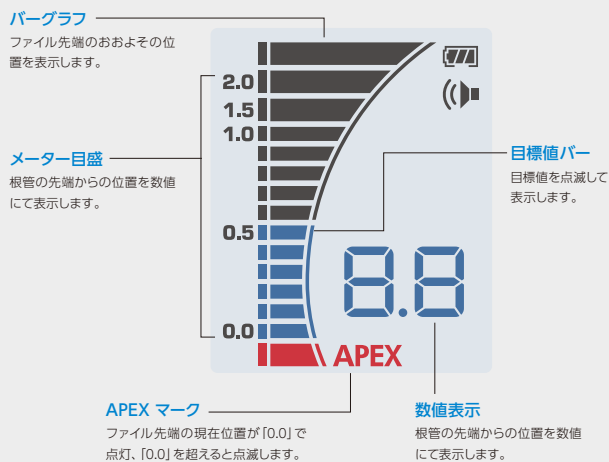


## ▶ 測定開始

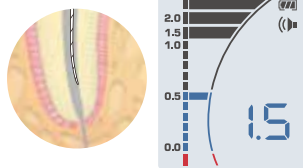


根管内へのファイル挿入と同時にバーグラフが表示され、ファイルの進行状況とバーの表示が連動します。

## ▶ 根尖部付近

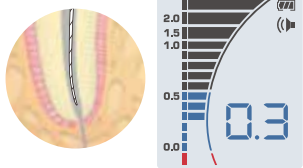


ファイル先端が根尖部付近に達するとバーグラフの色が青色に、同時にアラート音も変化することで、根尖孔に近づいていることをお知らせします。

## ▶ 根尖孔付近

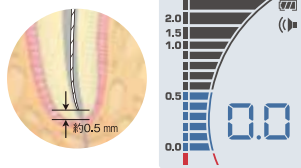

ファイル先端が根尖孔に達するとバーグラフは「0.0」を表示。アラート音が連続した音に変わります。

## ▶ 根尖オーバー

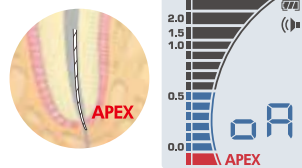

ファイル先端が根尖を越えた場合、赤いライン(APEX)の文字が表示されると同時に連続した速いアラート音でお知らせします。



### 歯科用根管長測定器

## ルートナビ

外形寸法 ● W60mm×D60mm×H86.5mm  
重量 ● 76g(単4電池含まず)  
包装 ● 一式: 本体 1個、ルートナビプローブ(1.8m) 1本、ルートナビファイルクリップ 3本、ルートナビリップフック 3本、乾電池(単4電池) 3本、ルートナビテスター 1個

歯科用根管長測定器 ルートナビ  
管理医療機器 特定保守管理医療機器  
224ALBZX00015A01



ルートナビ ファイルクリップ (1本入)  
包装 ● 1本



ルートナビ リップフック (1本入)  
包装 ● 1本



ルートナビ プローブ  
包装 ● 1本



ルートナビ テスター  
包装 ● 1個

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の情報は、2024年3月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**

東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎ **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

製造販売元 **株式会社 ナカニシ**

栃木県鹿沼市下日向700番地

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286