



rusce/fo

ルシェロ ペリオブラシ ルシェロ ポイントケアジェル

使い方ワンポイント

Q1 ペリオブラシの効果的な使い方は？

A.

歯周ポケットやインプラント周囲溝、補綴物周囲、また、歯間部にやさしく当て、清掃します。使用時の適正圧は、ブロービング圧と同等の20～25gです。



歯周ポケットへ使用した症例



前歯部歯間部へ使用した症例

歯周ポケットや歯間部は、やさしく当て、ほうきで掃き掃除をするような軽やかなイメージで動かします。



健康な歯肉溝に深く挿入しないようご注意ください。

補綴物周囲やブリッジのポンティック基底面は、やさしく挿入し、プラークをかき出すように動かします。




審美補綴の症例

Q2 ポイントケアジェルの効果的な使い方は？

A.

歯間ブラシやワンタフトブラシ、また、プロフェッショナルケア時はペリオブラシに適量取り出し、歯間部や歯頸部をブラッシングします。

使用後は、少量(約10～15mL)の水を含んで十数秒間ブクブクうがいをします。

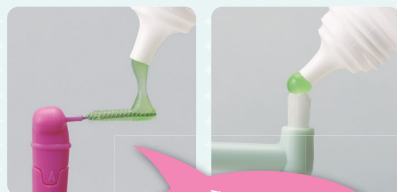

研磨剤無配合なので歯や歯肉にやさしく、軽くお口をゆすいでも有効成分が長く残りやすい発泡剤無配合です。

Q3

ペリオブラシ、院内指導用ハンドルの消毒・滅菌は可能ですか？



A.

ペリオブラシはディスポーザブル製品となっております。

院内指導用ハンドルはオートクレーブ滅菌(滅菌温度・115～118℃ 30分、121～124℃ 15分、126～132℃ 10分、乾燥温度・132℃以下)可能です。



Q4

院内指導用ハンドル、替ブラシの着脱時の注意点は？

A.

院内指導用ハンドルは、繰り返し使用できるよう滅菌可能な材質を採用しており、ペリオブラシ(ヘッド部分)や歯間ブラシのヘッド部分・ハンドル部分とは材質が異なるため、以下の点にご注意ください。

注意点①

一度、院内指導用ハンドルに装着したペリオブラシ(替ブラシ)、歯間ブラシのヘッド部分はルシエロ歯間ブラシのハンドルに再装着しないでください。

院内指導用ハンドルは、滅菌対応とするため歯間ブラシと比べ高強度な材質を採用しており吻合部が緩み、脱落する恐れがあります。

〈例〉



注意点②

ペリオブラシ(ヘッド部分)を交換する場合は、必ず専用の着脱ケースをご使用ください。専用の着脱ケースを使用せず着脱した場合は、ハンドルとブラシの嵌合部が破折しハンドルが使用できなくなる恐れがあります。専用の着脱ケースは別売の「ルシエロペリオブラシ替ブラシ(医院用)NO.1T(10個入り)」などに付属しています。

着脱
ケース




ヘッドの付け方

押しながら
カチッ

ヘッドの外し方

▲必要に応じて各ブラシを着脱ケースにセットし、ふたを開けます。

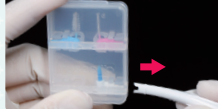

*着脱ケースは、「ルシエロ歯間ブラシ(ハンドル付き)」/「ルシエロ歯間ブラシ替ブラシ(4個入り)」にも付属されています