


サリバチェック ラボ

歯周病原細菌・う蝕関連細菌 検査サービスキット



Since 1921
100 years of Quality in Dental

お口の健康診断 はじめませんか？

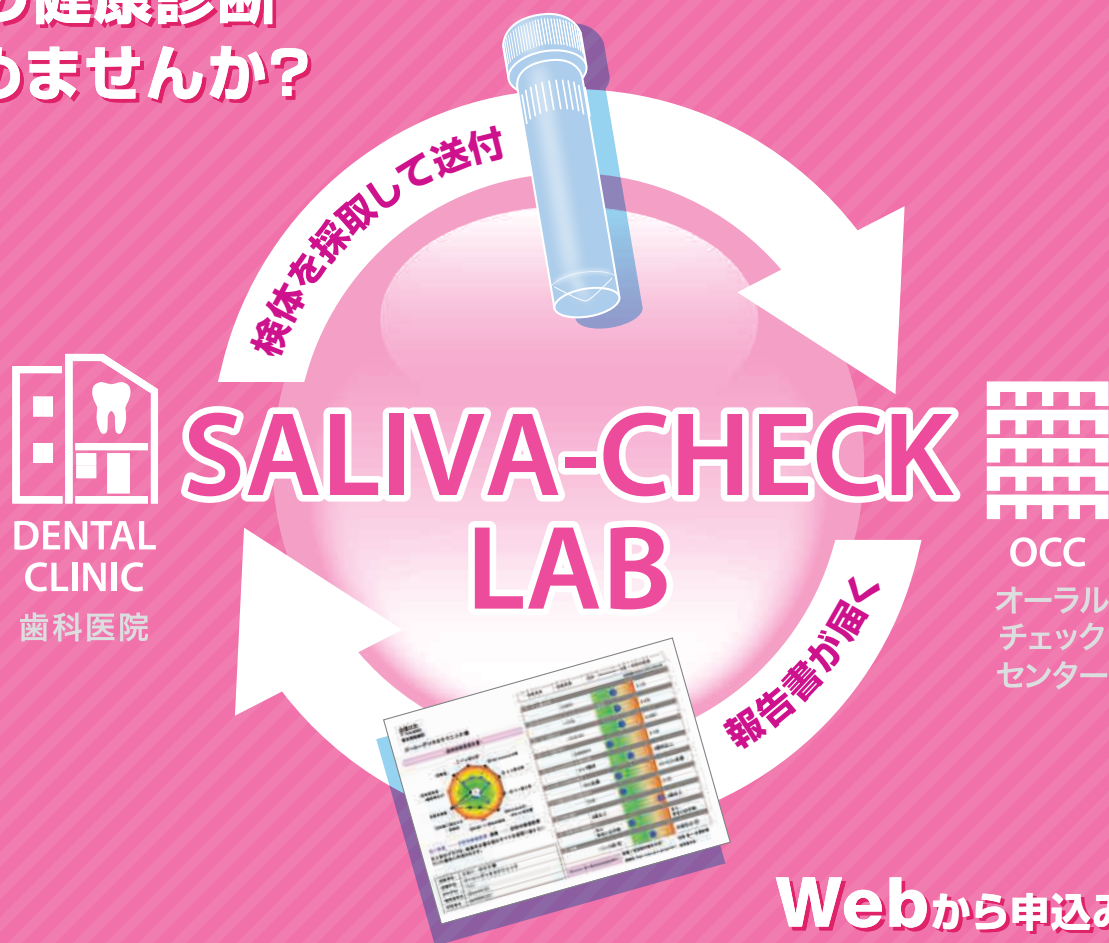

Webから申込みできる！
リアルタイムPCR法で菌数を測定

口腔内細菌検査サービス

ジーシー サリバチェック ラボ



歯周病原細菌

包装●検査申込書1枚、検体輸送容器1本、検体輸送容器用ビニール袋1枚、検体送付用封筒1枚、使用説明書1枚、患者案内用紙1枚、QRコードラベル3枚綴1枚、ガム1個、唾液採取カップ1個、スポイト1本



う蝕関連細菌

包装●検査申込書1枚、検体輸送容器1本、検体輸送容器用ビニール袋1枚、検体送付用封筒1枚、使用説明書1枚、患者案内用紙1枚、QRコードラベル3枚綴1枚、ガム1個、唾液採取カップ1個、スポイト1本

専用サイトは
コチラ



ジーシー オーラルチェックセンターは臨床検査技師等に関する法律に基づく衛生検査所です。よって、ご依頼頂いた検査の数値結果をご報告することが業務内容であり、医行為としての診断行為を含まない事をご承ください。この検査結果は診断を確定するものではなく、臨床症状・生活習慣・既往症等と併せ、総合的に診断して頂くうえでのひとつのツールとしてご利用ください。

リスクチェックや説明ツールに

検査できる菌種

歯周病原細菌

レッドコンプレックス3菌種を含む最大5菌種まで自由に選択可能。

P.g.菌 (P. gingivalis)

慢性歯周炎の発症に関連が深い菌

T.d.菌 (T. denticola)

慢性歯周炎の発症に関連が深い菌

T.f.菌 (T. forsythia)

慢性歯周炎の発症に関連が深い菌

A.a.菌 (A. actinomycetemcomitans)

侵襲性歯周炎の発症に関連が深い菌

P.i.菌 (P. intermedia)

思春期性や妊娠性歯周炎の発症に関連が深い菌

Red Complex レッドコンプレックス

重度の歯周病に影響がある
と言われている3菌種。

P. gingivalis
T. denticola
T. forsythia

Blue Complex

Purple Complex

Green Complex

Orange Complex

Yellow Complex

SIGMUND S.SOCRANSKY, ANNE D.HAFFAJEE

Dental biofilms: difficult therapeutic targets Periodontology 2000, vol.28, 2002, 12-55

う蝕関連細菌

3種類のう蝕関連細菌を1度に検査

S. mutans 菌

カリエス発生に大きく影響している菌

S. sobrinus 菌

カリエスの増大に大きく影響している菌

Lactobacillus 菌

二次カリエスに大きく影響している菌

検査の流れ

検体採取

歯周病検査

口腔内全体を
検査する場合



唾液の採取

特定の
歯周ポケット内を
検査する場合



歯周ポケット内の
歯肉溝滲出液の採取


う蝕検査



唾液量の測定と採取

検査申込

Webの場合

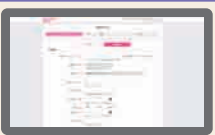

検査申込画面にキットNo.、
検体情報・問診情報を入力

検査申込書の場合



申込書に問診情報を記入

検体の送付



QRコードラベルを貼付



検体輸送容器と
検査申込書を郵送

検査報告書の送付

検体到着後6営業日

Webの場合

Web上ですぐに
確認できる



メールでお知らせ

検査申込書の場合




- 報告書
- 検査項目の解説
- 報告書の見方

報告書一式を発送

詳しくわかりやすい「検査報告書」

歯周病検査報告書

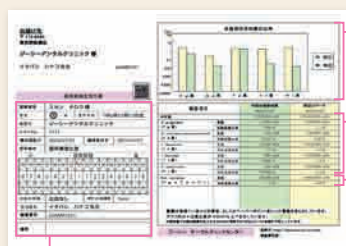

各歯周病原細菌比率
のグラフ

各細菌数 (cell数) と
対総菌数比率


「レッドコンプレックス」
のまとめ

※P.g.菌、T.d.菌、T.f.菌の
3菌種を全て測定した
場合のみ。

基本情報


検体に歯肉溝滲出液を選択した場合は、
採取部位が記載されます。

歯周病のなりやすさ 前回の検査結果

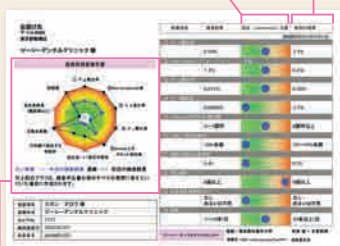

レーダーチャート

う蝕検査報告書

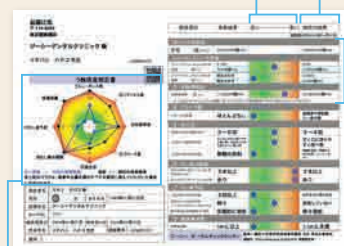

レーダーチャート

総レンサ球菌数と
各種菌数
および比率

前回データが記載されるため、口腔内の変化がわかりやすい。

※掲載情報は2024年4月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

