

スチームクリーナー(イオン交換器)を正しくお使いいただくために


スチームクリーナーのイオン交換器・スチームの臭いについて

イオン交換器が新しい場合や長期間ご使用した場合に、イオン交換器やスチームから臭いが生じることがありますが、これはイオン交換樹脂と水が長時間接触して滞留したことにより発生するアミン臭（魚の腐敗臭のようなにおい）であり、異常ではありません。通常 2～3 日すると自然となくなりますが、臭いが気になる場合は、以下の方法で軽減できますのでお試しください。

■ イオン交換器の使用前に通水をしてください

- 未開封のイオン交換器を使用する際は、**使用前に以下の方法**を参考に**通水**をしてください
 - ・ 使い始めのイオン交換器自体の臭いやスチームの臭いを軽減することができます。
 - ・ 使用していて臭いが気になる場合も、通水していただくことで臭いが軽減されます。

通水方法

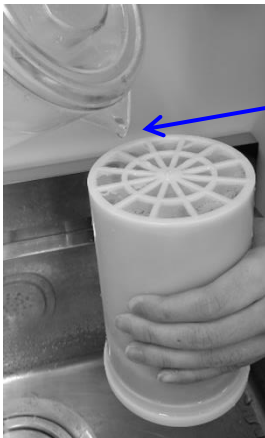

- イオン交換器の**底**から、ピッチャーなどを用いて**水道水を 3L** 流し入れてください。
- 水道の蛇口から水を直接入れる場合は、目安として**4 分**程度連続して水を流してください。

■ 長時間使用しないときは給水タンクの水を捨ててください

- **休業日前など長時間（目安として 48 時間）**ご使用にならない場合は、スチームの臭いの発生を防ぐため、**給水タンクおよびイオン交換器内の水を捨ててください**。水を捨てた後は、イオン交換樹脂が乾燥しないよう、イオン交換器を給水タンク内に戻し**給水タンクのキャップは閉めておいてください**。
 - ・ 滞留した水とイオン交換樹脂の接触により発生する臭いを防ぐ効果があります。
 - ・ 給水タンク内が汚れている場合は、清掃をしてください。