

スーパーらくねる Fine

アルジネート印象材・石こう自動練和器

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

使い始めたその日から、
簡単操作で均一な仕上がり。



高機能、かつ診療空間にマッチする
シンプルなデザイン。



簡単

簡単操作
セットして
スタートキーを
押すだけ。

均一

なじませ不要
ムラのない
仕上がり。

2WAY

アルジネート印象材
&
石こう
これ1台で練和OK!

アルジネート印象材・石こう自動練和器
スーパーらくねる Fine



扉はスケルトンタイプで視認性の高さがポイントのデザイン。
どなたでも簡単に操作できます。



STEP 1 アルジネート/石こうの練和モードを選びます。



STEP 2 練和時間をセットします。



STEP 3 練和カップに、水→粉末の順に入れ、フタを確実にロックします。



STEP 4 練和カップをセットします。



STEP 5 スタートキーを押して練和開始。



STEP 6 付属のスパチュラで一度に取り出せます。

それぞれの特性に合わせた練和モードと、
ブレードの形状が、事前に水と粉末をなじ
ませる手間を省きました。




アルジネート印象材の練和カップ

練り上がりの比較検証

手練り

スーパーらくねる Fine

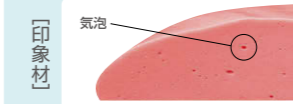

練和の立ち上がり時に
充分攪拌され、さらに可
変式回転(2段階回転方
式)のパワフルな加速と
遠心力により、短時間
で気泡のない均一な練和
ができます。



石こう

専用計量器での混水比と練和時間

アルジネート印象材 (アローマファインミキサータイプ)

水	+	粉末	→	練和時間
1杯	+	1杯	→	15秒
1杯	+	2杯	→	15秒
2杯	+	2杯	→	20秒

水1杯は40ml、粉末1カップは8.4gです。

石こう (ニューブラストーン)

水	+	粉末	→	練和時間
1杯	+	1杯	→	12秒
1杯	+	2杯	→	15秒
1杯	+	3杯	→	15秒

水1杯は12ml、粉末1カップは約25gです。

スーパーらくねる Fine 製品仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	380VA
ヒューズ	10A×2個(φ6.4×30mm)
回転方式	自転、公転方式
設定時間	10秒～60秒 (アルジネートモード、石こうモード各3メモリー)
練和容量	アルジネート印象材 アルジネート共用粉末計量器1杯～3杯 (水を含む総重量上限90g)
	石こう ストーン共用粉末計量器2杯～4杯 (水を含む総重量上限135g)
寸法	幅260mm×奥行260mm×高さ340mm
重量	21.5kg

包装●一式：本体 1台、アルジネート印象材用練和カップ 1個、石こう用練和カップ 1個、専用スパチュラ(アルジネート印象材用) 1本、専用スパチュラ(石こう用) 1本、アルジネート共用計量器(粉用・水用) 各1個、ジーシー ストーン共用計量器(粉用・水用) 各1個、六角レンチ 1個

歯科用印象材混和器(歯科技工用真空攪拌器) スーパーらくねる(型式:Fine)
一般医療機器 13B1X00155000022



別売

アルジネート印象材用練和カップ 1函：2個
石こう用練和カップ 1函：2個
専用スパチュラ(アルジネート印象材用) 1本
専用スパチュラ(石こう用) 1本

関連製品

印象材

自動練和器専用アルジネート印象材

ジーシー アローマファイン ミキサータイプ

水とのなじみやすさを大幅に向上させた、自動練和器専用のアルジネート印象材です。



包装●

1函：粉末5kg(1kg×5)

歯科用アルギン酸塩印象材

ジーシー アローマファイン ミキサータイプ

管理医療機器 219AFBZX00193000

連合印象用アルギン酸塩印象材

ジーシー アローマインジェクション



カートリッジタイプの連合印象用アルジネート印象材。狙ったところに留まり、圧をかけると細部に広がります。

包装●

1函：カートリッジ64g(50mL)2本
※ミキシングチップⅡ・ミキシングチップSS用ノズルは別売です。

歯科用アルギン酸塩印象材

ジーシー アローマインジェクション

管理医療機器 301AKBZX00058000

寒天印象材

ジーシー アローマロイド



コシの強さとすぐれたチキントロピー性が、精度の高い印象採得を実現します。

包装●

カートリッジタイプ1函：48本入
シリンジタイプ1函：60本入(5/16インチ)
シリンジタイプ1瓶：90本入(5/16インチ)
※ストレージ温度60℃～63℃

歯科用寒天印象材

ジーシー アローマロイド

管理医療機器 219AFBZX00062000

石こう

硬石こう<模型用>

ジーシー ニュープラストーンⅡ

水の比率が少ないにもかかわらず、ダマにならないクリーミーな練和性により気泡の巻き込みが少ない硬石こうです。



色調●2色=グレー、イエロー

包装●

シンプルパック1函：3kg(1.5kg×2)

18kgパック1函：3kg×6

1ペール缶：18kg

※18kg/パック、18kgペール缶の色調はイエローのみ

歯科用硬質石こう ジーシー ニュープラストーンⅡ

一般医療機器 13B1X00155000208

硬石こう<模型用>

ジーシー ニュープラストーンⅡ LE

「硬化膨張率0.08%」を実現し、寸法精度の高い模型を作製することができます。



色調●2色=イエロー、ベージュ

包装●

シンプルパック1函：3kg(1.5kg×2)

18kgパック1函：3kg×6

1ペール缶：18kg

歯科用硬質石こう ジーシー ニュープラストーンⅡ LE

一般医療機器 13B1X00155000206

※掲載情報は2024年4月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※会社名・製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

