

ジーシー テンプスマート

デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンポジット




Since 1921
100 years of Quality in Dental

テンポラリー製作にオートミキシングの提案

TeC製作をコンポジットレジンで 簡単に製作！

NEW BW (ブリーチングホワイト) が
追加されました！

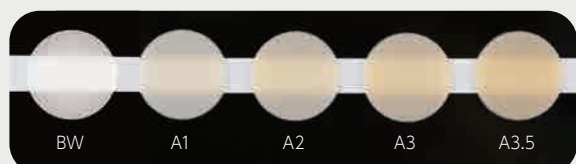

※BWは48mLカートリッジ仕様のみ



保険適用

カンタン操作 × MMAフリー

材料を選ばず簡単に
追加築盛やリペアー可能




▲ 製作例はコチラ ▲



簡単

オートミキシングで簡単製作

テンブスマートは、オートミキシングタイプの暫間修復用コンポジット。常温重合レジンのように粉液の計量や混和、片付けが不要。ミキシングチップを装着して押し出すだけで気泡のない均一に練和されたペーストが得られます。

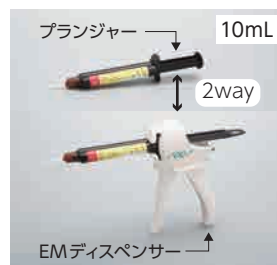

作業時間を大幅短縮

支台歯形成前に採得した印象を用いることで、形態修正や研磨時間を大幅に短縮でき安定したクオリティの高い暫間修復物が簡単に製作できます。またデュアルキュアタイプのため、最終重合を光照射で行うことにより硬化時間を短縮することができます。

印象材の種類を選ばず製作が可能

可塑剤を含まないため吸熱されにくくアルジネート印象材、シリコーン印象材等、あらゆる印象材を使用することができます。



他の材料でも追加築盛やリペアーが可能


テンブスマート、常温重合レジン、フロアブルコンポジットレジンを使用することができます。

優しい

MMAフリーで刺激臭なし

発熱量少なく患者への負担軽減


MMAを含まないコンポジットレジン組成の採用により、特有の刺激臭がありません。重合時の発熱量も自社常温重合レジンよりも少ないため、患者さんの負担が軽減されます。

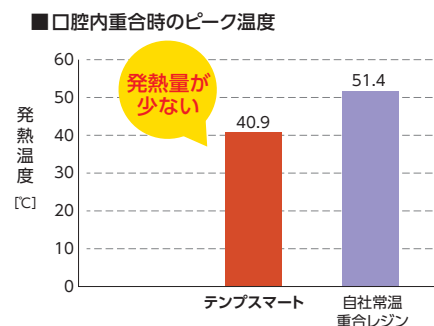

高い物性

高い適合性と高精度


自社常温重合レジンに比べて低収縮のため、高い適合性を発揮します。重合時の変形が少なく、単冠からブリッジまであらゆるケースで高い精度が保たれます。

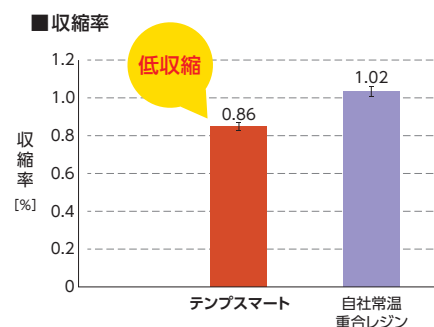


長期の使用にも最適

高い曲げ強度と優れた耐摩耗性、そして艶維持性を兼ね備えているため、装着期間の長いプロビジョナルレストレーション症例にも最適です。


■曲げ強さ

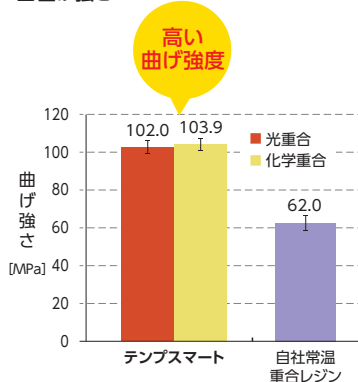

■耐咬合摩耗性

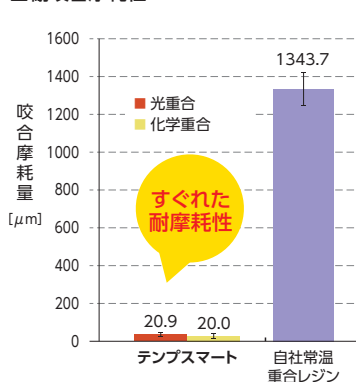

■艶維持性

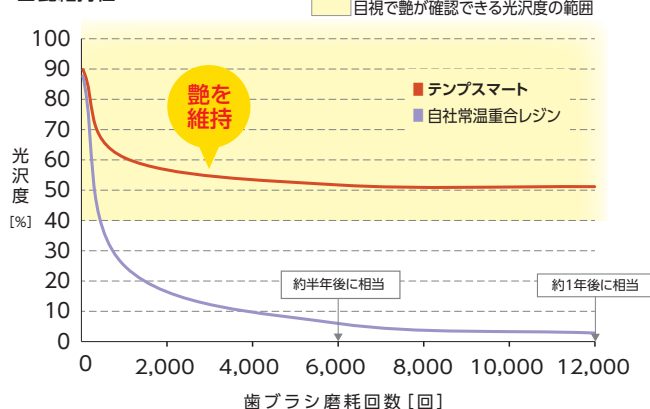

■ 直接法による暫間修復物の製作



術前
支台歯を形成する前。



印象採得
支台歯を形成する前に
印象を採得します。

アルジネート
印象材も
使えます



支台歯形成
印象採得後に支台歯形成を行います。
次にアンダーカットの除去、分離剤の塗布を
行います。



ペースト（テンプスマート）注入
採得した印象（コア）にペーストを注入します。



印象（コア）を支台歯へ装着
ペーストを注入した印象（コア）を支台歯へ装
着します。（ペースト注入開始から45秒以内
に装着）

※口腔内での透明シエルなどを用いた光照射に
よる重合は行わないこと（火傷の恐れがある
ため）



暫間修復物を支台歯から撤去
ペースト注入開始から2分～2分30秒の間に、
硬化した暫間修復物を支台歯から外し余剰部
を除去します。

※必ずペースト注入開始から2分～2分30秒の
間に支台歯から外すこと（硬化が進むと外れ
なくなる恐れがあるため）



最終重合
1歯当り5秒間咬合面から光照射します。
光照射を行わない場合は、ペースト注入開始
から5分以上待ちます。



仮着
形態修正・研磨・咬合調整を行い、仮着します。

■ 間接法による暫間修復物の製作



術前
スリーインサイズで3歯ブリッジの症例。



ワックスアップ
歯肉をカットし、落ち着いたところに診断用
ワックスを製作します。



印象採得
透明シリコン（エクザクリア）を用いて
ワックスアップの印象採得を行います。



ペースト（テンプスマート）注入
採得した印象（コア）にペーストを注入します。



光照射
模型に圧接し光照射します。
光照射を行わない場合は、ペースト注入開始
から5分以上待ちます。



仮着
形態修正・研磨・咬合調整を行い、仮着します。



最終補綴
イニシャルLiSiプレスで最終補綴装置を製作。

エクザクリア



追加築盛、リペアーの方法

テンプスマートを使用



常温重合レジンを使用



例：ユニファストⅢ

フロアブルコンポジットレジンを使用



フロアブルコンポジットレジンを使用
（例：グレースフィル ローフロー）

※追加築盛・リペアー・ウォッシュの前に必ず新鮮面を出してください。（唾液が付着すると接着力が著しく低下します）

※接着面積が小さい場合は、シランカップリング材「G-マルチプライマー」との併用を推奨します。

デュアルキュア型テンポラリーC&B用コンボジット

ジーシー テンプススマート

10mLカートリッジ



10mLカートリッジ

色調●4色=A1, A2, A3, A3.5

包装●1函：カートリッジ(10mL) 1本、EMミキシングチップT 10本

歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ ジーシー テンプススマート
管理医療機器 226AABZX00140000

別売




10mLカートリッジ用

ジーシー EMディスペンサー

包装●1函：1個

10mLのカートリッジは、プランジャーを外して
EMディスペンサーに装着しても使用できます。

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー EMディスペンサー
一般医療機器 13B1X00155000187
製造販売元 株式会社ジーシー

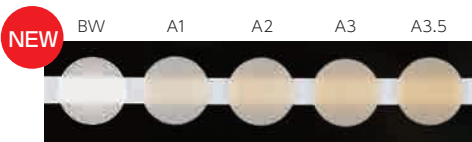

48mLカートリッジ



48mLカートリッジ

色調●5色=BW, A1, A2, A3, A3.5

包装●1函：カートリッジ(48mL) 1本、ミキシングチップII (SSS) 16本

別売



48mLカートリッジ用

ジーシー カートリッジディスペンサーII

包装●1函：1個

48mLカートリッジは、カートリッジディスペンサーIIで使用
します。

歯科用練成器具 ジーシー カートリッジディスペンサーII
一般医療機器 23B2X00038000019

【関連製品】



咬合採得／多用途透明シリコン印象材

ジーシー エクザクリア

包装●2カートリッジ 1函=カートリッジ51g(48mL) 2本、ミキシングチップII L、S各3個

歯科咬合採得用材料(歯科印象採得用器材) ジーシー エクザクリア
一般医療機器 13B1X00155000286
製造販売元 株式会社ジーシー

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2023年11月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。


ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも

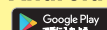

ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OS/バージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



BE026B2309