

ARTIFICIAL DERMIS FOR PLASTIC SURGERY
AND MUCO-GINGIVAL SURGERY

TERUDERMIS®

テルダーミス® 真皮欠損用グラフト

コラーゲン使用人工皮膚




ジーシー
バイオマテリアル
Official Site


GC

- 1 低抗原性**
テロペプチド部分を消化切断した、抗原性の少ないアテロコラーゲンを原材料としています。
- 2 高い生体親和性**
熱処理による架橋のため、アテロコラーゲン本来の生体親和性を損ないません。
- 3 自己組織構築**
本品に周囲から細胞が侵入することで真皮様組織（肉芽様組織）を構築します。
- 4 すぐれた密着性**
創面への密着性にすぐれています。
- 5 深部組織対応**
深い創面（骨、腱、筋肉等の露出部位）に使用できます。

品種と構造

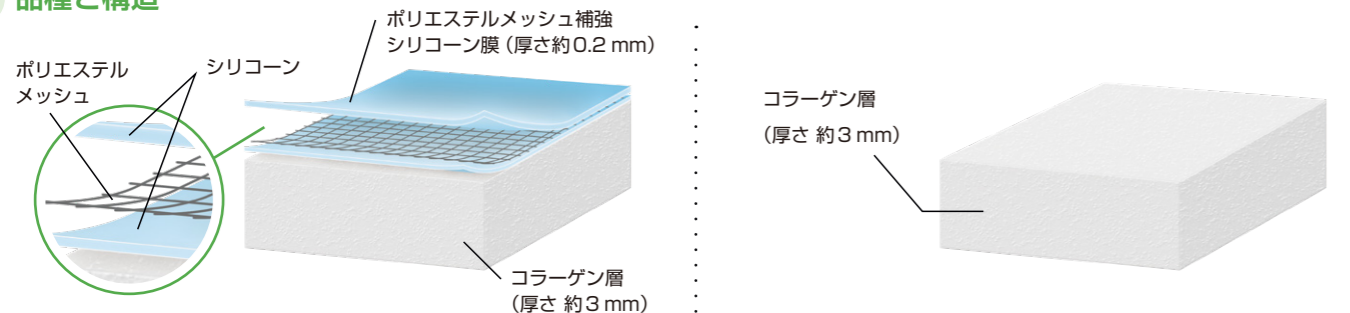

粘膜欠損の修復例

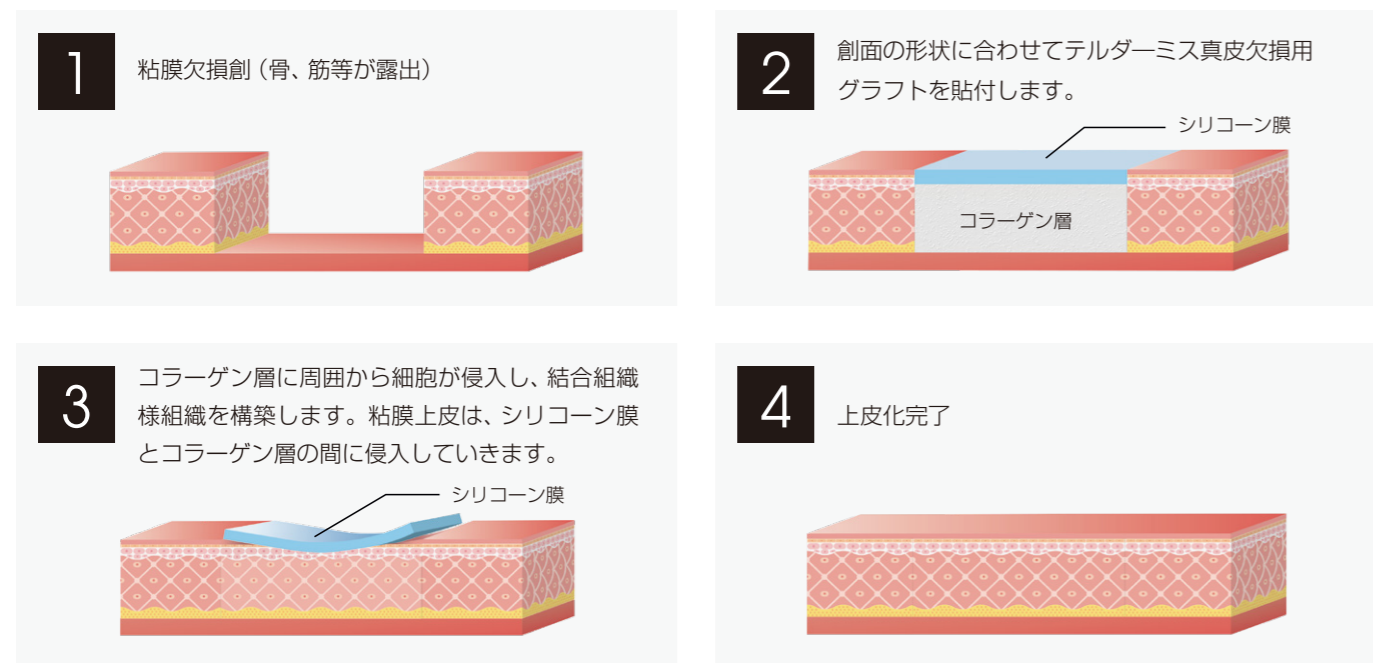


6施設、96症例にテルダーミス真皮欠損用グラフトを適用し、その有用性を検討した。皮膚全層欠損創67例、口腔粘膜欠損創27例、陥凹部補正修復例2例の計96例を対象とした。皮膚全層欠損創67例の内、50例には薄い分層植皮を行った。

1) 評価方法

全症例に対し、以下の4項目で評価した。
肉芽形成／密着度／鎮痛効果／浸出液の度合
また、植皮実施例ではさらに以下の4項目を加えて評価した。
生着の度合／生着の割合／拘縮の度合／拘縮の影響

2) 有効性評価結果

有効性を「著効」、「有効」、「やや有効」、「無効」、「判定不能」の五段階で判定した。「著効」及び「有効」の割合は、皮膚全層欠損創においては67例中32例（48%）、口腔粘膜欠損創においては27例中23例（85%）、陥凹部補正修復例においては2例中2例（100%）であった。

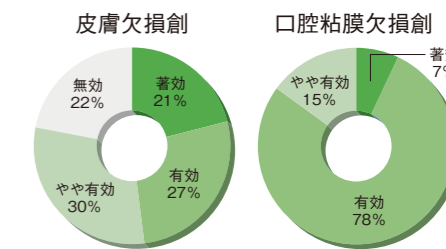


3) 安全性評価結果

本品に起因する臨床検査値の異常変動又は副作用は全例において見られなかった。

4) 総合評価結果


有用性を「極めて有用」、「有用」、「やや有用」、「有用性なし」の四段階で判定し、「極めて有用」及び「有用」の割合は、皮膚全層欠損創においては67例中35例（52%）、口腔粘膜欠損創においては27例中24例（89%）陥凹部補正修復においては2例中2例（100%）であった。

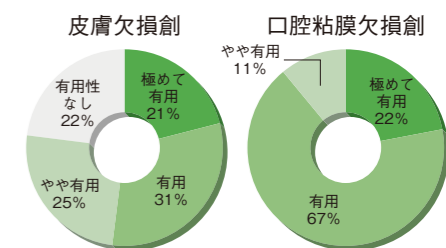


5) 植皮実施例の評価結果

皮膚全層欠損創67例の内、薄い分層植皮を行った50例について以下の相関を確認した。

テルダーミス適用後植皮までの時間と生着の度合

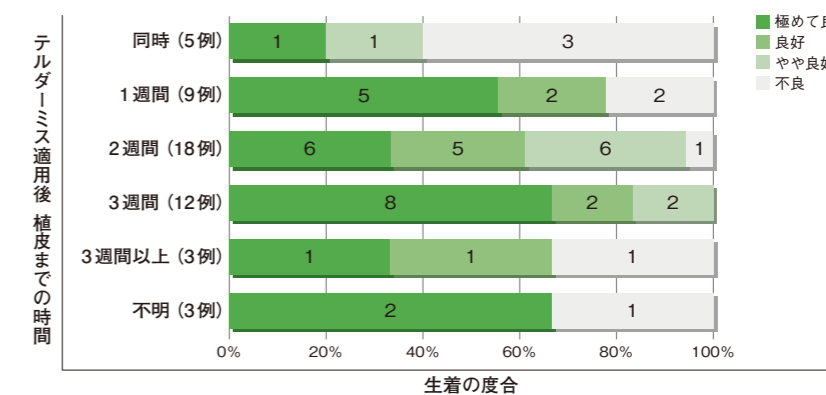

生着の度合と拘縮の度合

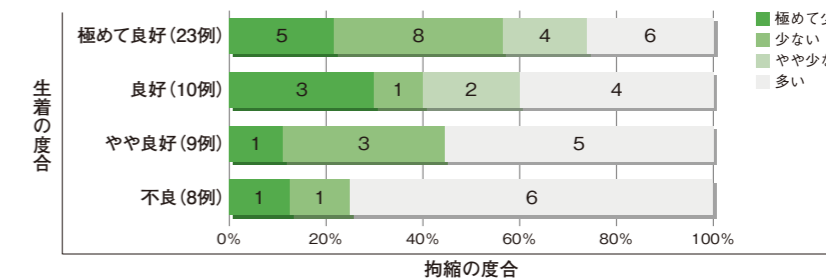

引用文献

- 1) 大浦武彦, 他: 「皮膚欠損用グラフト (SS-D) の臨床使用」, Therapeutic Research, 13 (4) :1655-1670, 1992.
- 2) 石田寛友, 他: 「皮膚欠損用グラフト (SS-D) を用いた臨床使用例の検討」, 基礎と臨床, 26 (4) :1574-1584, 1992.
- 3) 平山 峻, 他: 「皮膚欠損用グラフト (SS-D) の臨床使用経験」, Therapeutic Research, 13 (5) :2005-2017, 1992.

コラーゲン使用人工皮膚

テルダーミス® 真皮欠損用グラフト

再使用禁止 使用期限3年

種類●6種=TD-M006S メッシュ補強タイプ、TD-M013S メッシュ補強タイプ、
TD-M025S メッシュ補強タイプ、TD-A006N コラーゲン単層タイプ、
TD-A013N コラーゲン単層タイプ、TD-A025N コラーゲン単層タイプ

サイズ●3種=2.5×2.5 cm、2.5×5 cm、5×5 cm

包装●2.5×2.5 cm 1函:5個
2.5×5 cm 1函:1個
5×5 cm 1函:1個

コラーゲン使用人工皮膚 テルダーミス真皮欠損用グラフト
高度管理医療機器 20400BZZ00406000



テルダーミス 実寸サイズ

2.5×2.5 cm

2.5×5 cm

5×5 cm

製品は「ジーシー バイオマテリアル Online Shop」から
ご購入をお願いいたします。

※初めてのご購入の際は、新規会員登録が必要となります。

ジーシー バイオマテリアル
Online Shop



※掲載情報は2026年4月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

ジーシー バイオマテリアル コールセンター

 **0120-782788**