

**【警告】**

＜適用対象（患者）＞

1. 本品を使用中に、急激な体温上昇などがあられ感染が疑われた患者 [感染を悪化させる可能性がある。]

＜使用方法＞

1. 本品自体は抗菌性がないため、感染のおそれのある創に使用する場合は、抗生剤の投与などの適切な処置を施すこと。[感染を悪化させる可能性がある。]
2. 過度の充填は避けること。[圧迫痛の可能性がある。]

**【禁忌・禁止】**

・再使用禁止

＜適用対象（患者）＞

・既往に過敏症のある患者 [本品は動物由来のタンパク質を使用している。]

**【主要文献】**

- 1) 水木信之, 他: ザクインテッセンス, 15 (6): 220, 1996
- 2) 小笠原健文, 他: 日本口腔インプラント学会誌16 (4): 494, 2003

ジーシー バイオマテリアル Online Shop  
会員登録・製品のご購入はこちらから。



<https://www.biomaterial-ec.gcdental.co.jp/shop/default.aspx>

**0120-782-788** (受付時間: 9:00 ~ 19:00 (土日・祝日は除く))

※掲載情報は2023年9月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

掲載製品のお問い合わせ専用フリーダイヤル

**フリーダイヤル 0120 782-788**

# TERUPLUG®




Since 1921  
100 years of Quality in Dental


## テルプラグ®

コラーゲン使用吸収性局所止血材

### ATELO-COLLAGEN SPONGE FOR RIDGE PRESERVATION

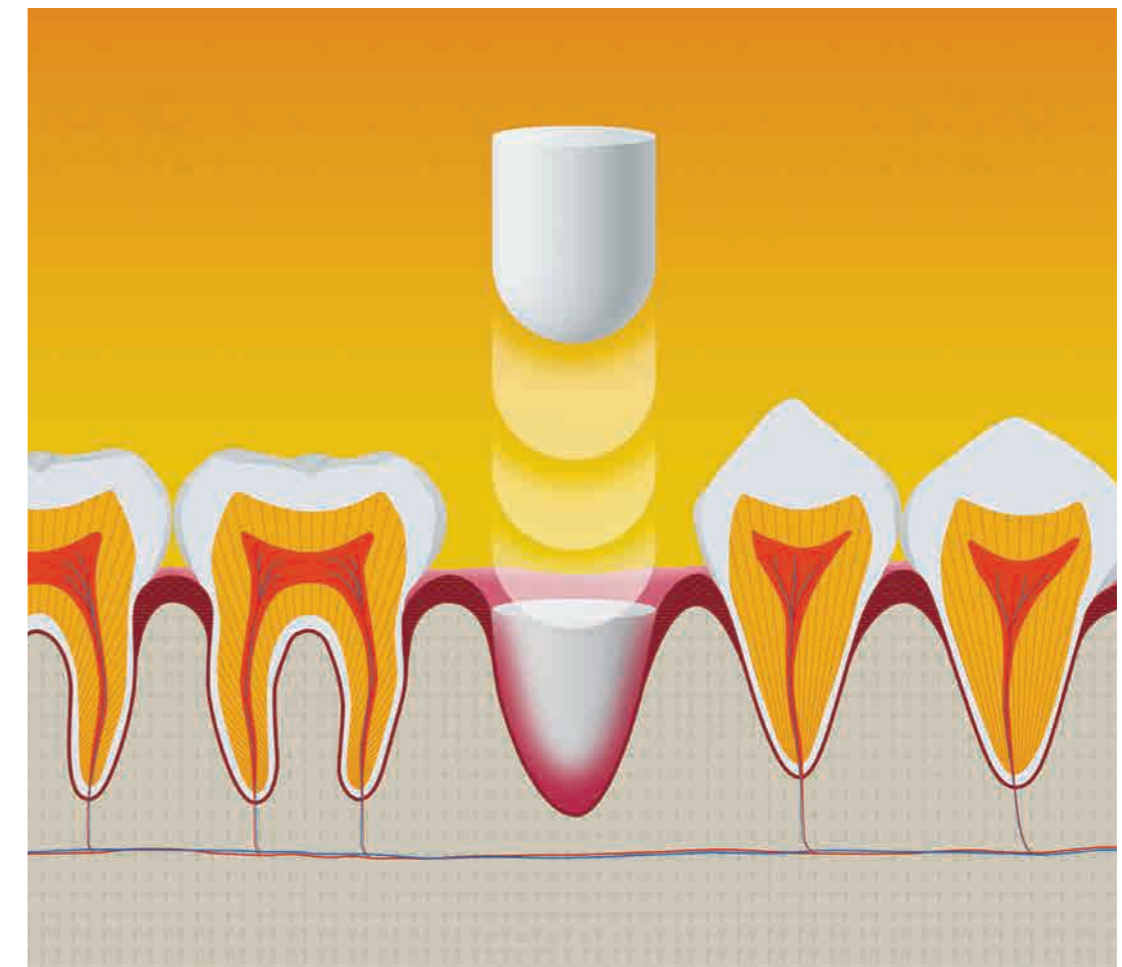

# テルプラグは、抗原性の少ないアテロコラーゲンを 使用したもので、 歯槽骨が露出した抜歯創へ充填し、創面保護ならびに肉芽形成を促す抜歯創用保護材です。

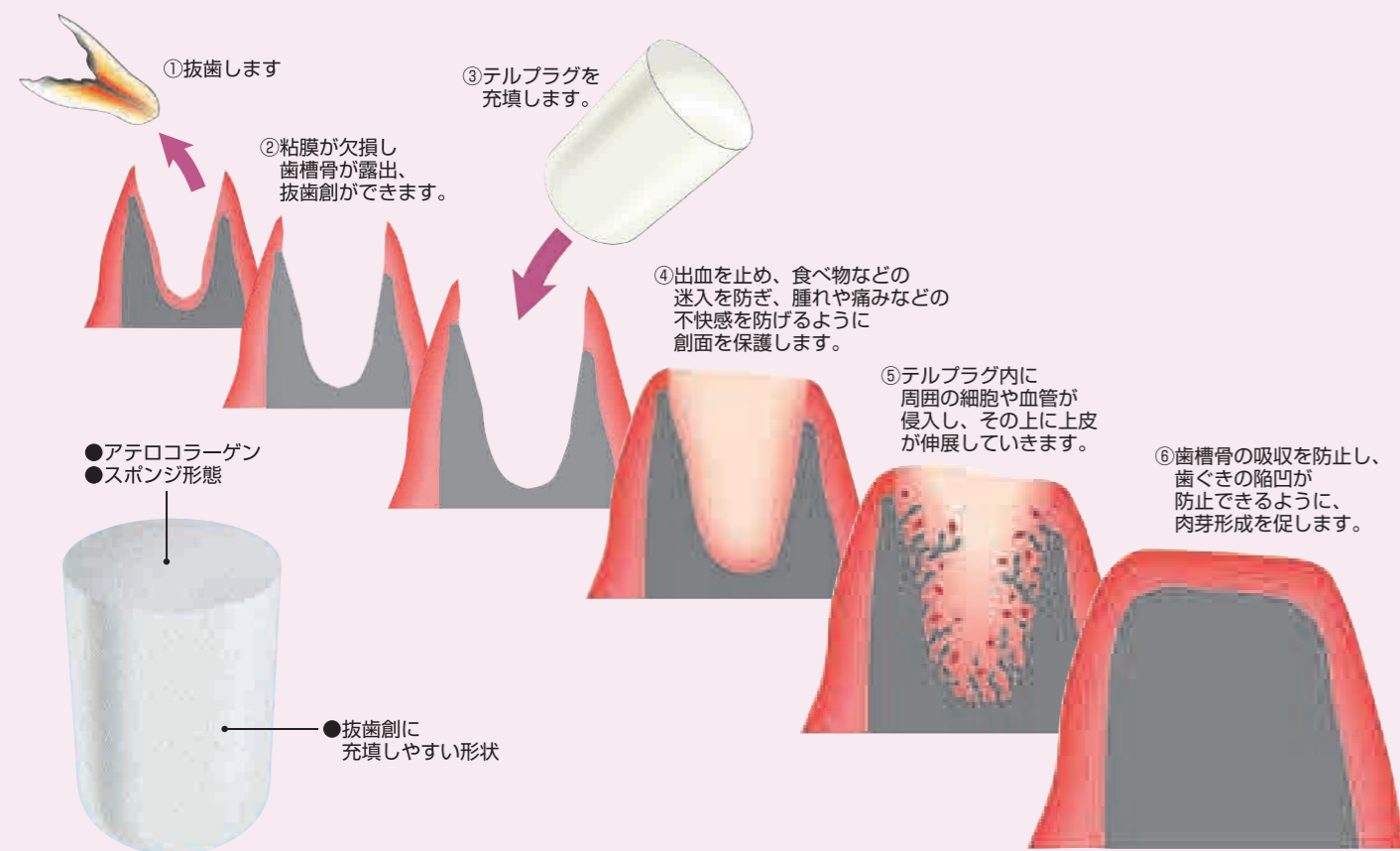

## 特長

テルプラグは、歯槽骨が露出した抜歯創へ充填し、創面保護ならびに肉芽形成を促す抜歯創用保護材です。原料に抗原性の少ないアテロコラーゲンを使用したスポンジ形態の製品で、抜歯創に充填しやすい形状をしています。

## 特性

1. 抜歯創に充填することにより、止血、迷入防止等の創面保護、肉芽形成を促します。
2. 創面保護効果により疼痛を緩和します。
3. 歯槽骨の吸収防止及び歯槽堤の陥凹が防止できるように、肉芽形成を促します。
4. アテロコラーゲンを原料としているため、抗原性がほとんどありません。

5. 熱処理による架橋のため、コラーゲン本来の生体親和性を損ないません。
6. 無菌製品であり、直ちに使用できます。

## 使用方法

1. 出血の多い場合には、ガーゼ等で抜歯創又は口腔上顎洞瘻部位の血液を十分に拭う。
2. 周囲組織の侵入を促進するために、必要に応じて適用部位の肉芽を搔爬する。
3. 本品を適用部位に充填し、ガーゼ等で軽く押さえて創面に十分密着させる。
4. 必要に応じて縫合又はシーネ等を使用する。
5. 本品は、包装開封後直ちに1回限り使用する。

## 使用目的又は効果


抜歯等により粘膜（歯肉）が欠損し、歯槽骨が露出した抜歯創に本品を充填することにより、止血、迷入防止等の創面保護及び肉芽形成を促す。また、創面保護効果により疼痛を緩和する。  
本品は次の抜歯後の患者に適用する。

- ・疾患等により抜歯後治癒不全が予想される患者
- （血液疾患を有する患者、透析患者、薬物療法中


の患者、肝疾患のある患者、身体的又は精神的な障害のため咬合止血が困難な患者等）

- ・後出血
- ・抜歯窩再搔爬
- ・上顎洞口腔瘻
- ・難抜歯、埋伏歯


## 基本操作

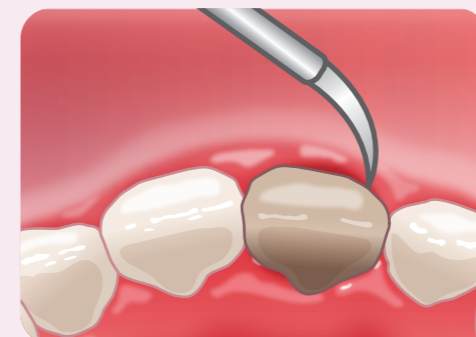


麻酔後、メスなどで歯と歯肉を切り離します。

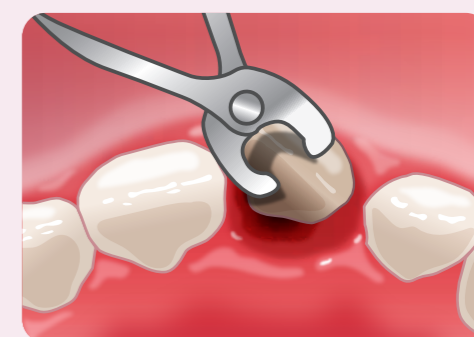

周囲の骨を傷つけないよう注意しながら抜歯します。

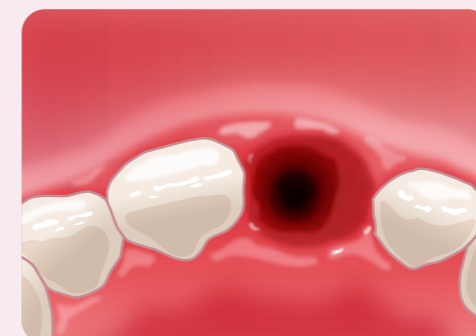


歯肉に穴が開き、歯槽骨の中にまで達する深い穴が開きます。

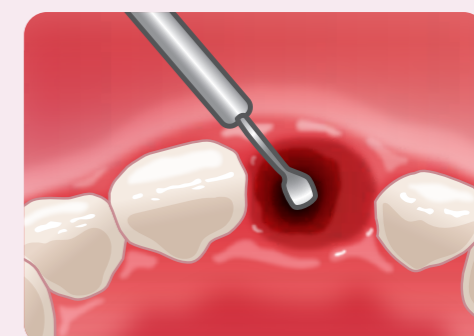

骨面を露出させるため、汚れやうみの袋などを掻き出します。



骨の穴に入り込んだ歯肉の端も外側に掻き出します。

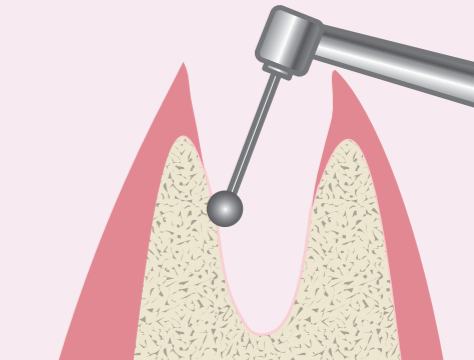

骨面を新鮮にするためにドリルで骨表面を削ることもあります。

※出血が少ないと傷が治りにくいため。

## コラーゲン使用吸収性局所止血材 テルプラグ 〈保険適用外〉

- 種類 ●3種=BH-SS15、BH-S25、BH-M25  
包装 ●  
BH-SS15 1函：10個  
BH-S25 1函：10個  
BH-M25 1函：5個

コラーゲン使用吸収性局所止血材 テルプラグ  
高度管理医療機器 20900BZZ00646000

