

ティオンライト

歯面漂白用加熱装置(歯科重合用光照射器)

医療ホワイトニング ティオン[®]
オフィスホワイトニングの
チェアタイムを短縮




Since 1921
100 years of Quality in Dental



チェアタイムを短縮する2つのモードを搭載


Quickモード NEW

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。

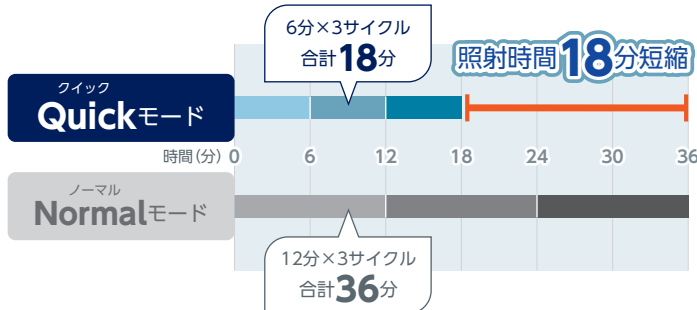

Resinモード NEW

コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。

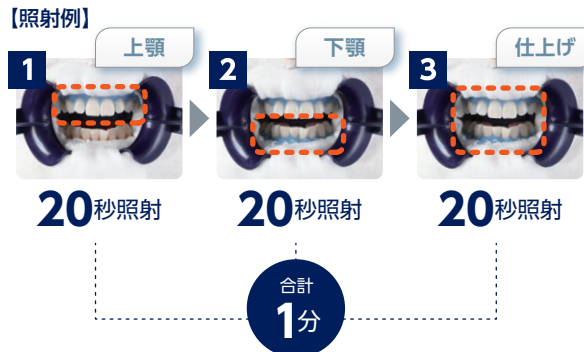


照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	[MODE] ボタンで切り替え
<small>NEW</small> レジン Resin	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
<small>NEW</small> クイック Quick	6分	短時間で行いたいケースに
ノーマル Normal	12分	通常モード
ロウ Low	12分	知覚過敏が心配なケースに

※Resin、Quickは自社従来品からの追加

照射光の波長域

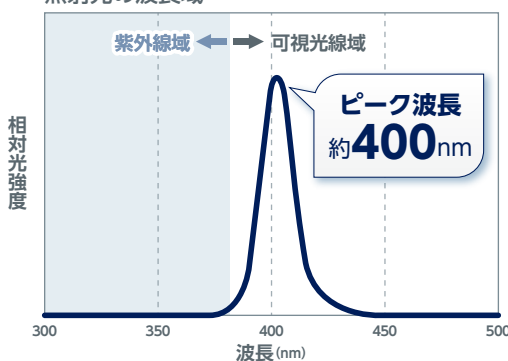

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器)

ティオンライト

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸法	本体高さ 1550mm ベース部 510mm×430mm
重量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395~410nm
照射時間	10秒~20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

包装

本体 1台、マウスガード(ティオンライト用) 2個(本体装着+付属)、保護メガネ(オーバークラスタイプ) 2個、六角レンチ(大(小)) 各1個、電源コード 1本

単品包装

保護メガネ(オーバークラスタイプ) 包装●1個

歯面漂白用加熱装置 (歯科重合用光照射器) ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器
13B1X00155000312

関連製品



歯科用オフィスホワイトニング

ティオン オフィス

包装●オフィスホワイトニング材 シリンジA (1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB (1.0g) 1本、リアクター (2.0g) 1本、歯肉保護レジン (1.5g) 1本、ティスポーザブルティッシュ 1個、ティスポーザブルブラシ2本、ティスポーザブルファイバー付きチップ 2個

単品包装

歯肉保護レジン 包装●1函:1.5g 1本

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

医療ホワイトニング 専用サイトはコチラ



リップジェル
包装●1函:1個 8g



リトラクター
サイズ●2種S、Mサイズ
包装●1函:5個

歯科用開口器 リトラクター
一般医療機器 13B1X00155000199



フェイシャルシート
包装●1函:100枚

※掲載情報は、2024年2月現在のものです。
※製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

