

GC

“ 柔らかいまま & 清潔なまま ”  
“ 盛りやすい & はがしやすい ”

独自の特殊構造とコート材によりティッシュコンディショニング材の弱点を克服!

“ はじめての「ライブピンク」 ”



暫間裏装用レジン

ジーシー ティッシュコンディショナー

# 独自の特殊構造とコート材により従来の弱点を克服!

—— 硬くならない、汚れない、臭くならない ——


柔らかさが、かつてないほど持続します。

柔らかいまま

独自の特殊構造により可塑剤やアルコールが抜けにくいので、従来のように柔らかさが早期に失われて硬くなってしまいう心配がありません。クリープ性(流動変形)によって粘膜の炎症や抜歯窩などの回復にともなう形状変化にも効果的に対応します。

&

清潔なまま

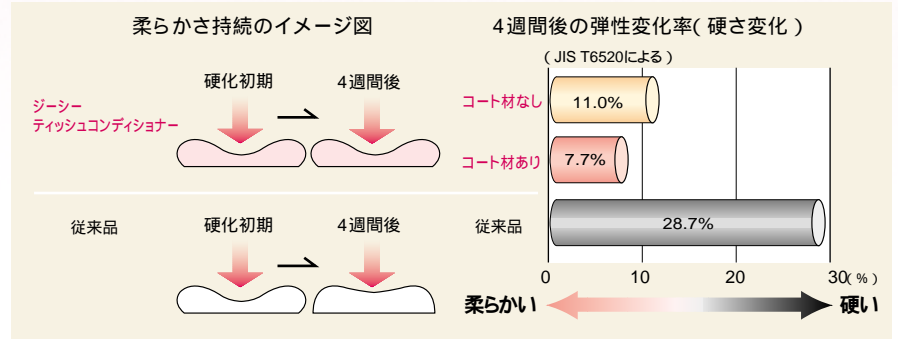


数値(変化率)が小さいほど、弾性(柔らかさを維持する性質)を有します。

良好な表面性状、  
清潔な状態を保ちます。

粉液のなじみが良いため気泡の巻き込みを少なく抑えられるとともに、独自の特殊構造により経時劣化を起こしにくく、良好な表面性状を維持します。さらに、コート材の併用により劣化原因物質の侵入による変色・着色・臭いの発生を防ぎ、クリーンな状態を保ちます。

経過観察(コート材使用)

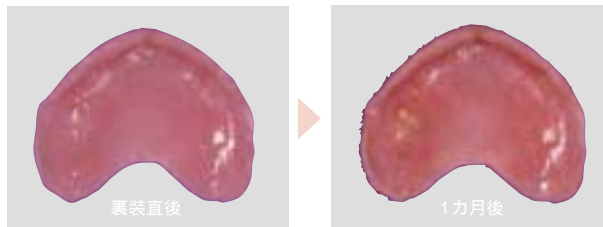

1か月後でも表面が滑らかで良好な装着感を保ち、変色や着色もほとんど見られません。



サーマルサイクル(4℃ ↔ 60℃)  
1,000回後の表面性状




ジーシー ティッシュコンディショナーは材料劣化を起こしにくく、滑らかな表面性状を維持しています。

## 特殊構造イメージ図


従来品

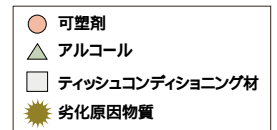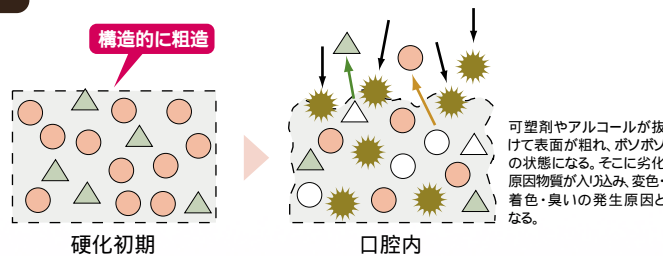

ジーシー ティッシュコンディショナー

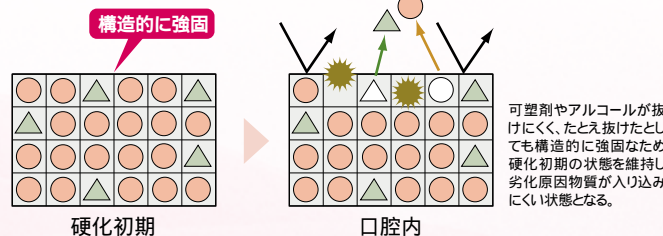

## コート材でしっかりガード

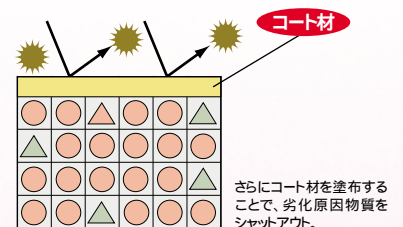

## 今までにない操作性!

盛りやすい!

スピーディに盛上げられます。

粉液のなじみを向上させたので、気泡の巻き込みを抑えるとともに垂れにくく、盛上げに適したちょうど度の混和物がスピーディに得られます。



混和開始30秒後。

&

はがしやすい!

スムーズにはがせます。

材料の劣化が起きにくいいため、引き裂き強度が大幅に向上。そのためチギレにくく、短時間でキレイにはがすことができます。



バーなどで削り取る必要がありません。

### コート材でしっかり接着

辺縁部などのはがれが心配される部位にコート材を使用すると、確実に接着することができます。

強力な接着力を有するため、手ではがすことができなくなりますので、接着部分はバーなどを用いて削り取ります。

経過観察



はがれが心配される辺縁部にコート材を使用。




はがれることなく、しっかりと接着しています。

はじめての「ライブピンク」

## 審美性に優れた「ライブピンク」と厚みの差を判別しやすい「ホワイト」の2色。

審美性に優れ患者さんに喜ばれる新色「ライブピンク」を、ティッシュコンディショニング材として初めて採用しました。また、厚みの差を判別しやすい「ホワイト」も提供していますので、症例や患者さんの要望に合わせて選択することが可能です。

(義歯はアクロン#8を使用)

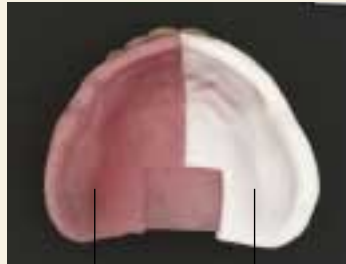

審美性に優れた「ライブピンク」 厚みの差を判別しやすい「ホワイト」



「ライブピンク」は繊維入りで、義歯床の色調と自然に馴染みます。



## 臨床ステップ



1 患者さんの口腔内・義歯をよく観察し、必要に応じて粘膜面を削合します。



2 ライブピンク ホワイト  
症例に合わせて色調を選択してください(液は共通)。



3 粉と液を採取し混和します。粉末計量器1目盛りに対してスポイト2目盛りが標準の配合です。



4 混和開始から約30秒後にペーストを義歯床に盛上げ、口腔内に挿入します。



5 約5分後に口腔内より取り出します。



6 余剰部分をナイフやハサミなどで除去します。



7 唾液の除去・乾燥後、コート材を表面に塗布します。柔らかさが持続し、汚れも付着しにくくなります。



8 完成。

## コート材による接着方法



接着方法.1 盛上げ前に、はがれやすそうな部位(辺縁部など)にコート材を塗布します。



接着方法.2 硬化初期の唾液侵入による接着障害を防止するには、トリミング後に義歯床との境目にコート材を塗布します。



除去方法 コート材を塗布した部位は手ではがすことができませんので、パーやシリコンポイントなどで削除します。



筆の手入れ コート材の使用により、筆が固まった場合は、ティッシュコンディショナーの液で洗浄します。

コート材を接着用途として使用した場合、手ではがせなくなりますので、塗布部分を充分考慮の上ご使用ください。



### 暫間裏装用レジ

## ジーシー ティッシュコンディショナー

色調 2色=ライブピンク、ホワイト

包装 1-1セット1箱:粉末90g 1本、液90g(101mL)1本、コート材12g(15mL)1本、粉末計量器 1個、ボリスポイト(No.1)1本、ラバーカップ(大)1個、プラスチックパチュラ 1本、筆(No.7)1本

単品包装 粉末90g 1本  
液90g(101mL)1本  
コート材12g(15mL)1本

医療用具承認番号 21500BZZ00410000号

色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
掲載の参考データは、2003年10月現在のものです(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品添付の  
説明書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

DIC (デンタルインフォメーションセンター)

東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00am.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)703-3231

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286