

医療ホワイトニング
TiON[®]

ティオン総合カタログ



Since 1921
100 years of Quality in Dental

ティオン オフィス / ティオンライト
ティオン ホーム ウィズ / ティオン ホーム プラチナ



医療ホワイトニングとは



歯科医療機関で



歯科医師・歯科衛生士※1が


※1 歯科衛生士は歯科医師の指導のもと
医療ホワイトニング行為を実施



医療機器製品※2を用いて

※2 過酸化水素または過酸化尿素含有製品／光照射器

歯の内部まで白くするホワイトニングです。

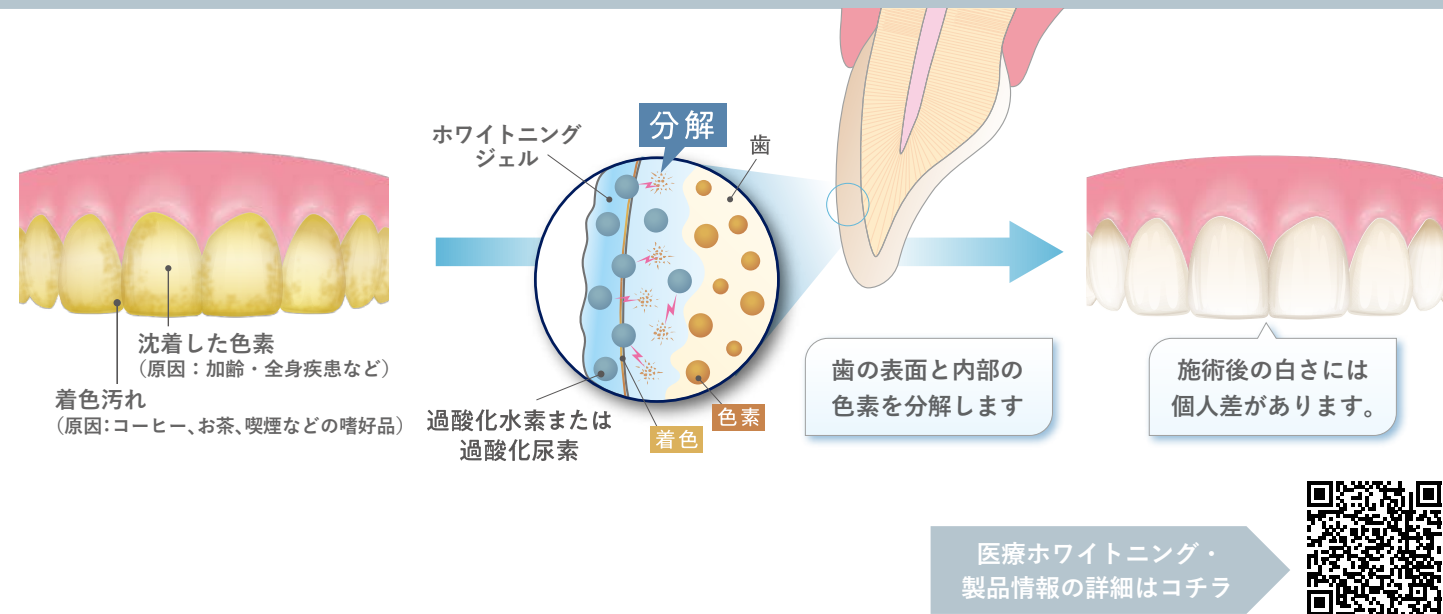

医療ホワイトニング ティオン®は 患者さんに合わせた提案ができます。

オフィスホワイトニング

歯科医療機関で行うホワイトニング。
歯の表面にホワイトニングジェルを塗布し、
光照射によりホワイトニング効果を促進させます。



ホームホワイトニング

ご自宅などで行うホワイトニング。
患者さんの歯列に合わせて作製したマウストレーと
ホワイトニングジェルを用いて歯を徐々に白くします。



歯肉・粘膜保護

リアクター塗布

ホワイトニングジェル
塗布

光照射

歯面清掃



マウストレーの作製

ホワイトニングジェルの
注入

マウストレーの装着

マウストレーの
取り外しと清掃

経過の確認

ティオン オフィス

過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30%

混和

過酸化水素濃度 約23%

成分

ティオン ホーム
ウィズ

● 過酸化水素6%
(過酸化尿素約17%相当)

ティオン ホーム
プラチナ

● 過酸化尿素10%

- 施術時間: 約1~2時間 (1回の施術で最長3サイクル行う)
- 1回の施術で歯を白くする

時間

ティオン ホーム
ウィズ

- 時間: 標準60分 (最長90分)
- 回数: 10回 (10日間)

ティオン ホーム
プラチナ

- 時間: 最長120分
- 回数: 14回 (14日間)

- 1回で効果が得られる
- ホームホワイトニングよりも後戻りしやすい

特徴

- 時間をかけることで白さが長持ちする
- オフィスホワイトニングよりも効果を得るまでに時間がかかる

- 早く歯を白くしたい方 (例: 結婚式を間近に控えている方など)
- マウストレーを装着できない方 (例: 顎位が不安定、嘔吐反射があるなど)
- 無髄歯を白くしたい方 (ティオン オフィスはインターナルブリーチ対応)

おす
の
方

- 自分のペースで歯を白くしたい方
- 片顎のみ白くしたい方

オフィスホワイトニング

ティオン オフィス 低刺激で高いホワイトニング効果

過酸化水素濃度 35%
過酸化尿素濃度 30%

混合

過酸化水素濃度
約23%



豊田中央研究所が開発した
可視光応答型光触媒

V-CAT®のはたらき

光照射されると電子を放出し、過酸化水素と反応することで多くのヒドロキシラジカルが発生するため、着色物質を効率よく分解します。

臨床試験の結果

治験の概要 72名の変色歯を有する成人を対象に、本品を用いて漂白処置を行い、その安全性と有効性の評価を行った。治験の結果について、下記に示す。

- 安全性 漂白処置中、漂白処置直後及び漂白処置から1週間後に問診・口腔内検査を行うことにより、安全性を評価した。その結果、有害事象として歯肉の白変が11症例、軽度の副作用（唇が乾燥してヒリヒリした）が1症例認められた。
 - 副作用なし：71症例
 - 歯肉の白変：11症例
 - 軽度の副作用：1症例（乾燥により唇がヒリヒリした）
- 有効性 漂白前後の歯の色を、明度順に並べたVITAPAN classical シェードガイドを用いてシェードテイキングを行い、その明度の差により有効性を評価した。その結果、全ての症例において歯の色調は改善され、漂白効果が認められなかった症例及び色調が暗くなった症例はなかった。
 - 3シェード以上改善：57症例
 - 1～3シェード改善：15症例

ティオン オフィス (V-CAT®応用) の効果

ホワイトニングジェル

光照射

光照射

リアクター（主成分 V-CAT®）
エナメル質

光照射により、リアクター中のV-CAT®から電子が放出され、過酸化水素と反応。

ヒドロキシラジカルを生成し、着色物質を効率的に分解。

光触媒なし

ホワイトニングジェル

光照射

ホワイトニングジェルが塗布された状態。

光照射により、一部の過酸化水素がヒドロキシラジカルに変化し、着色物質を分解。

安全な光波長域で反応

一般的に、二酸化チタン光触媒は紫外線域の光にしかほとんど反応しませんが、V-CAT®(可視光応答型光触媒)は二酸化チタンの酸素の一部が窒素に置換されることで、可視光線域の光にも充分反応するため、歯科用照射器を用いたオフィスホワイトニングへの応用が可能となりました。

安全に使えるシステム

歯肉保護レジンにより、ホワイトニングジェルの歯肉への付着を防ぎます。また、ホワイトニングジェルはシリンジAとシリンジBを接合して混合し、ディスポーザブルファイバー付きチップから直接塗布できるため、安全にお使いいただけます。



短時間で
白くしたい方

イベント（結婚式・面接等）が控えている

ティオンライト オフィスホワイトニングのチェアタイムを短縮

クイック
Quickモード

Normalモード

Normalモードと同程度の効果を保ちながら、照射時間を従来の半分に短縮できます。

照射モード一覧

モード	照射時間 (初期設定値)	
レジン Resin	20秒	歯肉保護レジンの硬化に
クイック Quick	6分	短時間でやりたいケースに
ノーマル Normal	12分	通常モード
로우 Low	12分	知覚過敏症状が心配なケースに

※Resin, Quickは自社従来品からの追加

レジン
Resinモード



コンポジットレジン用の光照射器を準備する必要がなく、全顎一度に照射することが可能です。

【照射例】

1 上顎

2 下顎

3 仕上げ

20秒照射

20秒照射

20秒照射

合計
1分

インターナルブリーチ対応



歯科用オフィスホワイトニング ティオン オフィス

包装●1函：オフィスホワイトニング材 シリンジA(1.0g) 1本、オフィスホワイトニング材 シリンジB(1.0g) 1本、リアクター(2.0g) 1本、歯肉保護レジン(1.5g) 1本、ディスポーザブルディッシュ 1個、ディスポーザブルブラシ 2本、ディスポーザブルファイバー付きチップ 2個

【単品包装】
包装●1函：1.5g 1本
ディスポーザブルファイバー付きチップ
包装●1袋：20個

歯科用漂白材 ティオン オフィス
高度管理医療機器 22200BZX00785000

要冷蔵
医薬用外創物

ティオンライトとの組み合わせでチェアタイムを短縮

関連製品



リップジェル
包装●1函：1個 8g



リトラクター
サイズ●2種：S、M
包装●1函：5個
歯科用開口器 リトラクター
一般医療機器
13B1X00155000199



フェイシャルシート
包装●1函：100枚



小さく
たためる

歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器） ティオンライト

包装●
本体 1台、マウスガード（ティオンライト用） 2個（本体装着＋付属）、保護メガネ（オーバーグラスタイプ）コスモブルー／ティオンライト用 2個、六角レンチ（大）（小） 各1個、電源コード 1本

【単品包装】
保護メガネ（オーバーグラスタイプ）
コスモブルー／ティオンライト用
包装●1個

歯面漂白用加熱装置（歯科重合用光照射器） ティオンライト
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000312



仕様●	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
電源入力	30VA
寸 法	本体 高さ 1,550mm ベース部 510mm×430mm
重 量	本体 13.5kg
可動範囲	上下可動範囲 540mm
光源	5Wタイプ紫LED×5灯
出力ピーク波長	395～410nm
照射時間	10秒～20分
照射範囲	横70mm×縦30mm

ホームホワイトニング

ティオンホームの特長

有効成分が効率よく歯面に浸透

ジェルが水となじみやすく、有効成分が歯面に浸透しやすいため、効率よくホワイトニング効果を発揮します。

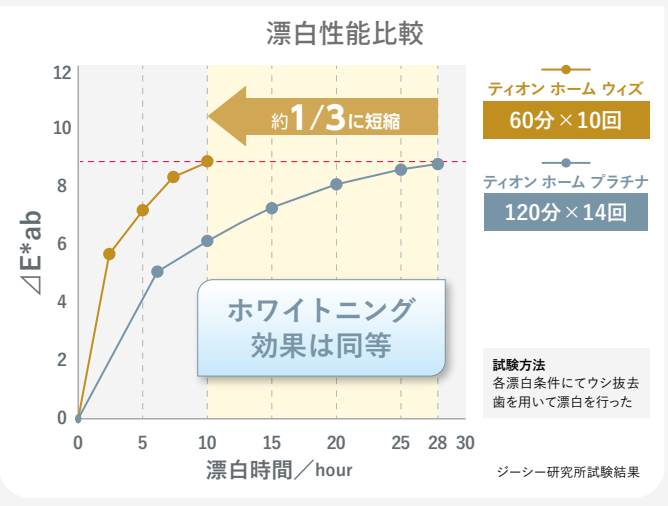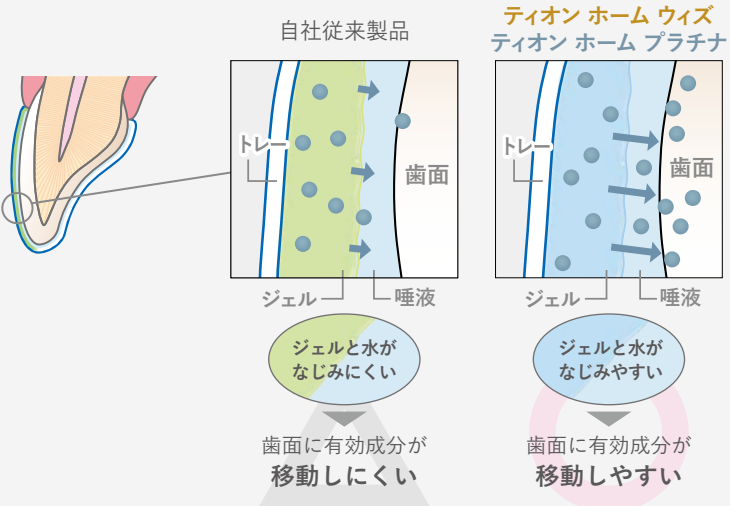

水に溶けにくく歯面に留まる

水に強く唾液に溶けにくいジェルが、歯面にムラなく広がり密着して留まるため、最後まで有効成分が作用します。



確認しやすい白色ジェル

ジェルがトレーからあふれ出た場合も、患者さんご自身が目視で確認できるため、すぐにジェルを拭き取ることが可能です。



しなやかなで歯面にフィットするマウストレー



ティオン ホーム ウィズ

高濃度で効率よくスピードホワイトニング

標準60分※×10日間

有効成分濃度が高い！

ティオン ホーム ウィズ

過酸化水素6%配合
(過酸化尿素約17%相当)

着色汚れと沈着した色素を分解

過酸化水素がダイレクトに漂白

※最長90分



ティオン ホーム プラチナ

低濃度でじっくりマイルドホワイトニング

最長120分×14日間


ティオン ホーム プラチナ

過酸化尿素10%配合

過酸化尿素が過酸化水素と尿素に分解

着色汚れと沈着した色素を分解

過酸化水素が漂白

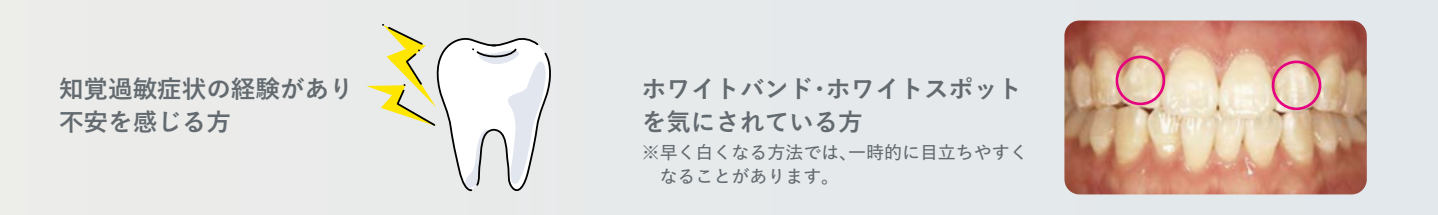

歯科用ホームホワイトニング
ティオン ホーム ウィズ

包装●
スターターキット 1函：ホームホワイトニング材(1.8mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シェードガイド 1枚、ペーパーバッグ 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム ウィズ
高度管理医療機器
30600BZX00056000

要冷蔵

ティオン ホーム 共通

ティオン ホーム
トレーシート
包装●1函：10枚

ティオン ホーム
トレーケース
包装●1函：10個

歯科用ホームホワイトニング
ティオン ホーム プラチナ

包装●
スターターキット 1函：ホームホワイトニング材(2.5mL) 4本、トレーシート2枚、トレーケース 1個、シェードガイド 1枚、ペーパーバッグ 1袋

医薬品含有歯科用歯面清掃補助材
ティオン ホーム プラチナ
高度管理医療機器
22900BZX00205000

要冷蔵

歯面清掃に



フッ素入り歯面研磨ペースト ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト

香味●グリーンシトラス

内容量●80g

包装●1 函：1 本

歯面研磨材 ゴーシー PTCペースト ルシェロホワイト
一般医療機器 13B2X00124000003

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯面清掃用カップ

ジーシー PTCカップⅡ

包装●1 函：20 個

歯磨カップ ゴーシー PTCカップⅡ
一般医療機器 13B1X00155000291

セルフケアに



薬用歯みがき類 [医薬部外品]

ルシェロ歯みがきペースト ホワイトプレミアムケア

【販売名】ルシェロ歯みがきペースト ホワイトP

香味●グリーンシトラス

内容量●100g

包装●1 函：1 本

※ 6 歳未満の子供の手の届かないところに
保管し、使用させない。

※本製品に配合している原料に由来してペーストが部分的に
黄色く見える場合がございますが、品質に問題はございません。

製造販売元 日本ゼット株式会社
東京都新宿区西新宿1丁目26番2号



歯ブラシ

ジーシー ルシェロ 歯ブラシ B-10/B-21・20 ピセラ/W-10

毛の硬さ●B-10、B-21・20=M(ふつ)、S(やわらかめ)
W-10=やわらかめ

包装●B-10 1 函：20 本(各色4本)、5 本セット(各色1 本)
B-21・20 1 函：20 本(各色4本)、5 本セット(各色1 本)
W-10 1 函：6 本(各色3本)

歯科医院用

ミネラル含有ペースト

[歯みがき類]

[化粧品]

ホワイトニング後の トリートメントペースト

【販売名】ジーシー MIペースト

香味●2種=ミント、ストロベリー

内容量●10mL(12g)

包装●1 函：1 本

ホワイトニング
期間中にびったりの
ミニサイズ

日常にお使いになる方はコチラ!



ミネラル含有ペースト

[歯みがき類]

[化粧品]

MIペースト

【販売名】ジーシー MIペースト

香味●5種=メロン、ストロベリー、パナ、ヨーグルト、ミント

内容量●35mL(40g)

包装●


各フレーバー 1 函：1 本

イントロダクトリーセット 1 函：3 本(ストロベリー/ヨーグルト/ミント)

アソートセット 1 函：10 本(各フレーバー2本)

ホワイトニング後のミネラル(カルシウム・リン)補給に

豊富なミネラル

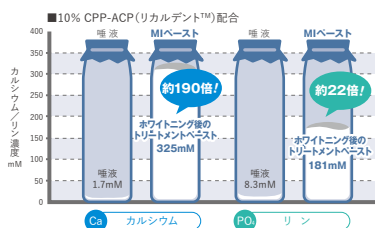

口腔内の環境を整える



簡単に使える

- 1 歯みがきをする
フッ素入りのペースト
を使うと効果的!
- 2 歯全体に指や綿棒や
歯ブラシで「ホワイト
ニング後のトリートメ
ントペースト」を
塗りこむ
- 3 唾液を吐き出さない
ようにして3分待つ
- 4 少量のお水で
うがいをする
さらに30分ほど飲食を
控えると効果的!

※本製品には牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンが含まれておりますので、牛乳由来成分(カゼイン)及びバラベンに対してアレルギーを持つ方は使用しないでください。



ブリリカピアンコ

包装●

パッケージ：本体1台、コントローラ1台、お知らせ受信機1台、
ブリリカ用開口器S/SS各1個、保護めがね1個、収納袋1個、院
内掲示用パネル、患者様用リーフレット50部、口唇・口腔シート
化粧品リップリー1函10枚入

歯面漂白用加熱装置 ブリリカ ピアンコ

一般医療機器 特定保守管理医療機器 14B2X00036000008

発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13

製造販売元 株式会社東京技研横浜工場 横浜市都筑区東山田4-42-37

歯科用開口器 口角鉤 ダブルワイダー

一般医療機器 11B1X10006500205

発売元 株式会社東京技研 東京都世田谷区玉堤1-25-13

製造販売元 株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28

※掲載情報は2026年6月現在のものです。

※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

※「RECALDENT」、「リカルデント」およびリカルデントロゴは、モンデリーズ・インターナショナルグループの登録商標または商標です。

※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または
使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ゴーシー / 製造販売元 株式会社 ゴーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区連沼町76番1号

カスタマーサービスセンター

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)

<https://www.gc.dental/japan/>

支 店

●東 京(03)3813-5751 ●大 阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東 北(022)785-8040 ●九 州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

