

バキュームミキサー VM-II

エアバキューム式真空攪拌器

'GC'



Since 1921
100 years of Quality in Dental



埋没材・石こうの性能を引き出し、
ラボワークを強力にサポート。

シンプルなデザインで操作も簡単、コンパクトでパワフルなバキュームミキサー。

●本体

耐光性が高い材質を採用し、清掃しやすいフラットなデザインです。

●攪拌カップ吸着面

テーパ形状の取付口により、攪拌カップのセットが容易です。

●ヒューズボックス

●電源コード

●真空計

●タイマー

タイマーを標準装備。60秒までの設定が可能です。

●メインスイッチ (防塵カバー付)

運転のスタート/ストップが1カ所で操作できます。

●バキューム用チューブ



専用スタンド(オプション)にも取り付けられます。

●攪拌カップS/M/L



使用頻度の高い攪拌カップMは2個を標準包装。
※L(オプション)のブレードはステンレス製。

エアバキューム方式によるコンパクト設計

既存のエアコンプレッサーに接続するだけで安定した真空圧が得られるエアバキューム方式を採用。真空ポンプを必要としないコンパクト設計により、場所を選ばずに設置可能です。また、作動音も静かで、院内ラボにも適しています。標準は壁掛け式、スペースに合わせて専用スタンド(オプション)も取り付けられます。

ワンプッシュスタートのシンプル操作

タイマーは一度設定すれば、使用ごとの設定は不要。スタート時の操作は攪拌カップをセットしてメインスイッチをワンプッシュするだけです。攪拌中、カップは真空圧により本体に吸着されるため手で押さえる必要はありません。



攪拌しやすいジュラコン樹脂製ブレードによる均一な練和

攪拌しやすい形状のジュラコン樹脂製ミキシングブレードは、カップとの隙間を最適値に設定。さらに練和物を水平・垂直の双方向に確実に攪拌できるようにデザインされています。適切な回転数・真空圧と合わせ、常に気泡や練り残しがない均一な練和を実現します。



仕様

電源	AC100V 50/60Hz	真空圧	-0.085MPa
消費電力	190VA	寸法	幅218mm×奥行160mm×高さ218mm
ヒューズ	10A(φ5.2×20)×2本		専用スタンド(オプション)取付時
タイマー	ダイヤル式 0~60秒		幅240mm×奥行194mm×高さ562mm
回転数	350/410rpm(50/60Hz)	攪拌カップ容量	S:250cc, M:600cc, L(オプション):900cc
エア消費量	31L/min(0.55MPa)	重量	6.4kg、専用スタンド(オプション)取付時9.5kg

ジーシー バキュームミキサー VM-II エアバキューム式真空攪拌器

包装●

一式:本体1台、攪拌カップS 一式1個、攪拌カップM 一式2個、他付属品

別売:専用スタンド 一式

攪拌カップS 一式

攪拌カップM 一式

攪拌カップL 一式

歯科技工用真空攪拌器 ジーシー バキュームミキサー VM-II
一般医療機器 13B1X00155000226

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2024年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。

NB026X2403