



バリオサーズ3

Variosurg3

バリオサージ3 Variosurg3

すべては理想に近づくために

現在のインプラント治療において無くてはならない超音波ボーンサージェリーシステム。その代名詞ともいえるバリオサージが更なる進化を遂げ“バリオサージ3”として新たに登場。高いグリップ性とバランス性、そして広い術野を確保できることで高い評価を得ている“スーパースリムデザイン”ハンドピースのサイズはそのままに、従来比50%のパワーアップを実現しました。

“バリオサージ3”は、最先端超音波技術によってコントロールされたハイパワーと、多様な術式に対応する豊富なチップラインナップの相乗効果により、スピーディーで正確な施術をサポート。インプラント用マイクロモーター“ジーシー インプラントモーター IM-Ⅲ”とバリオサージ3を1台のフットコントロールで操作できるリンク機能など、ドクターのニーズを満たす先進の技術でストレスのない治療環境を実現します。





Ultrasonic Bone Surgery System

VarioSurg3

POWER

150%
PROGRAM
5

BURST
SURG

B2
B1
OFF

MODE

BURST

«E»

«S»

WAVEFORM

— POWER +

— PROGRAM +



AUTO CLEANING



MEMORY



SELECT

操作性と安全性はそのままに
150%のパワーアップを実現*

幅広い用途

【口腔外科手術】

- 骨切削 / 骨整形 / 骨採取
- 側方アプローチによる上顎洞底挙上術 / 粘膜剥離
- 歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術(ソケットリフト)
- 抜歯 / インプラント除去
- インプラント窩の形成
- 逆根管充填窩洞形成

【ペリオ】

- スケーリング / メンテナンス

LEDライトは正確な施術をサポート

自然光に近いナカニシのLEDライトは、術野を的確に照射し、正確な施術と施術時間の短縮をサポート。長時間の連続使用においても発熱しない高い安全性と、長寿命による経済性を併せ持ちます。また、独自のツインLEDライトは術野に影をつくりにくく、クリアな視野であらゆる施術をバックアップします。




ツインLEDライト

最大パワー150%アップ

従来比50%のパワーアップ (Surgモード) を実現した最大出力は、フィードバック機能とオートチューニング機能により正確に制御され、切れ味の良いバリオサージチップとの相乗効果により、効率的な施術とチェアタイムの短縮をサポート。

100%以上のパワーでご使用の際は対応専用チップをお使いください。

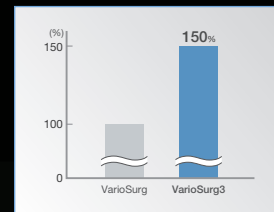

更に進化した“スーパースリムデザイン”ハンドピース

“スーパースリムデザイン”のLEDハンドピースは、高いアクセス性と視認性を実現。人間工学に基づく適正なバランスにより、術者の意志を忠実に反映し、正確な施術をバックアップ。手指への負担を最大限に軽減するデザインで、長時間の施術においても、術者に負担を感じさせません。

切れ味を追求した骨切削用 TiN コーティングチップ (骨切り用 / 骨切除・骨整形用 / 抜歯用)



チップの刃先を目立て処理することで切削力を高め鋭い切れ味を実現。先端の目詰まりも軽減します。



ライト付 製品名 VS3-LED- HPSC 製品番号 E1133

• 2m コード付



オートクレーブ滅菌と、熱水洗浄にも対応し、高い安全性も実現しています。

バリオサージ3 VarioSurg3

ハイパワーを自在に使いこなす 先進のコントロールユニット

“バリオサージ3”のコントロールユニットは、多様な術式に対応する充実の機能に、術者の好みや使用状況に合わせてパーソナライズできるプログラムメモリー機能など、ドクターのニーズに応える様々な機能を搭載。洗練されたデザインのコンパクトなボディは、視認性の高いバックライト付き大型LCDパネルと直感的な操作ができるアイコンボタンにより、安全で確実な施術をサポートします。

主な特長


- 3つのモード切替が可能 (Surg, Endo, Perio)
- 切替可能バーストモード
- プログラムメモリー機能 (9プログラム)
- LEDライト光量調整機能
- オートクリーニングモード搭載
- フィードバック機能
- オートチューニング機能
- インプラントモーターとのリンク機能




更に進化したバーストモード

施術中でも切り替え可能なバーストモードは、一定の振動に対して周期的に小さな振動を与えることで、振動に変化を加え硬い皮質骨を切削する際に適した「ハンマー効果」を生み出します。3段階のバーストモード設定により、術式や骨の状況に応じたパワー選択が可能です。

バースト機能

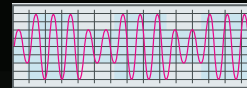

一定振動機能

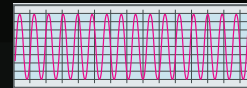

常に安定した切削を実現するフィードバック&オートチューニング機能

【フィードバック機能】術部の状況を自動的に感知することで適正なパワーをチップに供給。常に安定したパワーにより施術の効率を高めます。

【オートチューニング機能】設定した出力値を常にチップの先端で発揮するために発振周波数を自動的にコントロール。設定した出力をチップ先端で再現し、理想的な振動状態を維持します。

光量調整機能付きライト

術者の好みや施術環境により、シンプルなボタン操作でLEDハンドピースの光量を3段階に調整することができます。



選択可能な注水量

チップを効果的に冷却する最大75 ml/min の豊富な注水量を、チップの種類や口腔内の状況に合わせて5段階に選択可能。効果的な注水はチップ先端の発熱を押さえ、骨細胞の熱的損傷を防ぎます。

メモリー機能

施術内容や使用するチップに応じた設定をプログラムごとにメモリー可能。設定したプログラムはプログラムボタンで簡単に呼び出せ、煩わしい操作は不要です。

GC IMPLANT MOTOR IM-Ⅲ × VarioSurg 3

リンク機能が生み出すシナジー効果

インプラント用マイクロモーター“ジーシー インプラントモーターIM-Ⅲ”と、超音波ボーンサージェリーシステム“バリオサージ3”の2つを1台のフットコントロールで操作することが可能なリンク機能は、それぞれの共通のインターフェイスでコントロールすることで生み出されるシナジー効果により、多様な術式に対応し、シンプルかつストレスのない操作を実現します。


1台のフットコントロールで操作可能

リンク機能はIM-Ⅲとバリオサージ3をリンクケーブルでつなぐだけの簡単設定。専用リンクスタンドを使用する事で最小限のスペースで2つの機器を設置する事ができます。




安全操作

どのシステムを使用しているかひと目で分かるインジケータは、確実に安全な操作をサポートします。

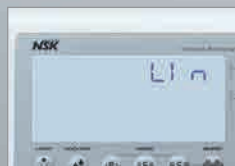

IM-Ⅲ使用時の
バリオサージ3パネル表示

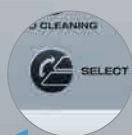

SELECTキーの長押しで
使用する機器を切替

SGリンクセット(オプション)

製品名 SGリンクセット

製品番号 Y1002729

セット内容: • SGリンクスタンド • SGリンクケーブル

仕 様

SGリンクスタンド

- 寸 法 : W210 × D300 × H180 mm
- 重 量 : 1.85 kg
- SGリンクケーブル
- 長 さ : 355 mm





バリオサージ3 VarioSurg3

バリオサージ3 フットコントロール無しセット **ライト付**

製品名 VarioSurg3(100V) Non FT 製品番号 Y1002829

セット内容

- コントロールユニット • LEDハンドピース(ハンドピースコード2m付属)
- 滅菌ケース • ハンドピーススタンド • チップ(H-SG1、SG5、SG6D、SG7D、SG11、SG17)
- イリゲーションチューブ • チップホルダー • チップ交換レンチ 他付属品

※フットコントロールは含まれていません。フットコントロールが必要な場合は、別途お問い合わせください。

販売名：バリオサージ3 一般的名称：電動式骨手術器械
認証番号：225ABBZX00144000 号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



仕 様

コントロールユニット

- 発振周波数：28-32 kHz
- 電 源：AC100 V 50/60 Hz
- 注 水 量：10~75 mL / min
- プログラム数：SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2
- 寸 法：W265 x D220 x H103 mm
(突起部を含まず)


フットコントロール

充実の機能を足元でコントロール

超音波のON/OFF、注水量の選択やプログラム選択が可能なフットコントロールは、ユニット操作のハンズフリー化を実現。付属のハンガーは手を使わずにフットコントロールを簡単に移動できます。

製品名 FC-78 製品番号 Z1102003

- 2 mコード付

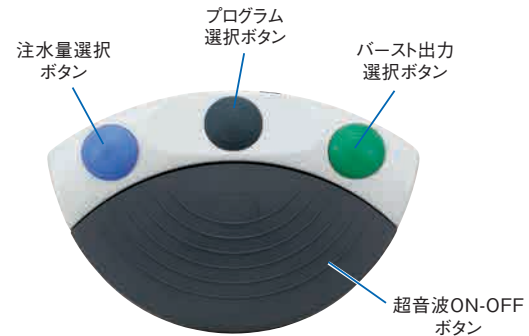

滅菌ケース

ハンドピース、コード、チップ交換レンチなどの各パーツが簡単に収納できる滅菌ケースが付属します。

製品名 VA-SG-CASE 製品番号 20001326

- 寸法：W281 × D171.5 × H47 mm



熱水洗浄可能



135℃までの温度でオートクレープ可能



Carrying Case (オプション)

移動に便利なキャリングケースは専用設計。本体と周辺機器をスマートに収納できます。

製品名 バリオサージ3用
キャリングケース

製品番号 Y1002768

- 寸法：W469 × D344 × H180 mm



iCART-L (オプション)

本体、および付属品をスマートに設置できる移動式カート。

製品名 iCart-L

製品番号 Z299

- 外形寸法：W360 × D420 × H800 mm
- 重量：10 kg



インプラント用マイクロモーター

ジーシー インプラントモーターIM-Ⅲ

高照度・長寿命のLEDライトを採用

高い視認性を誇るバックライト付き大型LCDと、直感的な操作が可能なアイコンボタンにより、安全でストレスのない施術環境を実現。目的に応じて5N・cm～80N・cmまで、5N・cmごとに設定が可能、実駆動をサンプリングして設定値との差を補正する高精度キャリブレーションなど臨床現場における使用環境の徹底研究による安全性と正確性の追求が、プロフェッショナルの技術を実実にサポートします。

ジーシー インプラントモーター IM-Ⅲ

管理医療機器 223ALBZX00038000

セット内容

1セット=コントロールユニット、モーター、ハンドピース、フットペダル、他付属品付


※ハンドピース、モーターにはライト付、ライトなしがあります。

〈ライト付〉

〈ライトなし〉

イリゲーションチューブ(10本入)

二分岐注水チューブ1本

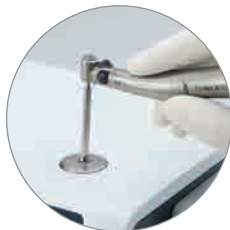

高精度キャリブレーション





VarioSurg Tip Line Up


Ultrasonic Tips

多様な術式に対応する
豊富なチップラインナップ

骨切り用



骨切除・骨整形用

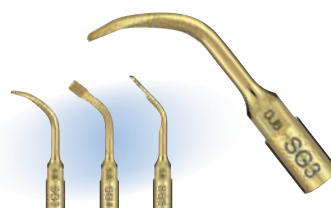

抜歯用 (歯根抜歯時骨切除用)



骨切り用 (骨窓の開窓など)



ソケットリフト用




粘膜剥離用



骨切削用 (インプラント窩の前処置)



スケーリング用

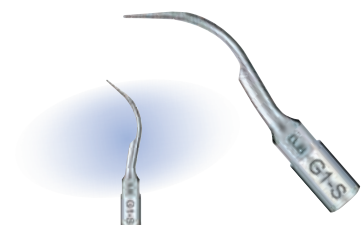

ペリオ用 (ルートプレーニング)



逆根管充填窩洞形成用



ペリオ用 (補綴物のメンテナンス)



Perio-Control

骨切り用



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG1** 製品番号 **Z305101**

- チタンコーティング • 刃数：5, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG 150%**

150% 製品名 **H-SG1** 製品番号 **Z305151**

- チタンコーティング • 刃数：5, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG1A** 製品番号 **Z305138**

- チタンコーティング • 刃数：5, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG2R** 製品番号 **Z305102**

- チタンコーティング • 右湾曲* • 刃数：3, 厚さ0.6mm



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG2L** 製品番号 **Z305103**

- チタンコーティング • 左湾曲* • 刃数：3, 厚さ0.6mm



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG8** 製品番号 **Z305109**

- チタンコーティング • 刃数：3, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG 150%**

150% 製品名 **H-SG8** 製品番号 **Z305155**

- チタンコーティング • 刃数：3, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG 80%**

製品名 **SG8A** 製品番号 **Z305139**

- チタンコーティング • 刃数：3, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mmごとにマーク入



オトガイからのブロック骨採取



骨隆起の切除



熱水洗浄可能



135℃ 135℃までの温度でオートクレーブ可能

150% ハイパワー出力(150%)対応チップ

*チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。



下顎枝からのブロック骨採取



下顎後方部の骨採取



下顎舌側部の骨隆起除去

骨切り用



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 SG14R 製品番号 Z305122

- チタンコーティング • 右湾曲* • 刃数: 5, 厚さ0.6mm



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 SG14L 製品番号 Z305123

- チタンコーティング • 左湾曲* • 刃数: 5, 厚さ0.6mm



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 SG19 製品番号 Z305135

- チタンコーティング • 刃数: 5, 厚さ0.8mm



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG30 製品番号 Z305137

- チタンコーティング • シャープエッジ
- 最厚部 0.5mm, 最薄部 0.15mm



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 SG58 製品番号 Z305141

- チタンコーティング • 刃数: 3, 厚さ0.6mm
- チップ先端から3mm, 6mm, 9mmごとにマーク入

* チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。


骨切除・骨整形用



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SG3** 製品番号 **Z305104**


- チタンコーティング • 先端と両サイドがシャープな片刃

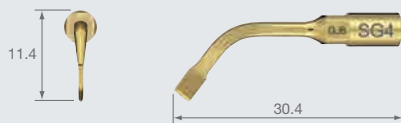

パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SG4** 製品番号 **Z305105**


- チタンコーティング • 先端がシャープな両刃

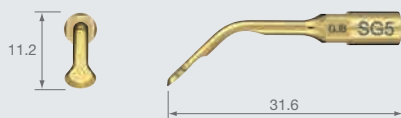

パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SG5** 製品番号 **Z305106**

- チタンコーティング • 先端円周部がシャープな片刃

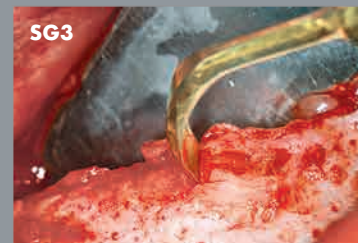

歯槽骨の平坦化、骨片採取

抜歯用(歯根抜歯時骨切除用)



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SG17** 製品番号 **Z305132**

- チタンコーティング • 厚さ: 0.7mm
- 3方向がシャープな両刃



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 **SG18R** 製品番号 **Z305133**

- チタンコーティング • 厚さ: 0.7mm
- 3方向がシャープな両刃



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 **SG18L** 製品番号 **Z305134**

- チタンコーティング • 厚さ: 0.7mm
- 3方向がシャープな両刃



歯根抜歯時骨切除



熱水洗浄可能




135℃までの温度でオートクレーブ可能

歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術 (ソケットリフト用)

外科的侵襲が少なく、短い施術時間でサインスリフトを行うことが出来るソケットリフト法を、より安全に行えるソケットリフトチップ。超音波振動による骨切削はシュナイダー膜への損傷リスクを軽減。オステオームによる槌打がないため、患者さんの不快感を和らげ、めまいなどのリスクを抑えます。

■上顎洞粘膜挙上術 手順例 ■ 埋入インプラントサイズ：ワイドサイズφ5.0mm


パリオサージチップを用いる場合

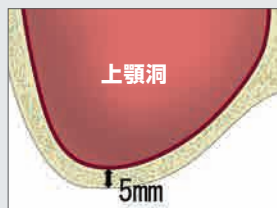

- 上顎洞底皮質骨まで5mm前後、骨質タイプⅢ・骨質良好の症例を説明します。
- CT画像で確実な診断の上、垂直的骨幅を十分に術前診断し、上顎洞底部までの形成を行います。



SG15Aチップを用いて、上顎洞底1mm手前まで形成します。チップを押し込みすぎないように注意します。

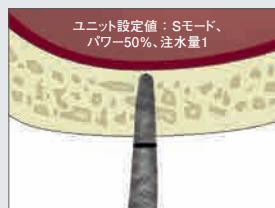

SG15Bチップを用いて形成します。チップを押し込みすぎないように注意します。



SG16Aチップを用いて形成します。深度ゲージを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。



SG16Bチップを用いて、上顎洞底骨がほとんどない状態まで形成します。深度ゲージを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。




SCL12Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップを押し込みすぎると、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。




SCL14Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップを押し込みすぎると、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。




SCL11DチップまたはSCL13Dチップを用い、十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップ先端部のエッジ部分を使って、インプラント窩の窩底のエッジを切削します。チップを押し込みすぎると、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

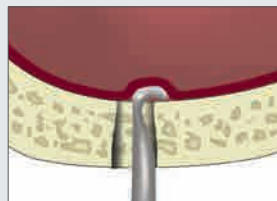


ハンドインスツルメント先端部を骨壁に沿わせながら、インプラント窩内部に入れます。先端部を窩底から離さないようにしながら、先端部を回転させて、ゆっくりと辺縁の粘膜を皮質骨から剥離させます。その後マイクロスコープやエンドスコープなどを用いて、上顎洞粘膜の状態を確認することが望ましいです。

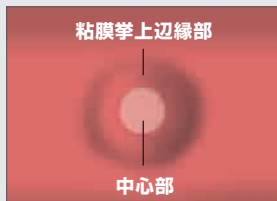


上顎洞側から見たときの挙上された粘膜のイメージ図です。マイクロスコープやエンドスコープなどを用いて、上顎洞粘膜が確実に挙上されているか、孔があいていないかを確認することが望ましいです。

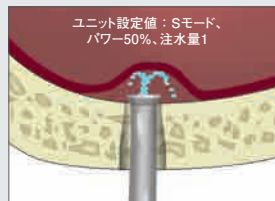

SCL1チップまたはSCL3チップを用いて、十分な注水下で、確実に粘膜を挙上します。注水量は1に設定します。

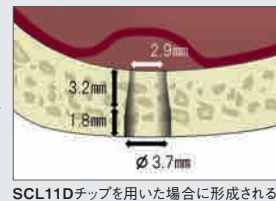


SCL11Dチップを用いた場合に形成されるインプラント窩の形状はこのようなになります。

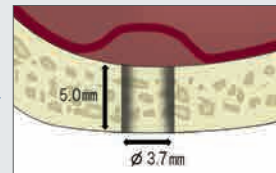

SCL13Dチップを用いた場合に形成されるインプラント窩の形状はこのようなになります。

ソケットリフト用

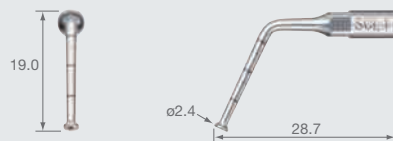

パワーレベル **SURG** 50%

製品名 **SCL1** 製品番号 **Z305170**


• 内部注水



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 **SCL3** 製品番号 **Z305172**


• 内部注水

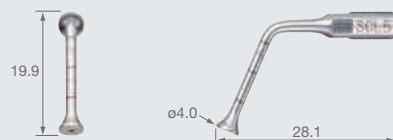

パワーレベル **SURG** 50%

製品名 **SCL5** 製品番号 **Z305174**

• 内部注水

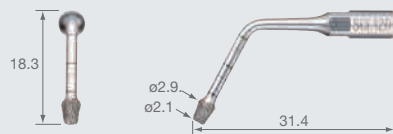

パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SCL12D** 製品番号 **Z305202**


• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SCL14D** 製品番号 **Z305204**

• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング

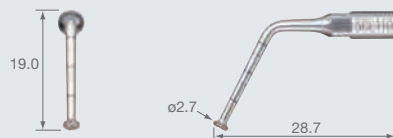

パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SCL11D** 製品番号 **Z305201**

• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SCL13D** 製品番号 **Z305203**

• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング




パワーレベル **SURG** 80%

製品名 **SCL15D** 製品番号 **Z305205**

• 外部注水 • ダイヤモンドコーティング



注水による上顎洞粘膜挙上
(インプラント窩挿入前)

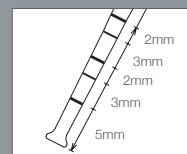

インプラント窩の深さは
チップの目盛りで
測ることができます。



熱水洗浄可能



135℃ 135℃までの温度でオートクレープ可能

ハンドインストルメント

販売名：ソケットリフト ハンドインストルメント 一般的名称：歯科用起子及び剥離子
届出番号：09B2X00016000141 号 一般医療機器




製品名 ソケットリフト ハンドインストルメント 製品番号 Z305

• 全長168mm



先端部拡大図 インプラント窩の深さは、先端の目盛りで測ることができます。

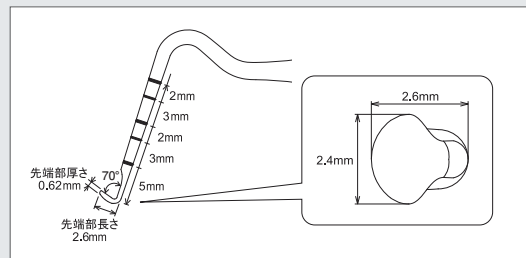

骨切り用（骨窓の開窓など）



パワーレベル **SURG** 80%

製品名 SG6D 製品番号 Z305107

- ダイヤモンドコーティング



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG7D 製品番号 Z305108

- ダイヤモンドコーティング

粘膜剥離用



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG9 製品番号 Z305110

- 剥離、挙上用 角度 90°



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG10 製品番号 Z305111

- 剥離、挙上用 角度 135°



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG11 製品番号 Z305112

- 剥離、挙上用

SG6D



SG7D



上顎洞底挙上術における骨窓の開窓

SG9



SG11




鼻腔膜の剥離



熱水洗浄可能



135℃までの温度でオートクレープ可能

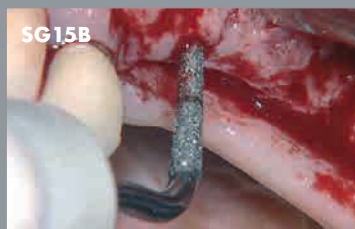

インプラント窩の前処置

骨切削用（インプラント窩の前処置）



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG15A 製品番号 Z305124

- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：0.7mm
- チップ先端から5mm, 10mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG15B 製品番号 Z305125

- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：1.3mm
- チップ先端から5mm, 10mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG15C 製品番号 Z305126


- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：0.9mm
- チップ先端から5mm, 10mm, 12mmごとにマーク入



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG15D 製品番号 Z305127


- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：1.3mm
- チップ先端から5mm, 10mm, 12mmごとにマーク入

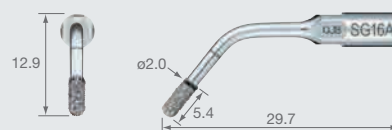

パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG16A 製品番号 Z305128

- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：2.0mm
- チップ先端から5mm, 10mmごとにマーク入

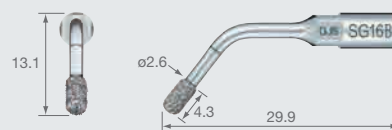

パワーレベル **SURG** 50%

製品名 SG16B 製品番号 Z305129

- ダイヤモンドコーティング • チップ先端径：2.6mm
- チップ先端から5mm, 10mmごとにマーク入

* チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。


スケーリング用



パワーレベル **SURG** 50%

製品名 G1-S 製品番号 Z305113



ペリオ用 (ルートプレーニング)

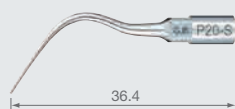

パワーレベル **PERIO** 100%

製品名 P20-S 製品番号 Z305114


• ストレート

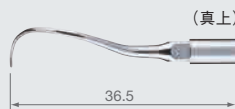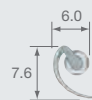

パワーレベル **PERIO** 100%

製品名 P25R-S 製品番号 Z305115

• 右湾曲*

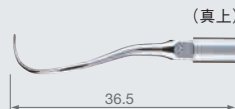

パワーレベル **PERIO** 100%

製品名 P25L-S 製品番号 Z305116

• 左湾曲*



熱水洗浄可能



135℃までの温度でオートクレープ可能

逆根管充填窩洞形成用



* チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

ペリオ用(補綴物のメンテナンス)

Perio-Control



パワーレベル **PERIO** 100%



製品名 V10-S 製品番号 Z305117

• Eチップ用レンチ付属 • プラスチックチップ別売



製品名 V-P10-S 製品番号 Y1002772

• 3本入



(真上)

製品名 V-P11R-S 製品番号 Y1002769

• 右湾曲* • 3本入 • V10-Sホルダー別売



(真上)

製品名 V-P11L-S 製品番号 Y1002770

• 左湾曲* • 3本入 • V10-Sホルダー別売



製品名 V-P12-S 製品番号 Y1002771

• 3本入 • V10-Sホルダー別売

■ V-P11R-S、V-P11L-S、V-P12-Sは、バリオサージ3のみご使用いただけます。



床付きのインプラント上部構造のメンテナンス

パワーレベル

SURG 80%

このパワーガイドの記号と数値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。
チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。



熱水洗浄可能



135℃ 135℃までの温度でオートクレーブ可能

チップキット



骨切り用

骨切り用 (骨窓の開窓など)

骨切除・骨整形用

粘膜剥離用

製品名 ベーシック H-SJ キット
製品番号 Y1002850

セット内容 • H-SG1, SG5, SG6D,
SG7D, SG11, SG17
• チップホルダー



骨切り用

製品名 ボーンカット キット
製品番号 Y900688

セット内容 • SG1, SG2R, SG4,
SG2L, SG6D
• チップホルダー



粘膜剥離用

製品名 サイナスリフト キット
製品番号 Y900689

セット内容 • SG1, SG3, SG6D,
SG9, SG10, SG11
• チップホルダー



逆根管充填窩形成用

製品名 エンド-S キット
製品番号 Y900691

セット内容 • G1-S, E30RD-S, E30LD-S,
E31D-S, E32D-S
• チップホルダー



骨切削用 (インプラント窩の前処置)

製品名 インプラント プレパレーション キット
製品番号 Y900774

セット内容 • SG15A, SG15B,
SG16A, SG16B
• チップホルダー



ソケットリフト用

ソケットリフトキット
製品名 レギュラーサイズ インプラント用
製品番号 Y1002856

セット内容 • SCL11D, SCL12D, SCL1
• VS チップレンチ
• チップホルダー



ソケットリフト用

ソケットリフトキット
製品名 ワイドサイズ インプラント用
製品番号 Y1002857

セット内容 • SCL12D, SCL13D, SCL14D, SCL3
• VS チップレンチ
• チップホルダー

Spare Parts

製品名	製品番号
 VS3-LED-HPSC LED ハンドピース (ハンドピースコード2m付属)	E1133
 E チップ用レンチ V10-S 用	Z217399
 VS チップレンチ SG1A, SG8A, ソケットリフト用 (CR-40)	Z305350
 チップ交換レンチ (CR-30)	10000977
 チップホルダー	20001327
 ハンドピーススタンド	Z1029201

製品名	製品番号
 イリゲーションチューブ (10 本入)	Y1001210
 チューブホルダー (7 個入)	Y900767
 VA-SG-CASE 滅菌ケース	20001326
 SGリンクスタンド	Z1176
 SGリンクケーブル	Z1189



熱水洗浄可能



135℃までの温度でオートクレーブ可能

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実データは、2013年12月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ナカニシ**
東京都文京区本郷3-2-14 栃木県鹿沼市下日向700

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支 店

お客様窓口  **0120-416480**

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

営業所

●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333

●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722

●東 北 (022)207-3370 ●九 州 (092)441-1286