



Sandra, 34 Jahre alt
Behandelt mit **Experience L**

Kieferorthopädische Behandlung: Warum?


Um Fehlstellungen im Gebiss zu korrigieren, für ein strahlendes Lächeln und die Erhaltung der Zähne bis ins hohe Alter.

Wie lange dauert eine kieferorthopädische Behandlung?

Abhängig von den erforderlichen Korrekturen kann eine Behandlung durchschnittlich 12 bis 36 Monate dauern. Um das gewünschte Ziel zu erreichen ist es wichtig, über den gesamten Zeitraum aktiv mitzuarbeiten.

Ziel

Mit der Auswahl von GC Orthodontics Produkten hat sich Ihr Behandler für hohe Qualität entschieden. Beeindruckende Ergebnisse und eine angenehme Behandlung sind die Folge.

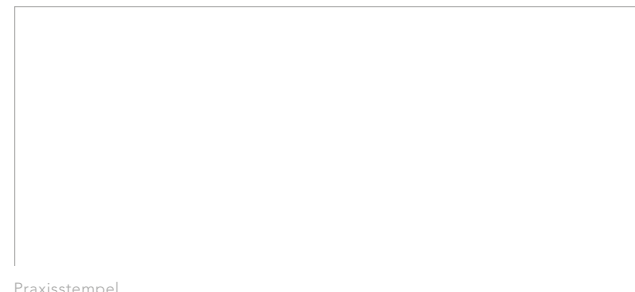

Praxisstempel

99-16GG-1200 · Rev03-05/2019

GC Orthodontics Europe GmbH
Tel +49 2338 801-888 · info.gco.germany@gc.dental



EXPERIENCE™
L/LSB

Selbstligierendes Bracketsystem
zur Lingualbehandlung

GC

GC

Experts in Orthodontics
www.gcorthodontics.eu

EXPERIENCE L und EXPERIENCE LSB Die neue Generation selbstligierender Brackets mit flachem Profil.

Ästhetik: Ein innenliegendes Bracketsystem ist gegenüber einem außenliegenden nahezu unsichtbar.



Komfort: Durch die Verwendung von besonders flachen und schmalen Brackets ist es möglich mit geringeren Kräften zu behandeln. Experience L/LSB haben somit einen besseren Tragekomfort im Vergleich zu größeren Brackets.

Hygiene: Selbstligierende Bracketsysteme benötigen keine Gummis, um den Draht im Bracket zu halten. Ohne Gummiligaturen wird das Anhaften von Bakterien und somit das Risiko von Zahnfleischentzündungen und Entkalkungen vermindert. Dennoch ist das Zähneputzen nach jeder Mahlzeit Pflicht!



Wie funktioniert ein Standardbracketsystem?

Die drei Schlüsselkomponenten:

- **Das Halteelement** (Bracket) wird auf die Zahnoberfläche geklebt und führt den Zahn in seine optimale Position.
- **Der Drahtbogen** (Motor der Behandlungsapparatur) wird in die Brackets eingelegt und überträgt Zug- oder Druckkräfte auf den Zahn, bis dieser seine endgültige Stellung erreicht hat.
- **Der Clip** (nur bei ausgewählten selbstligierenden Brackets) hält den Bogen federnd im Bracket. Während der Behandlung werden die Bögen mehrfach ausgetauscht.


SL Product



Der Inhalt dieser Broschüre dient nur zur allgemeinen Information. Nur der Behandler kann eine qualifizierte Diagnose und den entsprechenden Therapieplan erstellen. Die Behandlungsdauer variiert von Patient zu Patient. **Fragen Sie Ihren Kieferorthopäden nach der für Sie besten Behandlungsmethode.**

Experience L oder LSB?

Mit der Entscheidung zur Lingualtherapie mit Experience Brackets haben Sie die richtige Wahl zu einer modernen, selbstligierenden Low-Profile Behandlung getroffen. Je nach Schwere der Fehlstellung verwendet Ihr Behandler nun entweder die größere Variante „L“ oder die kleinere „LSB“ Form der Basis. Beide Basisvarianten sind in Funktion und Komfort identisch und besitzen zudem alle Vorteile gegenüber höheren und nicht selbstligierenden Brackets.

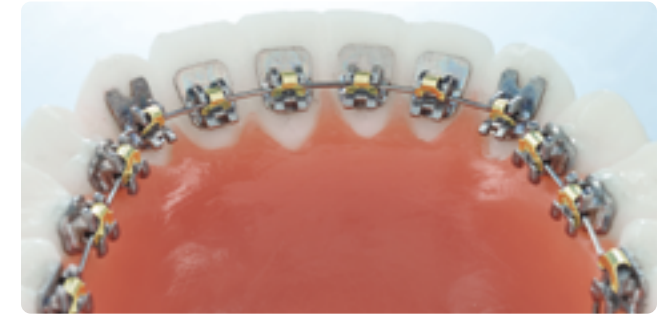

EXPERIENCE L



EXPERIENCE LSB