

“而至” 吉勝自黏式樹脂黏著劑

“GC” G-CEM ONE

衛部醫器輸字第 034693 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。

僅限牙科專業人員使用於建議用途。

產品敘述

自黏式樹脂黏著劑。

適應症

1. 黏接所有類型的陶瓷、樹脂、金屬基底的嵌體與冠蓋體、牙冠以及牙橋。
2. 黏接金屬、陶瓷及纖維冠心根柱。
3. 黏接所有陶瓷及複合牙貼片。
4. 植體基台上牙冠和牙橋的最終黏結。

禁忌症

1. 直接覆髓。
2. 已知對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物，或乙醇過敏的患者應避免使用本產品。

光固化

照射時間

高功率 LED (大於 1200 mW/cm ²)	10 秒
鹵素/ LED (700-1200 mW/cm ²)	20 秒

警告

1. 如接觸口腔組織或皮膚，立即使用沾有酒精的海或棉布拭去。用水沖洗。可使用橡皮障和/或可脂隔離操作區與皮膚或口腔組織。
2. 如碰觸到眼睛，立即用水清洗並就醫。
3. 本產品不可與含有丁香酚的材料一起使用，以免造成本產品無法適當固化或黏著。
4. 使用防護性光護罩或類似的防護鏡來進行光固化作業。
5. 本產品不適合用於填充或牙冠堆築。
6. 在極少數情況下，某些人可能會對本產品過敏。如遇此狀況，請立即停止使用並諮詢醫生。
7. 應配戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和防護鏡。
8. 避免吸入或攝入。
9. Adhesive Enhancing Primer 具有揮發性，請在通風良好的地方使用。
10. 勿與其他產品混用。
11. 光固化完全可以獲得有效的黏著強度。較低的光照強度可能導致黏著力不足。

儲存

為取得最佳效能，建議存放在 4-25°C (39.2-77.0°F)。遠離熱源，避免潮溼及受陽光直射。

色樣

A2(Vita 色)、AO3(不透明)、半透明和白色不透明。

型號及規格

#	型號	規格
1	013670	G-CEM ONE Starter Kit A2 - G-CEM ONE A2 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2mL*1 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*8 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*2
2	013671	G-CEM ONE Starter Kit Translucent - G-CEM ONE Translucent 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 2mL*1 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*8 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*2
3	013672	G-CEM ONE System Kit - G-CEM ONE A2 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Translucent 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*15 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*5 - G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 4mL*1 - G-Multi PRIMER 5mL*1
4	013673	G-CEM ONE Twin Refill A2 - G-CEM ONE A2 4.6g(2.7mL) Syringe*2 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*15 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*5
5	013674	G-CEM ONE Twin Refill Translucent - G-CEM ONE Translucent 2 4.6g(2.7mL) Syringe*2 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*15 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*5
6	013675	G-CEM ONE Single Refill AO3 - G-CEM ONE AO3 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*8 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*2
7	013676	G-CEM ONE Single Refill White Opaque - G-CEM ONE White Opaque 4.6g(2.7mL) Syringe*1 - G-CEM ONE Automix Tip Regular*8 - G-CEM ONE Automix Tip for Endo (with extension tip)*2

製造業者名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造業者地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)