

"而至" 雙劑式通用黏著劑

“GC” G2-BOND Universal

衛部醫器輸字第 034719 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。

僅限牙科專業人員使用於建議用途。

產品敘述

兩種成分的光固化通用黏著劑。

適應症

1. 將光固化複合材料及複合體直接黏到牙齒上。
2. 將這些材料光固化後將雙固化冠心複合材料黏接到牙齒上。
3. 複合材料、金屬基底和氧化鋯/氧化鋁基底的口內牙科材料修復。
4. 結合矽烷偶合劑陶瓷修復體的口內牙科材料修復。
5. 治療敏感性牙齒。
6. 密封於間接修復的牙齒修形(窩洞或基座)。
7. 處理暴露牙根表面。
8. 黏接陶瓷、樹脂以及金屬基底的嵌體與冠蓋體，牙冠、牙橋以及牙貼片。
9. 黏接牙根柱。

禁忌症

1. 覆髓。
2. 對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物，或丙酮過敏的患者應避免使用本產品。

不得與以下合併使用

1. 化學聚合的複合樹脂。
2. 含有丁香酚的材料可能導致本產品無法適當固化或黏著。
3. 脫敏劑可能導致本產品無法適當固化或黏著。

光固化

使用可見光固化機進行光固化。

照射時間

	距離光導棒頂 端 <10 mm	距離光導棒頂 端 >10 mm
	10 秒	20 秒
鹵素 / LED (700-1200 mW/cm ²)		
高功率 LED (大於 1200 mW/cm ²)	5 秒	10 秒

注意:

- 1) 光固化完全可以獲得有效的黏著強度。較低的光照強度可能導致黏著力不足。
- 2) 使用防護性光護罩或類似的防護鏡來進行光固化作業。

儲存

為取得最佳效能，建議存放在 4-25°C (39.2-77.0°F)。
如長時間不使用本產品，應存放於冰箱內。

警告

1. 在極少數情況下，某些人可能會對本產品過敏。如遇此狀況，請立即停止使用並諮詢醫生。
2. 應配戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和防護鏡。
3. 避免吸入或攝入。
4. 1-PRIMER 是高度易燃的液體和蒸氣。勿在明火附近使用。遠離火源。不要在同一個區域中大量儲存。避免陽光直射。
5. 1-PRIMER 易揮發。在通風良好的地方使用。建議患者用鼻子呼吸。
6. G2-BOND Universal 一單位劑量僅供一次使用。勿重新蓋上或重複使用。開封後的單位劑量無法重新正確蓋上，而且其揮發性溶劑可能會蒸發。
7. 如碰觸到眼睛，立即用水清洗並就醫。
8. 如接觸口腔組織或皮膚，立即使用沾有酒精的海或棉布拭去。用水沖洗。
9. 如與材料接觸的組織變白或形成水泡，建議患者不要接觸該部位直到印記消失，通常需要 1-2 周。為避免接觸，建議將可可脂塗在橡皮障無法覆蓋的區域。
10. 如液體濺出，立即用乾布擦拭。
11. 勿與非指定產品混合使用。
12. 依照當地法規處理內容物/容器。
13. 勿將 2-BOND 與 1-PRIMER 混合使用。
14. 勿將本產品與雙固化活化劑混合使用。

型號及規格

#	型號	規格
1	013646	G2-BOND Universal Bottle Kit - 1-PRIMER 5ml*1 - 2-BOND 5ml*1 - Disposable Dispensing Dish*20 - Disposable applicator II*50 - 1-PRIMER Bottle Cover*1 - 2-BOND Bottle Cover*1
2	013651	G2-BOND Universal 1-PRIMER Refill 5ml
3	013652	G2-BOND Universal 2-BOND Refill 5ml

製造業者名稱：GC Dental Products Corporation

製造業者地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)