

"而至" 伊尼雪瓷牙染色膏壹系列 “GC” Initial IQ Lustre Pastes ONE

衛部醫器輸字第 036008 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

產品敘述

本產品以細的陶瓷顆粒為基礎，具有隨時可用的黏稠度。

本產品適用於廣泛膨脹係數範圍，包含高、低膨脹係數的陶瓷，可與 GC Initial 系列陶瓷以及幾乎所有類型的其他陶瓷搭配使用。由精細陶瓷顆粒組成的 3D 染色膏可為修復體帶來色彩深度及半透明的效果，使用時可以塗抹較厚的厚度，為修復體帶來天然的色澤與亮度。

適應症

本產品為傳統染色和上光的替代品。

本產品提供了多種可能性來調整顏色、亮度、灰度值和校正表面紋理，用於單層及分層的陶瓷牙冠與牙橋。本產品為通用的陶瓷材料，可個別處理研磨及壓鑄的整個修復體，或結合 SQIN 粉末處理內部微分層技術的結構。傳統的貼片陶瓷可立即上漆和上釉。

本產品適用於以下產品的內外部：

- 氧化鋁結構(例如 Zirconia Disk, ...)
- 二矽酸鋰結構(例如 LiSi Press, ...)
- 膨脹係數範圍於 6.9~13.3 的分層陶瓷(例如 Initial MC, Initial Zr-FS, ...)

注意事項

- 若過度稀釋染色膏，將降低燒製後的光澤度。因此，可能無法達到理想的結果。
- 如有需要，可另外使用分裝盤單獨稀釋所需的染色膏，切勿直接在罐子裡稀釋。
- Refresh Liquid 可直接在罐子裡使用，也可以在額外的分裝盤上混合。
- 使用前請充分搖晃 Refresh Liquid。

有效期間

GC Initial Lustre Pastes：5 年

GC Initial Lustre Pastes Liquids：4 年

型號與規格

#	型號	規格
1	877096	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, V-Shades Set, 88g - 1x Neutral L-N (4g) - 1x Neutral Fluo L-NFL (4g) - 1x Value L-V (4g) - 1x Opal L-OP (4g) - 4x Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) (4g) - 10x Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L-10) (4g) - 1x Diluting Liquid (8ml) - 1x Refresh Liquid (8ml) - 1x Mixing Dish - 1x Brush 00, 1x Brush 2 - 1x Plastic Cover - 1x Technical Manual - 1x IQ LP ONE Colour Chart
2	876451	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Body Shade A, L-A, 4g
3	876452	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Body Shade B, L-B, 4g
4	876453	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Body Shade C, L-C, 4g
5	876454	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Body Shade D, L-D, 4g
6	876455	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste Neutral, L-N, 4g
7	876456	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 1, L-1, 4g
8	876457	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 2, L-2, 4g
9	876458	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 3, L-3, 4g
10	876459	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 4, L-4, 4g
11	876460	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 5, L-5, 4g

12	876461	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 6, L-6,4g
13	876462	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 7, L-7,4g
14	876463	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 8, L-8,4g
15	876464	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 9, L-9,4g
16	876465	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade 10, L-10,4g
17	876466	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade V, L-V,4g
18	876467	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Enamel Effect Shade OP, L-OP,4g
19	876468	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste Neutral, L-NFL,4g
20	876449	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Diluting Liquid, 8ml
21	876450	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE/NF, Refresh Liquid, 8ml
22	876469	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste Neutral, L-N,12g
23	876470	GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste Neutral, L-NFL,12g
24	877054	GC Initial IQ, One Body Concept, LP NF, plastic cover (1)
25	877051	GC Initial Brush 00 LP
26	877052	GC Initial Brush 02 LP
27	877053	GC Initial IQ, One Body, LP NF, mixing dish
28	877055	GC Initial IQ, One Body, LP NF, Alumina Box

製造業者名稱/地址：Manufactured by Klema Dentalprodukte GmbH (Address：Koblacherstrasse 3a, A-6812 Meiningen, Austria) for GC Europe N.V. (Address：Research Park, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium)

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)