

“而至”富士進階黏合劑 “GC” FujiCEM Evolve

衛部醫器輸字第 034104 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

預期用途

1. 金屬基座的嵌體、覆體、牙冠及牙橋之黏著。
2. 樹脂嵌體、覆體、牙冠及牙橋之黏著。
3. 全陶瓷嵌體之黏著。
4. 高強度（例如氧化鋁基、二矽酸鋰等）之全陶瓷嵌體、覆體、牙冠及牙橋之黏著。
5. 金屬、陶瓷與纖維柱釘之黏著。

禁忌症

1. 覆髓。
2. 已知對玻璃離聚物水泥、甲基丙烯酸酯單體或甲基丙烯酸酯聚合物的過敏者，避免使用本產品。

使用方式

膏劑的比率	1.0/ 1.0
操作時間(23°C/ 73°F)(分、秒)	2'15''
完成時間(37°C/ 99°F修復體定位後)(分、秒)	4'30''

色樣

Universal

儲存

建議儲存於室溫下(4-25°C)，遠離熱源、潮濕環境並避免陽光直射，以保持最佳性能。

型號規格

1	012948	GC FujiCEM Evolve Single Pack: - GC FujiCEM Evolve syringe(9.2g/5.0mL) *1 - GC Push and Click Tip Regular *15
2	012949	GC FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix: - GC FujiCEM Evolve syringe(9.2g/5.0mL) *3 - Mixing Pad #22 *1
3	012950	GC FujiCEM Evolve Triple Pack Automix: - GC FujiCEM Evolve syringe(9.2g/5.0mL) *3 - GC Push and Click Tip Regular *45
4	012954	GC Push and Click Tip Regular *15
5	012955	GC Push and Click Tip Endo *15

警告

1. 如有誤觸到口腔組織或是皮膚時，請立即用海綿或是棉花沾酒精清除後，用水沖洗。為避免誤觸，可用橡皮障和/或棉條將操作區與皮膚或口腔組織隔離。
2. 如有誤觸眼睛時，請用水沖洗後立即就醫。
3. 請勿將 GC FujiCEM Evolve 與含有丁香酚的材料結合使用，因為丁香酚可能會妨礙 GC FujiCEM Evolve 正確固化或粘結。
4. 在光固化過程中，請使用防光罩或類似的護目鏡。
5. 本產品不適用於填充或是冠心的堆疊。
6. GC Push and Click Tip 僅限於單次使用，為避免患者間的交叉污染，請勿重複使用 GC Push and Click Tip。不能在高壓滅菌器或化學滅菌器中對 GC Push and Click Tip 進行滅菌。
7. 極少數情況下可能對某些人產生過敏反應，發生此現象時，請立即停用本產品並就醫。
8. 應全程佩戴個人防護設備（PPE），例如手套、口罩和護目鏡。

製造廠名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)