

“而至” 吉勝推進式樹脂黏著劑

“GC” G-CEM ONE Paste Pak

衛部醫器輸字第 037378 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用。

僅限牙科專業醫事人員使用於建議用途。

產品敘述

通用型自黏式樹脂黏著劑。

適應症

- 黏接所有類型的陶瓷、樹脂、金屬基底的嵌體與冠蓋體、牙冠以及牙橋。
- 黏接金屬、陶瓷及纖維冠心根柱。
- 黏接所有陶瓷及複合牙貼片。
- 植體基台上牙冠和牙橋的最終黏結。

禁忌症

- 直接覆髓。
- 已知對甲基丙烯酸酯單體、甲基丙烯酸酯聚合物，或乙醇過敏的患者應避免使用本產品。

光固化

照射時間

高功率 LED (大於 1200 mW/cm ²)	10 秒
鹵素 / LED (700-1200 mW/cm ²)	20 秒

儲存

為取得最佳效能，建議存放在 4-25°C (39.2-77.0°F)。遠離熱源，避免潮溼及受陽光直射。

色樣

A2(Vita 色)、AO3(不透明)、白色不透明和半透明。

警告

- 如接觸口腔組織或皮膚，立即使用沾有酒精的海綿或棉布拭去。用水沖洗。可使用橡皮障和/或可可脂隔離操作區與皮膚或口腔組織。
- 使用 G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER 或 G-Premio BOND 時，若與材料接觸的組織變白或形成水泡，建議患者在痕跡消失前都不要碰觸該區域，通常在 1-2 週內。
- 如碰觸到眼睛，立即用水清洗並就醫。
- 本產品不可與含有丁香酚的材料一起使用，以免造成本產品無法適當固化或黏著。
- 使用防護性光護罩或類似的防護鏡來進行光固化作業。
- 本產品不適合用於填充或牙冠堆築。
- 在極少數情況下，某些人可能會對本產品過敏。如遇此狀況，請立即停止使用並諮詢醫生。
- 應配戴個人防護設備(PPE)，如手套、口罩和防護鏡。
- 避免吸入或攝入。
- G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer 和 G-Premio BOND 具有揮發性，請在通風良好的地方使用。建議患者用鼻子呼吸。
- 勿與其他產品混用。
- 光固化完全可以獲得有效的黏著強度。較低的光照強度可能導致黏著力不足。
- G-Premio BOND 是一種高度易燃液體和蒸氣。請勿在明火附近使用。遠離火源。不要在同一個區域大量存放。遠離陽光直射。

型號及規格

#	型號	規格
1	013634	G-CEM ONE PP Starter Kit A2 · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge A2 (7.6 mL) *1 · G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (2 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1
2	013635	G-CEM ONE PP Starter Kit Translucent · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge Translucent (7.6 mL) *1 · G-CEM ONE ADHESIVE ENHANCING PRIMER (2 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1
3	013636	G-CEM ONE PP Single Refill A2 · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge A2 (7.6 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1
4	013637	G-CEM ONE PP Single Refill Translucent · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge Translucent (7.6 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1
5	013638	G-CEM ONE PP Single Refill AO3 · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge AO3 (7.6 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1
6	013639	G-CEM ONE PP Single Refill White Opaque · G-CEM ONE Paste Pak Cartridge White Opaque (7.6 mL) *1 · Mixing Pad (No.22) *1

製造業者名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造業者地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)