

**“而至” 第二代基尼亞牙科用流動型樹脂
“GC” G-aenial Flo X & Universal Injectable**

衛部醫器輸字第 032862 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

	G-aenial Flo X	G-aenial Universal Injectable
產品用途	1. 底襯或基底。 2. 倒凹處的遮蔽。 3. 直接或間接修復體、暫時性牙冠、牙橋與牙釉受損邊緣的修復。 4. 高敏感區的封填。 5. 窩溝的封填。 6. 第 II、III、IV、I 與 V 級齲齒之直接修復。G-aenial Flo X 可應用於須高流動性樹脂之小型齲齒。	
禁忌症	1. G-aenial Universal Injectable 不得用於直接覆髓術。 2. 已知患者對丙烯酸甲酯類材料過敏時，不得使用本產品。	
色度	A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE, XBW, BW
儲存	建議儲存於陰涼處(4-25°C/39.2-77.0°F)，避免高溫或陽光直射。	
注意事項	1. 如誤觸口腔組織或是皮膚時，請立即用棉花球/棉片沾酒精擦除後，用水沖洗乾淨。為避免碰觸，請用橡皮障或/與椰油塗抹以便隔離皮膚或是口腔組織於操作範圍外。 2. 如誤觸眼睛，請立即用水沖洗後就醫。 3. 避免誤食本產品材料。 4. 勿與其他類似品混合使用。 5. 塗抹嘴限單次使用。為避免患者交互感染，請勿重複使用。塗抹嘴不得使用高壓或化學滅菌鍋消毒。 6. 操作過程須戴上塑膠或是橡膠手套以避免因直接碰觸到抑氧的樹脂層而引發過敏反應。 7. 固化照射過程中須戴上護目鏡。 8. 在進行聚合材料的拋光時，請使用集塵器、戴上面具以避免吸入切割產生的灰塵。 9. 避免衣服沾到材料。 10. 如材料誤觸到非醫療區域或是修復體以外的區域時，請用器械、棉片/棉花球去除後再行光照。 11. 本產品不得與含丁香油酸的材料合併使用，因為丁香油酸會抑制本產品的固化效果。 12. 勿使用過多的酒精擦拭塗抹嘴，否則可能引發本產品膏狀材料的污染。 13. 遵循法規處理廢棄物品。 14. 極少情況下可能引發過敏反應。如發現此現象請即停用本產品並就醫。 15. 全程使用個人防護措施，如手套、面罩與護目鏡。	

型號與規格

No.	型號	規格	No.	型號	規格
1	008317	G-aenial Flo X A1	9	012308	G-aenial Universal Injectable 1.7g A1
2	008318	G-aenial Flo X A2	10	012309	G-aenial Universal Injectable 1.7g A2
3	008319	G-aenial Flo X A3	11	012310	G-aenial Universal Injectable 1.7g A3
4	008320	G-aenial Flo X A3.5	12	012311	G-aenial Universal Injectable 1.7g A3.5
5	008321	G-aenial Flo X A4	13	012312	G-aenial Universal Injectable 1.7g A4
6	008322	G-aenial Flo X AO2	14	012313	G-aenial Universal Injectable 1.7g B1
7	008323	G-aenial Flo X AO3	15	012314	G-aenial Universal Injectable 1.7g B2
8	008324	G-aenial Flo X CV	16	012315	G-aenial Universal Injectable 1.7g CV
製造廠名稱: GC Dental Products Corporation 製造廠地址: 2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan 藥商名稱: 台灣而至股份有限公司 藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載 (市售品須刊載實際地址)			17	012316	G-aenial Universal Injectable 1.7g CVD
			18	012317	G-aenial Universal Injectable 1.7g AO1
			19	012318	G-aenial Universal Injectable 1.7g AO2
			20	012319	G-aenial Universal Injectable 1.7g AO3
			21	012320	G-aenial Universal Injectable 1.7g JE
			22	012321	G-aenial Universal Injectable 1.7g AE
			23	012322	G-aenial Universal Injectable 1.7g XBW
			24	012323	G-aenial Universal Injectable 1.7g BW