

“而至”伊尼雪思普特瓷牙染色劑 “GC” Initial Spectrum Stains

衛部醫器輸字第 033021 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品預期用途

本產品為廣用的染色粉與上釉劑，用於陶瓷牙材的上色與個別化的需求。

- 使用範圍：
本產品用於陶瓷牙材的外部上色，以及層疊陶瓷牙材的內部特徵。
因為可承受廣泛的熱膨脹範圍，本產品近乎兼容各種陶瓷牙材。
- 色樣選擇：
本產品染色粉有16種色樣。
- 可適應的稠度：
藉由使用上釉液/上釉膏液使本產品稠度可以更好地使用。

本產品用於陶瓷牙材的上色可使用在：

- GC Initial MC、GC Initial Zr-FS、GC Initial LiSi、GC Initial Ti、GC Initial LF、GC Initial LiSi Press、GC Initial PC
- GC Initial Zr Disk (zirconium dioxide)
- GC Initial LRF Block*

本產品用於層疊陶瓷牙材的個別化可搭配以下使用：

- GC Initial MC、GC Initial Zr-FS、GC Initial LiSi、GC Initial Ti、GC Initial LF

重點須知

- **GC Initial LRF Block**
建議使用GC Initial LRF專屬的上釉膏。
*本產品可限量地添加於GC Initial LRF上釉膏調和後以達到個別化需求。
- 層疊牙材可以使用本產品個別化調色。
本產品混合於Dentin、Enamel、Transpa的粉末中時，建議少量使用。
為確保正確的混合比率，建議先試做一個小型燒結樣本。
- 可在尚未燒結的陶瓷牙材進行堆疊時加入少量本產品。
- 在混合層疊牙材與本產品時，請使用建議的塑形液，勿使用本產品的上釉液。
- 請務必查閱各別層疊牙材的燒結參數。

上釉劑

- 上釉粉(GC Initial Spectrum Glaze Powder GL, 10g)：
細狀上釉粉與上釉液/上釉膏液調和使用。
藉由使用本產品上釉液/上釉膏液使上釉粉稠度可以更好地適應用戶。
- 上釉液(GC Initial Spectrum Glaze Liquid, 25ml)：
混合液體後呈標準的低黏性，方便細微處之運用。
- 上釉膏液(GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid, 8ml)：
混合液體後呈高黏性，可做膠狀之運用。

型號與規格

No.	型號	規格
1	877094	GC Initial Spectrum Stain Set: - Stain SPS1 ~ SPS16 (3g)*1 /each - Glaze Powder GL (10 g)*1 - Glaze Liquid (25 mL)*1 - Glaze Paste Liquid (8 mL)*1 - Shade Guide*1
2	876151	GC Initial Spectrum Stain SPS-1 (3 g)
3	876152	GC Initial Spectrum Stain SPS-2 (3 g)
4	876153	GC Initial Spectrum Stain SPS-3 (3 g)
5	876154	GC Initial Spectrum Stain SPS-4 (3 g)
6	876155	GC Initial Spectrum Stain SPS-5 (3 g)
7	876156	GC Initial Spectrum Stain SPS-6 (3 g)
8	876157	GC Initial Spectrum Stain SPS-7 (3 g)
9	876158	GC Initial Spectrum Stain SPS-8 (3 g)
10	876159	GC Initial Spectrum Stain SPS-9 (3 g)
11	876160	GC Initial Spectrum Stain SPS-10 (3 g)
12	876161	GC Initial Spectrum Stain SPS-11 (3 g)
13	876162	GC Initial Spectrum Stain SPS-12 (3 g)
14	876163	GC Initial Spectrum Stain SPS-13 (3 g)
15	876164	GC Initial Spectrum Stain SPS-14 (3 g)
16	876165	GC Initial Spectrum Stain SPS-15 (3 g)
17	876166	GC Initial Spectrum Stain SPS-16 (3 g)
18	876180	GC Initial Spectrum Glaze Liquid (25 mL)
19	876182	GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 mL)
20	876181	GC Initial Spectrum Glaze Powder GL (10g)

產品特性

特性	計量單位	數值
熱膨脹係數(25~500)°C	10 ⁻⁶ K ⁻¹	6.8
玻璃轉化溫度	°C	530
溶解度	µg/cm ²	≤100
彎曲強度	MPA	

*以上數值符合ISO 6872: 2008標準。

分級: Dental Ceramics Type I / Class VI (stains) & Class VIII (glaze)

產品保存

產品敘述	效期
染色劑	10年
上釉粉	10年
上釉液/上釉膏液	4年

製造廠名稱/地址: Manufactured by KLEMA Dentalprodukte GmbH (address: Koblacherstrasse 3a, A-6812 Meiningen, Austria) for GC Europe N.V. (address: Research Park Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium).

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載
(市售品須刊載實際地址)