

“而至”寇派克暫時性黏著劑 “GC” Coe-Pak

衛部醫器輸字第 031002 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品敘述與用途

本產品限牙科醫師或專業人員使用於建議用途：

可做為手術用敷料與牙周填充物。

本產品適用於需要使用牙周膏劑的情況。

禁忌症

極少情況下有過敏現象，一旦發現過敏反應應即停止使用並就醫。

Coe-Pak Regular 與 Coe Pak Hard and Fast 之比較

(皆以等長時間半分鐘混合)

	Coe-Pak Regular	Coe Pak Hard and Fast
混合後多久可操作	3 分鐘	1 分鐘
黏稠度	可塑	濃稠但可塑
操作時間	10-15 分鐘	5-8 分鐘
與其他物質黏合時間	10-15 分鐘	5-8 分鐘
最終硬度	30 分鐘(有彈性不容易碎)	10 分鐘(較硬但不容易碎)

注意事項

1. 有對產品成分敏感的報導，從單純的皮膚泛紅到起疹，腫脹與噁心與/或嘔吐。使用前醫師應先確認本產品不會對患者產生過敏反應。
2. 如有碰觸到眼睛，請即用水大量沖洗後就醫。
3. 如有碰觸到皮膚，請用肥皂與清水清洗。如有發現刺激反應請即就醫。

儲存

為達到使用的理想效果，建議儲存於室溫下(70° to 77°F; 21° to 25°C)的乾燥場所。

有效期間：出廠後 2 年。

規格與包裝

Tubes

135001 COE-PAK Regular Set (1 x 90 g tube base, 1 x 90 g tube catalyst)

135301 COE-PAK Hard and Fast Set (1 x 90 g tube base, 1 x 90g tube catalyst)

製造廠名稱：GC America Inc.

製造廠地址：3737 W 127th St, Alsip, IL 60803, USA

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：(依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載)