

“而至” 寇怡庫萊義齒底墊材料

“GC” Coe & Kooliner Denture Relining Material

衛部醫器輸字第 031073 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用
本產品限牙科醫師或專業人員使用於建議用途。

品名	Coe-Soft	Coe Lubricant	Kooliner
產品敘述與用途	軟式義齒襯底材。 用於塑膠牙托暫時性的襯底。 須於診療椅上操作。	需與 GC 襯底系列材料合併使用(如: COE-SOFT, COE-COMFORT, KOOLINER, GC RELINE HARD, 與 COE-RECT) (本證未包含 COE-SOFT, COE-COMFORT, KOOLINER, GC RELINE HARD, 與 COE-RECT)。本產品可在襯底材與義齒間無須黏著的部位形成屏障,也可隔絕黏膜組織以降低因材料自聚散熱可能造成的傷害。本產品的用法因搭配使用的材料類型而有不同。請參考相關襯底材料的使用說明書。	硬式義齒襯底材。 用於塑膠牙托暫時性的襯底。 須於診療椅上操作。
禁忌症	如患者對材料過敏,一旦有過敏現象應即就醫。	極少情況下有過敏現象,一旦發現過敏反應應即停止使用並就醫。	如患者對甲基丙烯酸甲酯類材料過敏者。一旦有過敏現象應即就醫。
注意事項	提醒患者不得在襯底材上使用刷子或是研磨物質(如牙膏)。最好的清潔方式是用冷水沖洗後用濕棉布擦乾。	1. 如有碰觸到眼睛,請即用水大量沖洗。如敏感現象持續,請即就醫。 2. 如有碰觸到皮膚,請用肥皂與清水清洗。如發現刺激反應請即就醫。	
儲存	為達到使用的理想效果,建議儲存於室溫下(70° to 77°F; 21° to 25°C)的乾燥場所。	20-25°C (68 - 77°F) 的乾燥場所。	4-25°C (39 - 77°F).
有效期間	3 年	10 年	3 年

規格與包裝

- 344001 COE-SOFT Professional Package
(1 x 6 oz. (170g) powder,
1 x 6 oz. (177ml) liquid,
1x 5/8 oz. (18 ml) COE LUBRICANT and accessories)
- 344002 COE-SOFT Powder Refill, 6 oz. (170g)
- 344091 COE-SOFT Liquid Refill, 6 oz. (177ml)
- 344094 COE LUBRICANT Bottle, 5/8 oz. (18 ml)
- 345001 KOOLINER Professional Package
(1 x 3 oz. (80g) powder,
1 x 2 oz. (55ml) liquid and accessories)
- 345002 KOOLINER Powder Refill, 3 oz. (80g)
- 345091 KOOLINER Liquid Refill, 2 oz. (55ml)

製造廠名稱: GC America Inc.

製造廠地址: 3737 West 127th Street, Alsip, Illinois 60803, USA

藥商名稱: 台灣而至股份有限公司

藥商地址: (依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載)